

Mode d'emploi : Tire-lait LACTALINE® AMEDA®



I. Démarrage de votre tire-lait

- Branchez le câble d'alimentation sur une prise de courant standard



- Reliez le set au Lactaline.

Attention : si vous utilisez un **double pompage** (2 téterelles), enfoncez les tuyaux dans le double raccord. Dans le cas d'un **simple pompage** (1 téterelle), enfoncez le tuyau dans le simple raccord, et **bouchez le raccord non utilisé avec le capuchon** pour éviter un appel d'air.

- Tenez les téterelles face au sein en plaçant le mamelon au centre de la téterelle. Il est **NECESSAIRE** que la téterelle soit bien en contact avec le sein.

II. Phase de stimulation



- Démarrez le tire-lait au moyen du bouton de réglage « Speed ». Pour ce faire, il vous faut mettre les différents boutons du tire-lait comme indiqué ci-dessous :
 - Le **bouton de gauche** « Speed », permettant de **régler la cadence d'aspiration**, en **position maximale**.
 - Le **bouton de droite** « Suction », permettant de **régler la puissance d'aspiration**, en **position minimale**.
 - Une LED verte s'allume pour vous signifier que l'appareil est bien en fonction.



III. Phase d'expression

- Placer la **cadence au minimum**, et jouer avec le bouton « Suction » pour trouver le **maximum de votre zone de confort**.



Attention : si le pompage est douloureux cela peut être dû à 2 raisons

- ➔ soit la succion est trop forte
- ➔ soit vous avez besoin d'une taille de tunnel (téterelle) différente
 - une taille plus grande si votre mamelon colle ou frotte le long des parois du tunnel de la téterelle (<http://www.jelouemontirelait.com/ameda-teterelles-adaptables-hyginikit-34.html>)
 - une taille plus petite si plus de 3mm de votre aréole sont aspirés dans le tunnel de la téterelle (<http://www.jelouemontirelait.com/ameda-reducteur-de-teterelle-flexishield-35.html>)

- A la fin de votre phase d'expression, pour **éteindre le tire-lait**, il vous suffit de mettre les boutons « Speed » et « Suction » au même niveau que les petits traits moulés dans l'appareil, la lumière verte s'éteint alors.



Vidéo :

Assemblage du set : https://www.youtube.com/watch?v=h1Z-tNfZ_x8