

## NOTICE D'UTILISATION



### CHARIOT DE TRANSPORT VERTICAL

**Avant toute utilisation** : consultez la notice.

**Contrôle à réception** : assurez-vous de l'état du mobilier et de l'intégralité des matériaux par un contrôle visuel.

#### DESCRIPTIF

- 1 : guide « partie pieds sommier »
- 2 : Logement roulement piètement lit »
- 3 : guide « partie tête sommier »
- 4 : Crochet de maintien barrière
- 5 : Roue à frein

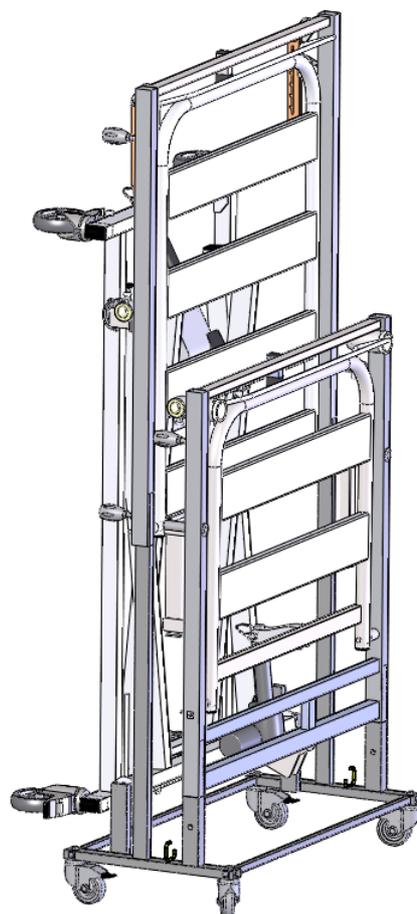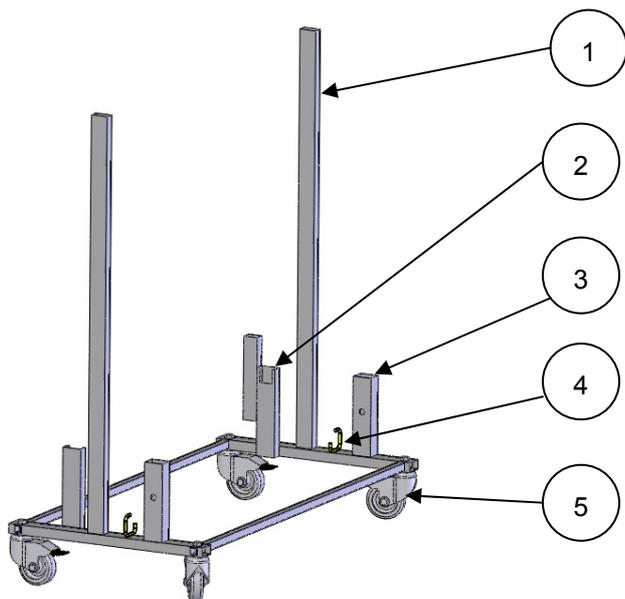


Ensemble chariot + lit

#### Remarques :



- Avant toute manipulation vérifier que les quatre roues du lit ainsi que celles du kit de transport ont les freins enclenchés.
- Le lit doit être en position basse.

## MONTAGE



1. Retirer la partie tête du lit.

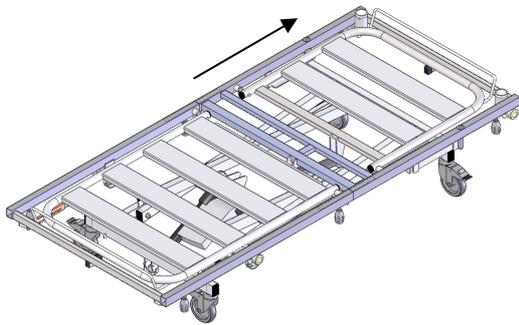


 **Ne pas enlever les goupilles de liaison sommier pieds / piètement**

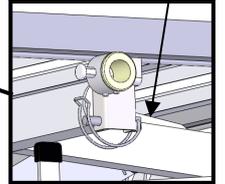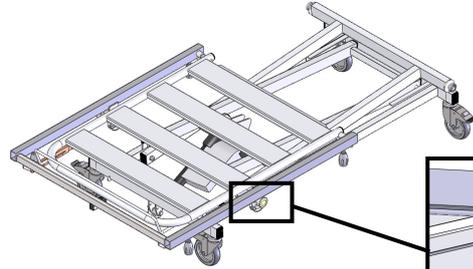


2. Placer le chariot en face du lit et insérer le chariot jusqu'à ce que le roulement de piètement soit dans le logement du chariot.

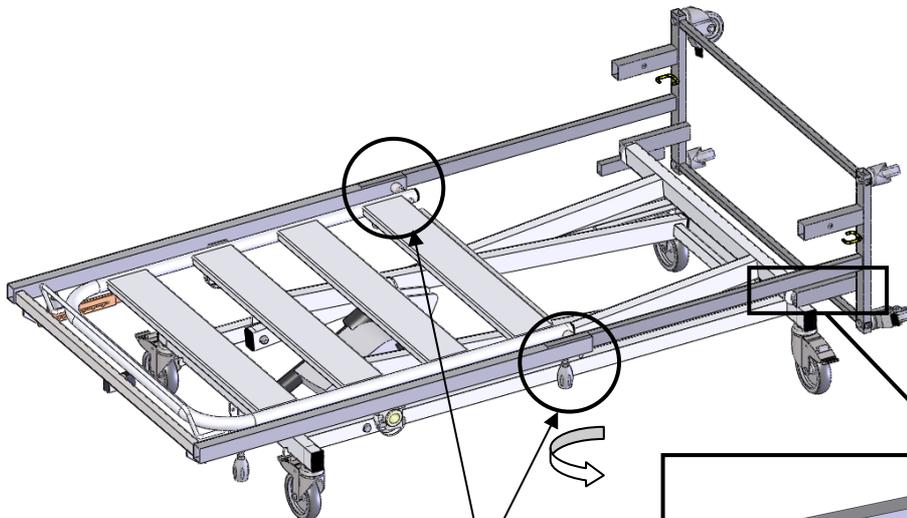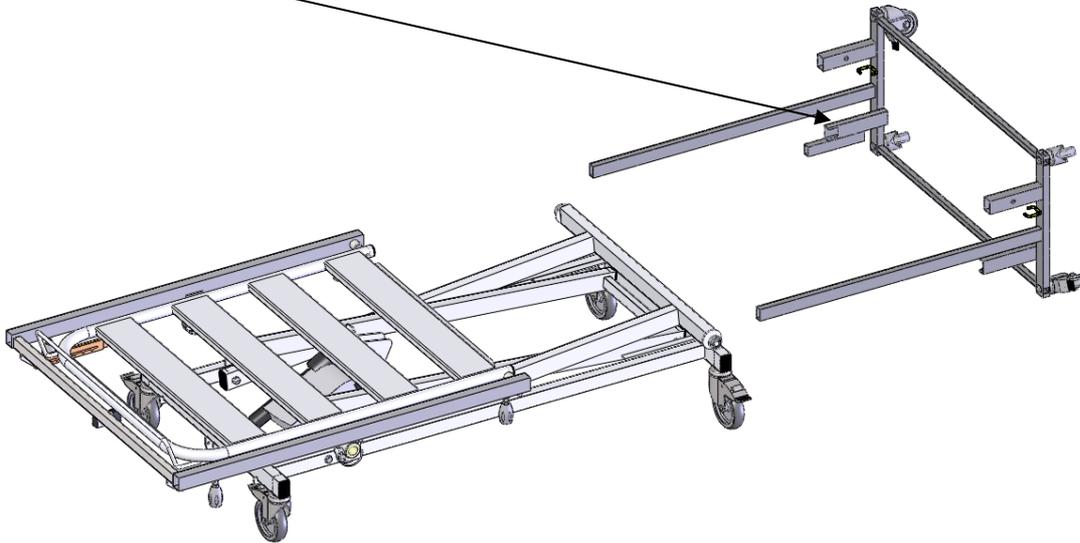

**Serrer les 2 rondos de serrage quand le chariot est en butée**

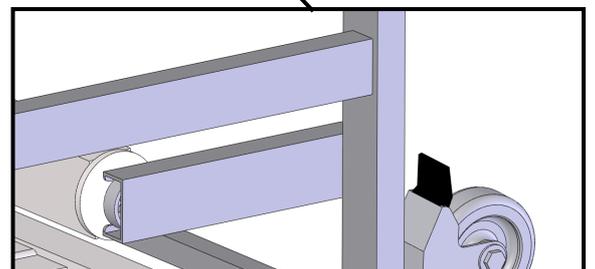


3. Lever l'ensemble pour mettre le lit à la verticale.

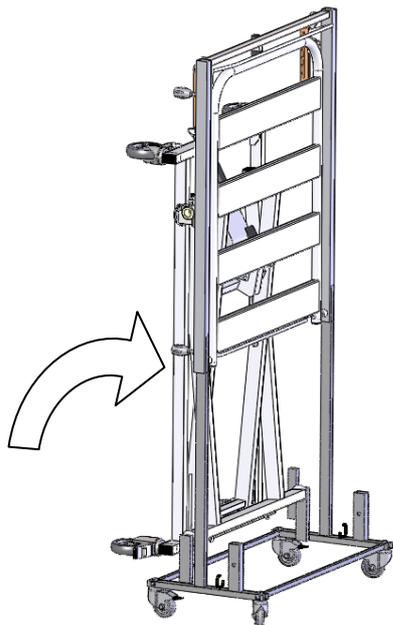

**Avant de lever, mettre les roues du chariot vers l'intérieur et bloquer les freins.**

4. Mettre en place les barrières.

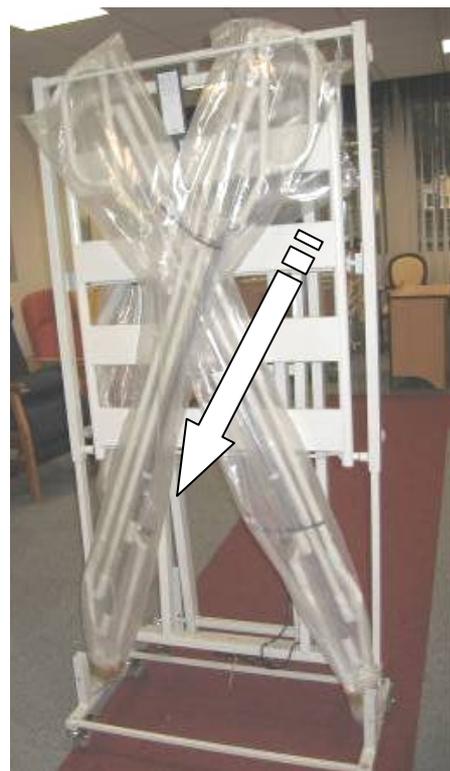

5. Mettre en place la partie tête du sommier. (vérin relève buste à l'intérieur du chariot)

