

NOTICE D'UTILISATION : ROLLATOR 2 ROUES 216112

Le rollator 2roues 216112 s'adapte à la taille de l'utilisateur grâce à ses poignées réglable en hauteur (76 à 93 cm) . Il est facilement pliable et permet d'obtenir un encombrement minimum. Son assemblage ne nécessite aucun outil. Lire attentivement les instructions et les mises en garde avant toute utilisation. Conservez cette notice.

Caractéristiques techniques :

- Largeur maximale : 58 cm
- Hauteur maximale : de 76 à 93cm
- Hauteur d'assise : 51 cm
- Profondeur d'assise : 20 cm
- Couleur : bleu clair et gris époxy
- Matière : métal acier
- POIDS NET : 7,4 kg

POIDS MAXI PATIENT : 130 kg

- Code LPP: 1285619

Instruction d'assemblage :

- Le rollator est livré plié.
- Déplier complètement et bloquer avec axes latéraux parfaitement droits.
- Glisser les deux poignées avec freins dans les tubulures adaptées
- Ajuster la hauteur des poignées en enfilant la visserie dans le trou sélectionné.
- Attention : les 2 poignées doivent être positionnés au même niveau.
- La visserie se monte dans le sens suivant : Positionner la vis avec l'écrou côté intérieur du rollator, ensuite positionner la goupille sur la vis côté extérieur du rollator, puis visser la molette du même côté que la goupille. Se référer au **Schéma 2**.
- Retirer les protections en plastique sur les roues.

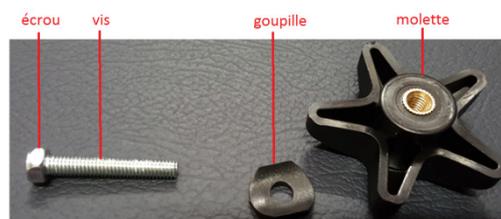


Schéma 1 : Légende de la visserie

Recommandations : d'utilisation

- Ce rollator ne peut être utilisé par des patients dont le poids excède 130kg
- L'utilisation de ce rollator sur un sol en pente ou irrégulier est à proscrire sous peine de basculement du patient.
- Avant chaque utilisation, vérifier que les deux poignées sont bien vissées et que le rollator est complètement déplié et verrouillé.
- Ne pas de mettre debout sur l'assise.

Entretien régulier :

- Essuyer le rollator avec un chiffon doux
- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base d'Eau de Javel qui peuvent endommager ou de décolorer le produit
- Vérifier régulièrement le serrage des poignées.
- Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies par MEDICAL CENTER.

Conditions de garantie :

La structure mécanique de ce produit est garantie 2 ANS , dans le cadre d'une utilisation normale. Cette garantie exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas à un matériel réparé ou modifié sans l'accord de EUROMEDIS.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces; Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages ou intérêts directs ou indirects.

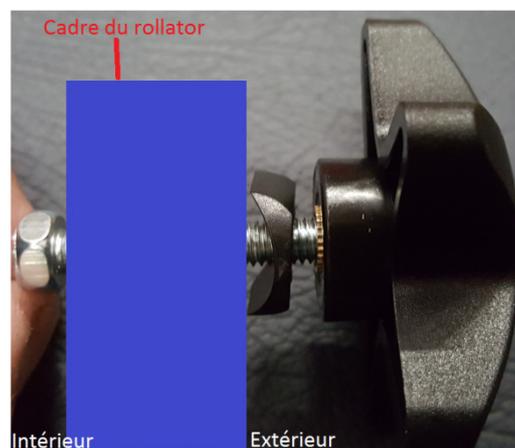


Schéma 2 : Ordre de vissage



Distribué par Medical Center
Z.I. de la Tuilerie - 12 rue Pierre Bray – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT
Tél : 03 44 73 83 60 – internet : www.laboratoires-euromedis.fr



Made in R.P.C.
Fabriqué par Laboratoires Euromédis
60290 – Neuilly-sous-Clermont
FRANCE