

Icônes du menu principal et des sous-menus

	Bolus		Fonction de débit basal temporaire activée/amulter
	Bolus standard		Remplacement de la cartouche et niveau actuel de la cartouche
	Bolus prolongé		Retour du piston
	Bolus mixte		Purger le dispositif de perfusion
	Débits basaux		Purger la tubulure
	Profil de débit basal A		Purger la canule
	Profil de débit basal B		Historiques
	Passer au profil de débit basal A		Historique de traitement
	Passer au profil de débit basal B		Historique des alarmes
	Fonction de débit basal temporaire		

Icônes d'alarme

	Pas de pile		Pas d'insuline
	Pile déchargée		Cartouche vide
	Pile inadaptée		Arrêt automatique
	Charger la batterie interne rechargeable		Erreur électronique
	Occlusion		

Présentation des icônes

 Lire le guide de l'utilisateur

Aides à la navigation

	Annuler		Avancer
	Confirmer		Remonter le menu d'un niveau
	Avancer pour déverrouiller		Reculer d'une étape

Icônes d'avertissement

	Niveau de cartouche faible		Bolus annulé
	Niveau de charge de la pile faible		Fonction de débit basal temporaire terminée ou annulée
	Retour incomplet du piston		Pompe à insuline en mode suspension
	Purge inachevée		Échec de la connexion Bluetooth®

Icônes générales

	Avertissement		Niveau de charge de la pile		Purge de la tubulure en cours		Couplage Bluetooth® en cours
	Alarme		Pile retirée		Purge de la canule en cours		Appuyer sur le bouton de commande pendant 2 secondes
	Signal sonore		Retirer la pile		Déconnecter le dispositif de perfusion de votre corps		Quantité totale d'insuline par jour (basal et bolus)
	Signal de vibration		Retour du piston en cours		Prêt pour couplage Bluetooth®		

Service clientèle: 0800 883056

Ypsomed S.A.S // 18 – 20, rue Soleillet // 75020 Paris



Ypsomed AG
3401 Burgdorf, Switzerland
www.ypsomed.com



1250

YPSOMED
insuline solutions