

Pour portable O2 DEVILBISS

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">PROCEFURE DE CALIBRATION DeVILBISS</p> |
|---|

OPERATION N°1

Presser simultanément le bouton noir et vert pendant 3 secondes : Led 1 et 8 clignotent.

Presser le bouton noir pendant 3 secondes pour valider la position basse de la jauge.
Led 1 clignote.

Attendre 30/40 secondes entre les 2 opérations.

OPERATION N°2

Presser simultanément le bouton noir et vert pendant 3 secondes : Led 1 et 8 clignotent.

Presser le bouton vert 3 fois pour calibrer la position haute de la jauge.

Appuyer sur le bouton vert si valeur correcte pour valider la calibration.

Valeurs :

Cuve 37L -> Led 4

Cuve 45L -> Led 7

Cuve 60L -> Led 5

Stroller 1.2L -> Led 8

Spirit 0.6L -> Led 3

Dans le cas ou les diodes ne sont pas bien positionnées, ajuster avec le bouton noir jusqu'à la bonne LED.

L'équipe technique.