



Points de lubrification périodique



CE DISPOSITIF MEDICAL DOIT ETRE MIS EN ŒUVRE OU FAIRE L'OBJET D'UNE FORMATION PAR UN PROFESSIONNEL DE SANTE

Maintenance électrique



Si, lorsque vous utilisez la télécommande ce voyant s'allume en rouge, il est impératif de recharger la batterie.



Lors de la période de charge la batterie est chargée si le témoin vert s'allume.

Mettre en charge la batterie TOUS LES SOIRS

Avant chaque usage vérifiez la présence et le bon état des dispositifs de sécurité : goupilles et clavettes de verin, d'axe de fléau, d'axe de mât vertical.

Ces accessoires doivent être changés à la moindre lésion.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL EN CAS DE MANQUE OU DE MAUVAIS ETAT.

Garanti 3 ans parties électriques et mécaniques sauf batteries et casse

Ne jamais utiliser l'appareil lorsque le chargeur est relié au secteur.

AKS France 3 chemin des 28 Ponts - 30660 GALLARGUES LE MONTUEUX

Siret : 420 872 293 00014 - APE 182 A - S.A. au capital de 40000 €


AKS NAUSICAA

livret technique

modèle livré à partir du 01 01 07

FLYER 4 FLYELEC 4

mini fly 4 MINI 4 FLYELEC

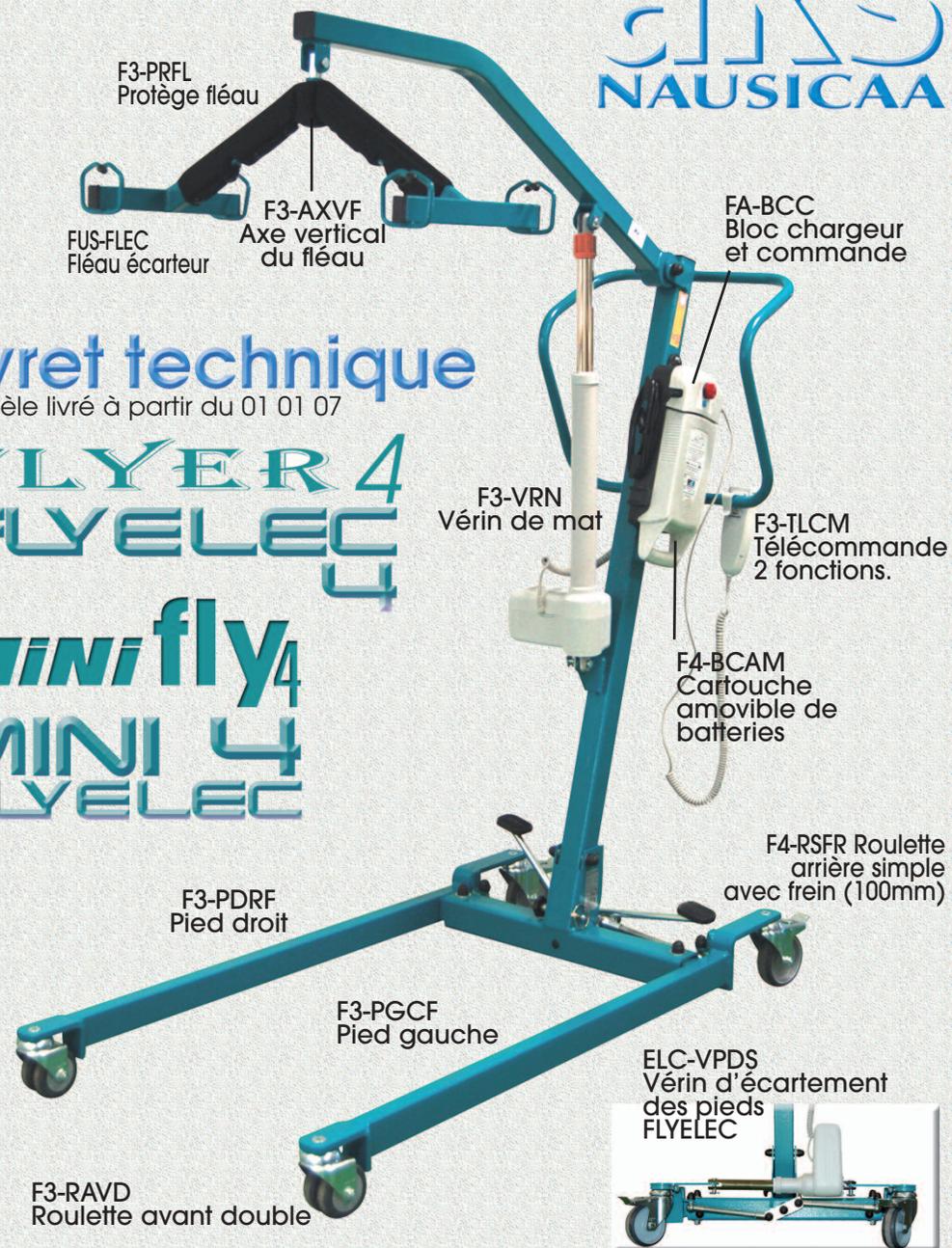

ce lève-personne MINIFLY ou MINIFLYELEC équipé d'un vérin SEUD-C V8E 14055A à une capacité de levage **200 kg maximum**



ce lève-personne FLYER ou FLYELEC, équipé d'un vérin SEUD-C V8E 14055A à une capacité de levage **175 kg maximum**


Pannes usuelles et remèdes

| ACTION | EFFET | CAUSES | REMEDES |
|---|------------------------|--------------------------------|---|
| Vous actionnez la télécommande montée ou descente | Le vérin ne réagit pas | Arrêt d'urgence enclenché | Le déverrouiller en appuyant |
| | | Télécommande défectueuse | Si possible faire un essai avec une autre puis la changer |
| | | Boîtier batterie mal engagé | Vérifiez son enclenchement |
| | | Boîtier de commande défectueux | Si possible faire un essai avec un autre puis le changer |
| | | Vérin débranché | Vérifiez la connection au boîtier de commande |
| | | Vérin défectueux | Si possible faire un essai avec un autre puis le changer |
| Au bout du temps de charge le voyant reste rouge | | Batterie défectueuse | La changer |
| | | Chargeur incorporé défectueux | La carte électronique interne doit être changée |
| Seul le bouton montée ou descente fonctionne | | Télécommande défectueuse | Si possible faire un essai avec une autre puis la changer |
| | | Carte électronique défectueuse | Après un essai avec une télécommande déjà vérifiée, la carte électronique interne doit être changée |


Notre service après-vente lève-personne
Tél : 04 66 51 50 80 - Fax : 04 66 51 50 47



Descente électrique d'urgence à actionner si la batterie ne permet plus de soulever le patient

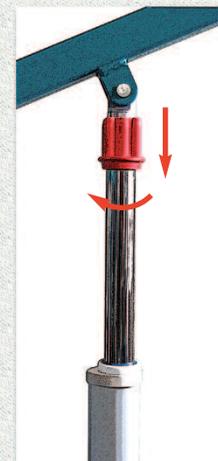

Descente mécanique de secours: Appuyer vers le bas et tourner dans le sens horaire.

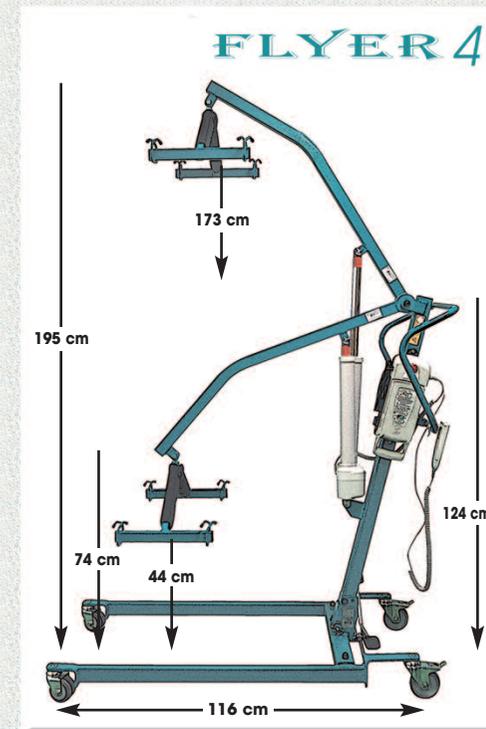

Déverrouiller la batterie en appuyant sur la touche latérale et lever vers le haut



Sortir la batterie en tirant vers l'avant. Faire l'opération inverse pour remettre la batterie

