

NAUSICAA
AKS

FlyHeavy **300**


Lève personne à écartement des pieds électrique

Poids maximum admissible
300 kg

MANUEL D'UTILISATION

maintenance préventive
et contrôles de sécurité

FlyHeavy 300

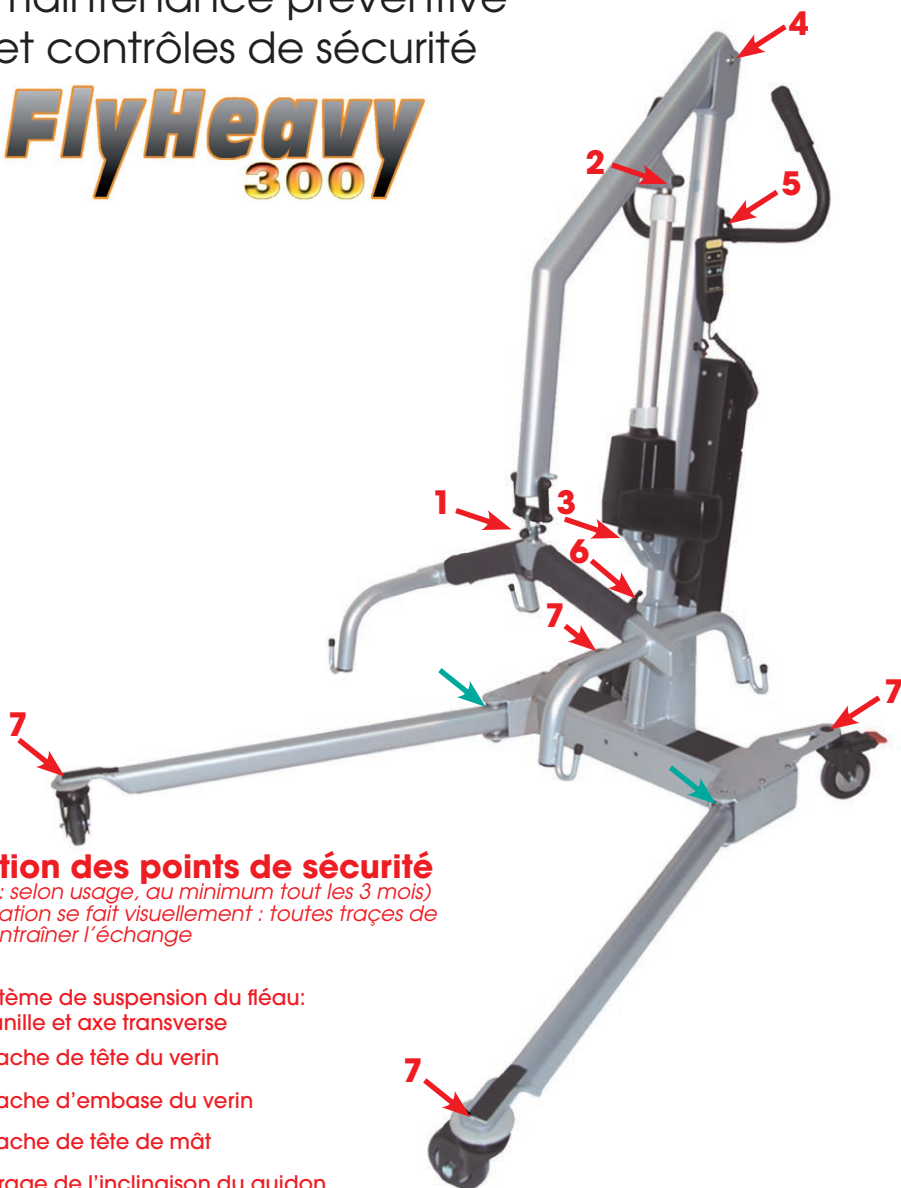

vérification des points de sécurité

(fréquence : selon usage, au minimum tout les 3 mois)
cette vérification se fait visuellement : toutes traces de
lésion doit entraîner l'échange

- 1 → système de suspension du fléau:
manille et axe transverse
- 2 → attache de tête du verin
- 3 → attache d'embase du verin
- 4 → attache de tête de mât
- 5 → serrage de l'inclinaison du guidon
- 6 → serrage de l'embase du mât
- 7 → fixation des roues

points de graissage périodique

(fréquence : selon usage, au minimum tout les 6 mois)

- axes d'écartement des pieds

CES CONTROLES PEUVENT SE FAIRE SANS CHARGE PONDERALE



FlyHeavy 300

fabriqué au



Danemark

vérin



LINAK

MAXI 300kg

112 cm
intérieur

68 cm
extérieur

GAMME
MAXXI
200-400

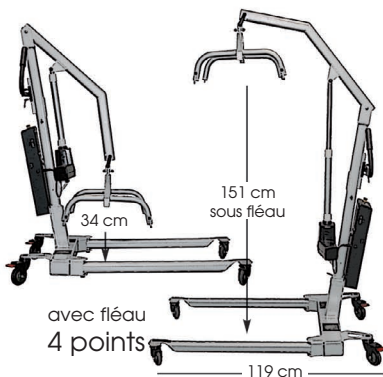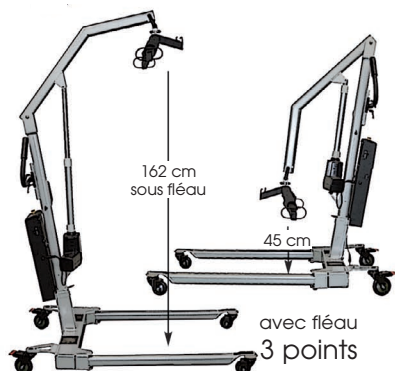

Avant de faire fonctionner le lève-personne, lire attentivement le livret d'utilisation.



Attention :

Capacité maximum : le lève-personne doit être utilisé pour soulever des personnes dont le poids est compris dans la capacité maximum du produit.

Maintenance : Une fois par an ou après 8000 cycles, l'appareil devra faire l'objet d'une inspection soigneuse sur les éléments de sécurité:

- système de suspension
- attaches du vérin
- roues
- articulation du mât
- articulations des pieds

Instructions de montage :

Le lève-personne est livré en 2 parties : partie inférieure (piètement) et partie supérieure (mât, vérin et fléau).

- Mettre le mât (C) de la partie supérieure dans le tube (D) de la partie inférieure prévue à cet effet. (figure 1)
- Serrer la poignée (E) positionnée sur le côté droit du tube (D). (figure 1)
- Connecter la prise du vérin (F) au boîtier d'alimentation (côté gauche) (figure 2)
- Connecter la prise du vérin d'écartement de pieds (G) au boîtier d'alimentation (H) (dessous de la batterie). (figure 2)
- Connecter la télécommande (I) sur le côté droit du boîtier d'alimentation. (figure 3 et 4)
- Vérifier que le bouton d'arrêt d'urgence (J) n'est pas enclenché (enfoncé). (figure 5)
- Vérifier que le lève-personne fonctionne correctement avant de l'utiliser avec un patient.

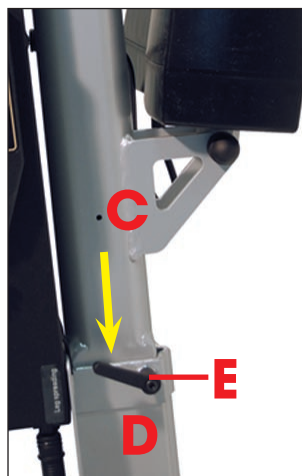


figure 1

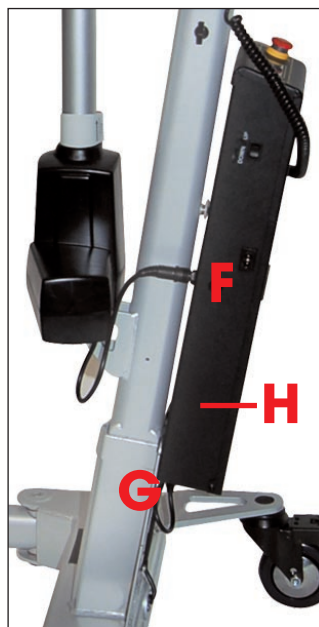


figure 2



figure 3

fiche de télécommande
orientable et vissée



figure 4



figure 5

Télécommande :

La télécommande est équipée de 4 fonctions marquées avec des flèches : montée/descente + écartement des pieds. Elle est équipée d'un câble en tire-bouchon et est magnétique, pouvant être placée sur le mât de façon à ce que le personnel soignant soit toujours près du patient. (figure 6)

Affichage de charge LED. (figure 7)

Témoin de niveau de charge de la batterie (figure 7)

Fusible :

Il y a un fusible réamorçable sur le boîtier de la batterie. (figure 8)

Bouton d'arrêt d'urgence :

Il se trouve sur le bloc batterie et déconnecte le courant en appuyant dessus. Tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour le « dés-enclencher ». Ce bouton n'est pas un bouton de marche/arrêt et doit toujours être « dés-enclenché » pendant l'utilisation de l'appareil ou **pour charger la batterie.** (figure 7)

Descente manuelle du vérin :

En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil, un bouton rouge de descente d'urgence se trouve sur le vérin. Soulever le bouton de descente d'urgence pour descendre le bras. Plus vous soulevez le bouton, plus la vitesse de descente est grande. (figure 9)

Bouton montée/descente sur le bloc alimentation :

En cas de mauvais fonctionnement de la télécommande, un bouton montée/descente électrique se trouve sur le bloc alimentation. (figure 10)

Charger la batterie :

Bloquer les roulettes pour éviter tous dommages au câble du chargeur. Brancher la prise du chargeur à la prise murale. La diode rouge/verte va s'allumer lorsque la batterie sera chargée et le chargement de la batterie s'arrêtera automatiquement lorsque la batterie sera chargée. Vert = complètement chargée ; rouge = vide. (figure 11)

Nous recommandons de charger la batterie régulièrement, chaque nuit par exemple.



les coloris de la télécommande
peuvent varier
figure 6

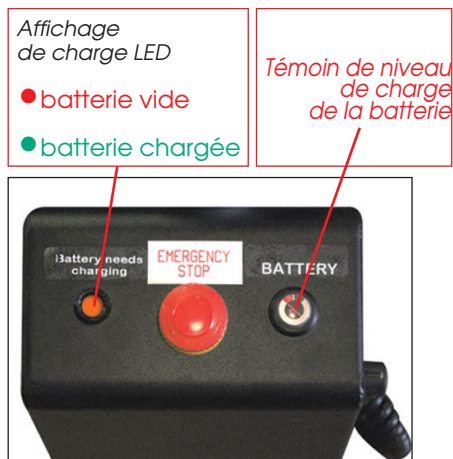


figure 7



figure 8



figure 9



figure 10

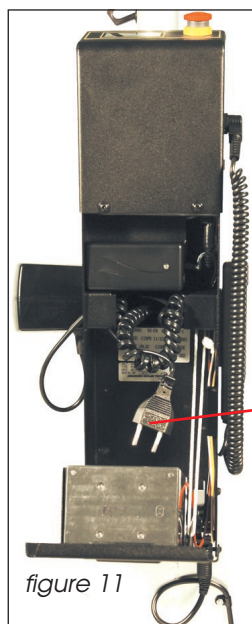


figure 11

prise du
chargeur

Freins :

Les freins doivent être serrés seulement lorsqu'il est rangé ou en charge.

Nettoyage

Nettoyer avec un tissu microfibre.
Utiliser de l'eau avec une solution
détergente, puis sécher.
Ne pas utiliser de solvants.

Service Commercial Siège
Tél : 04 66 51 50 80
Fax : 04 66 51 50 47
email: aks.france@orange.fr

SAV lève-personne
Tél : 04 66 51 50 80

NAUSICAA
aks

Notre correspondant