

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION


LEVE PATIENT

5735

Avant toute utilisation : consultez les documents d'accompagnement.

Contrôle à réception : assurez-vous de l'état du mobilier et de l'intégralité des matériaux, par un contrôle visuel.

DESCRIPTIF

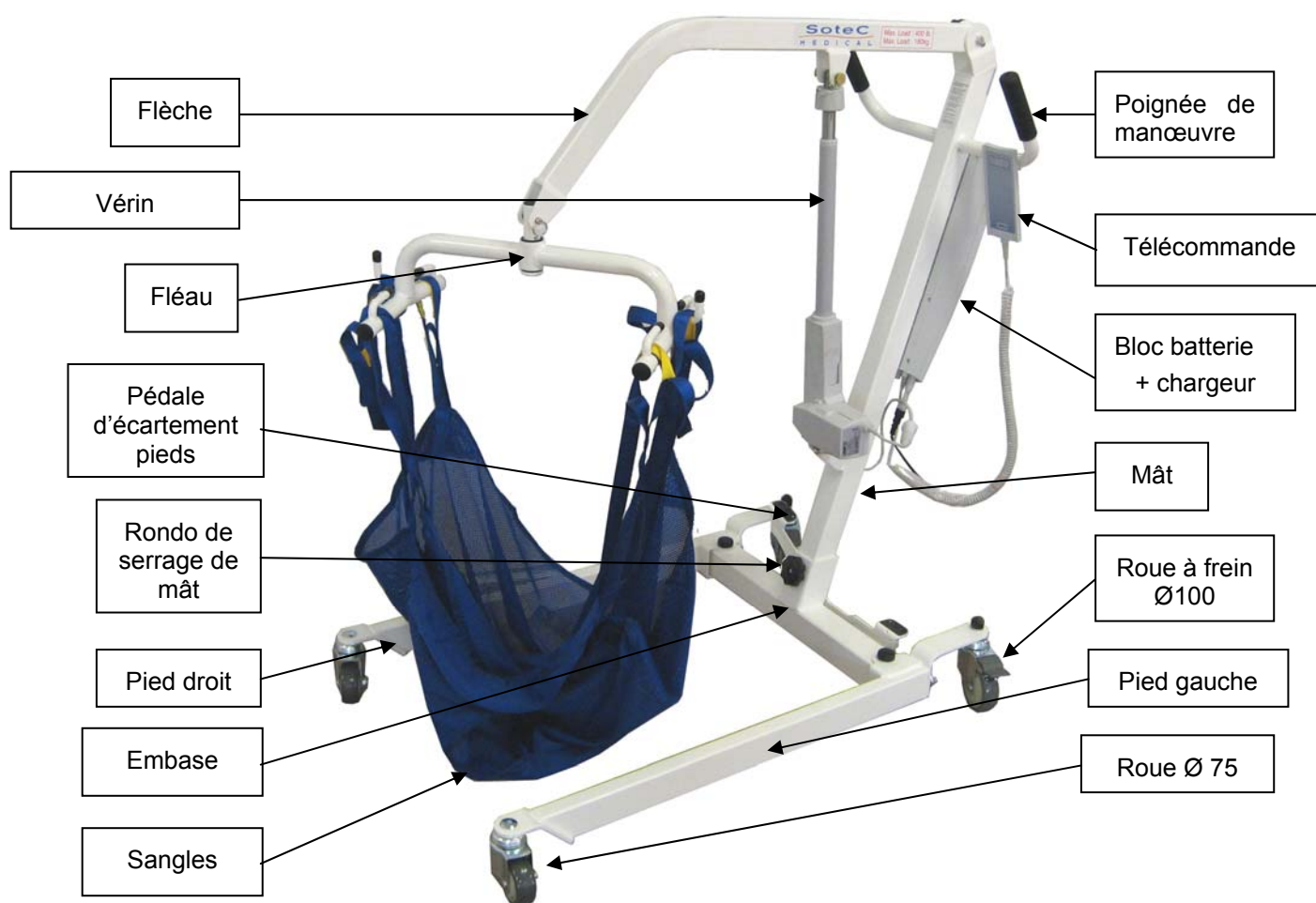

Charge maxi de levage jusqu'à 150 Kg

Vous venez d'acquérir un produit **SOTEC MEDICAL**. Votre choix s'est porté sur un matériel de qualité qui a fait l'objet d'un contrôle final individuel. Afin de bénéficier de tous les avantages de ce matériel, il est impératif de lire attentivement cette notice et d'en suivre les consignes. Aussi, pour des raisons de sécurité, il est primordial que les utilisateurs de nos dispositifs soient informés des conditions d'utilisation pour un bon fonctionnement.

Montage

Nos lève patients sont livrés démontés.

Le montage du lève patient se fait de la manière suivante :

Tout d'abord, sortir l'ensemble de son emballage et le disposer au sol (*Photo 1*) et mettre les freins sur les roues.



Photo 1

Prendre le mât et le présenter au-dessus de l'embase (*Photo 2*), et laisser glisser le mât jusqu'à ce que l'on puisse mettre le rondo femelle et la vis à collet carré (*Photo 3*).



Photo 2



Photo 3

Prendre la flèche, mettre les deux rondelles plastiques blanches de chaque côté au niveau de l'articulation et présenter l'ensemble au-dessus du mât (*Photo 4*).

Puis assembler les deux chapes mât/flèche à l'aide de la vis et du rondo femelle. *Attention au sens du montage de la vis* (*Photo 5*)



Photo 4



Photo 5

Mettre le vérin en place (écarter la flèche du mât en se méfiant de son envergure) et mettre les axes et circlips (*Photo 6, 7*).

Mettre le fléau en place avec l'axe et l'anneau d'arrêt (*Photo 8*).

Câbler le boîtier d'alimentation.
(voir chapitre câblage)

Enfin mettre en place les sangles sur le fléau. (voir page 3)



Photo 6



Photo 7



Photo 8

Mise en place des sangles



1) Mettre les deux sangles de dossier



2) Mettre les deux sangles d'assise sur les crochets extérieurs



3) Enfin mettre les deux sangles cuisses en passant la sangle sous la cuisse du patient.




Il est impératif que toute personne utilisant le lève patient soit formée à la manipulation du produit avant toutes applications sur un patient.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION


Utilisation

Le lève patient est doté d'un actionneur électrique. Avant la mise en place du lève patient, vérifier que les différents câbles, ne puissent être soumis à des pincements et des étirements lors des différents mouvements du lève patient. Tout levage ou descente d'un patient doit être effectué avec les freins enclenchés. Vérifier aussi la bonne charge de la batterie (chargement : 15 heures *quand le voyant est rouge*). La batterie doit être rechargée chaque soir ou lors de non-utilisation prolongée.

La manipulation de la montée et de la descente du lève patient se fait à l'aide de la télécommande.

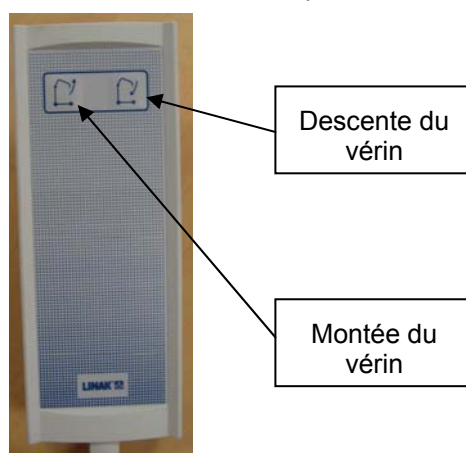

En cas de coupure d'alimentation, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre le système de débrayage il est possible de faire rentrer la tige du vérin pour faire descendre le patient.

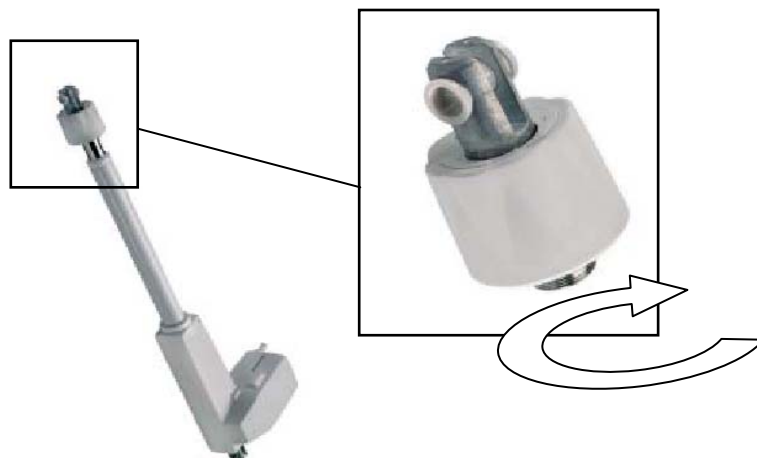

Précautions:



- L'autonomie est d'environ 40 cycles en charge.
- Quand l'indicateur de charge batterie s'allume, il vous reste entre 2 et 10 cycles en réserve.
- Si le bouton d'arrêt d'urgence est activé la charge des batteries est interrompue.
- En charge, le boîtier d'alimentation ne peut piloter aucun vérin.
- Le câble secteur peut s'enlever pour l'utilisation du lève patient. (photo)



Le lève patient est doté d'un dispositif d'ouverture de la base. Celui-ci permet de passer autour d'une chaise, d'un fauteuil ou de toilettes afin de se rapprocher au maximum.



Pour écarter les deux pieds il suffit d'appuyer avec son pied sur pédale droite.

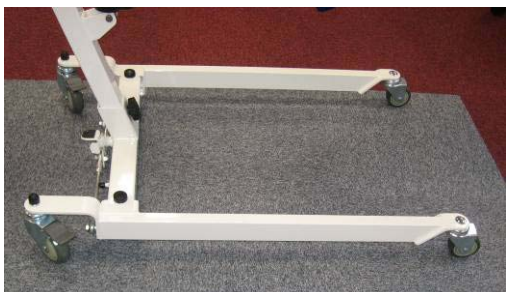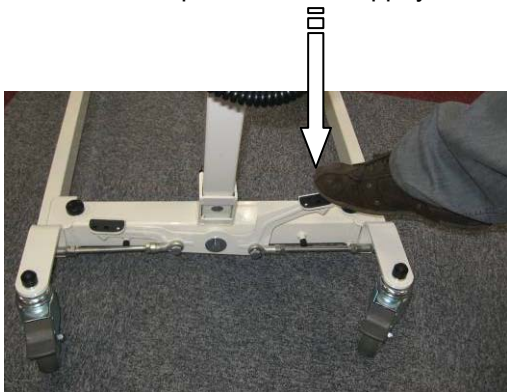

Limites d'utilisation

Comme tout dispositif, nos produits sont testés et homologués pour résister à des efforts et des cycles limités.

Il est interdit :

- de dépasser la charge maximum admissible par le dispositif (150 Kg patient).
- de démonter quoique ce soit, hors entretien courant.
- pour les dispositifs roulants, de les déplacer hors des milieux adéquats. (uniquement sur sol plat)

Il est conseillé :

- de ne pas laisser des personnes, susceptibles d'engendrer des dégâts sur d'autres personnes ou sur le dispositif lui-même, utiliser ce dernier.
- de prendre soin des différents câbles, alimentation et télécommande.


 *Les éventuelles restrictions quant à l'utilisation du lève patient (poids, taille, état du patient...) sont établis suivant l'appréciation du médecin.*

Cycle de fonctionnement : 2 minutes de travail pour 18 minutes de repos.

Résolution de problèmes

Problème	Cause	Solution
➤ L'action sur la télécommande ne fonctionne pas.	➤ Le câblage n'est pas correct.	➤ Vérifier le câblage (cf. chapitre descriptif).
	➤ La batterie peut être déchargée.	➤ Recharger la batterie
	➤ Le bouton d'arrêt d'urgence est resté enclenché.	➤ Vérifier en faisant un quart de tour vers la droite

Câblage

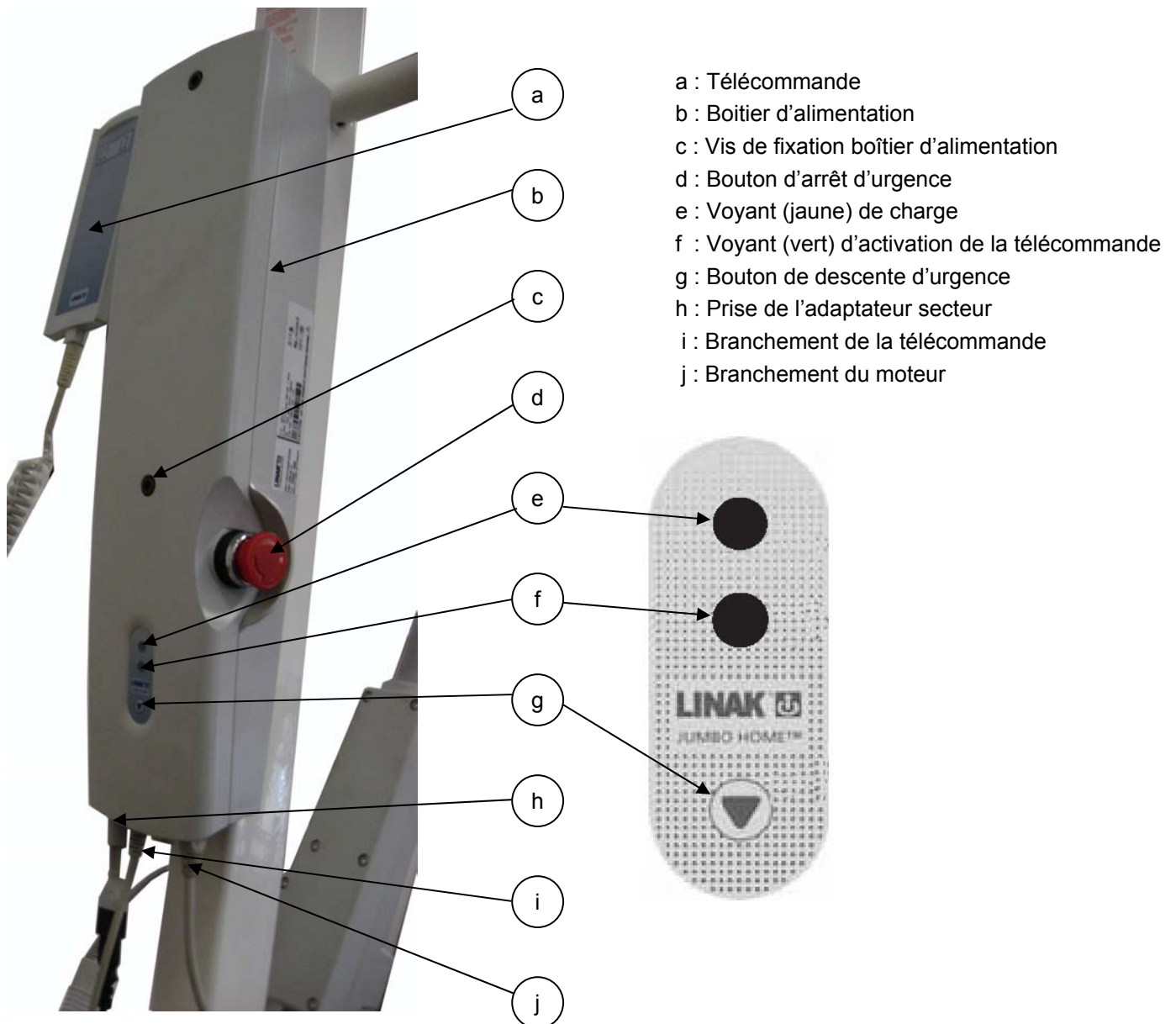

Pour monter ou démonter le boîtier d'alimentation, il faut visser ou dévisser les 2 vis CHC M6 (« c ») à l'aide d'une clé Allen .



CARACTERISTIQUES MECANQUES ET ENCOMBREMENT

Caractéristiques mécaniques		Condition d'utilisation, de transport et de stockage			
Poids	35 Kg	10°	<	Température ambiante	< 40°
Roues (arrière, frein)	2xØ100mm	30%	<	Humidité relative	< 75%
Roues (avant)	2xØ75mm	700hPa	<	Pression atmosphérique	< 1060hPa
Caractéristiques d'encombrement					
Longueur hors tout	1160mm				
Hauteur mât	1190mm				
Hauteur piétement hors tout	120mm				
Hauteur fléau/sol	Maxi :1635mm				
	Mini : 615mm				
Largeur intérieure piétement Position fermée	Maxi : 570mm				
	Mini : 570mm				
Largeur intérieure piétement Position ouverte	Maxi : 825mm				
	Mini : 585mm				
Poids maxi supporté (patient)	150 Kg				

ENTRETIEN

Nettoyage et désinfection

Nettoyage	Désinfection	Stockage	Choix des désinfectants	
➤ Eliminer les tâches visibles. ➤ Nettoyer toutes les surfaces à l'aide d'un détergent neutre (pH7) ou universel. ➤ Laisser sécher.	➤ Diffuser uniformément un aérosol désinfectant normalisé sur l'ensemble des surfaces.	➤ Remplir le tableau de suivi d'entretien. ➤ Protéger le matériel après désinfection.	➤ La norme AFNOR NFT 72 permet l'évaluation des différentes actions de désinfection.	
			Norme	Action
			NFT 72 150 NFT 72 151	Bactéricide
			NFT 72 180 NFT 72 181	Virucide
			NFT 72 200 NFT 72 201	Fongicide
			NFT 72 230 NFT 72 231	Sporicide

Précautions obligatoires

- Le matériel désinfecté ne doit, en aucun cas, se trouver en contact avec un matériel non désinfecté.
- Le local et le matériel d'entretien doivent être nettoyés après chaque utilisation.
- Eviter les contacts avec la peau, les yeux et les muqueuses.
- Ne jamais mélanger plusieurs produits.
- Respecter les dosages de dilution.
- Tout matériel doit être désinfecté à chaque utilisation.
- Tout matériel en fin de vie doit être désinfecté avant destruction.

MAINTENANCE

Une fois par an

- Vérifier le bon serrage des vis et des axes (notamment les axes flèche/fléau, flèche/mât et du vérin).
- Vérifier que la structure n'a subi aucune déformation (vérifier également les soudures et l'oxydation).
- Contrôler les différentes liaisons (jeu excessif, bruit...) .
- Vérifier l'état des sangles.
- Vérifier le bon fonctionnement du vérin, de la batterie et du bouton d'arrêt d'urgence.
- Vérifier le bon fonctionnement de l'ouverture de la base.
- Vérifier le bon roulage des roues ainsi que le freinage.
- Effectuer un test de charge à 150kg.
- Noter ces informations et la date de vérification sur le carnet d'entretien.

En cas de déformation, veuillez changer la pièce défectueuse.



ATTENTION : NE PAS DEMONTER L'APPAREIL ELECTRIQUE!

Si un défaut est détecté, contacter immédiatement votre revendeur ou le service technique de la société SOTEC MEDICAL (cf. chapitre Garantie) pour un diagnostic complet. Si un doute subsiste, ne pas utiliser l'appareil.

GARANTIE

➤ Ce matériel est **garanti 2 ans** par le constructeur.

➤ En cas de problème, contacter votre revendeur ou notre service technique :

 **02.40.33.89.67.**

➤ **Responsabilité** : La société SOTEC MEDICAL se dégage de toute responsabilité si un accident survient à la suite d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'un démontage de l'appareil. L'appareil sera exclu de la garantie et de la responsabilité de la société pour tout ajout d'accessoire non commercialisé par SOTEC MEDICAL.

Suivi d'entretien

Référence du lève patient : 5735 N° de série du lève patient (cf. étiquette) : Date de facturation du lève patient (date de départ de la garantie) : .. / .. /			
Date	Type d'intervention – action corrective	Nom du technicien	Signature

En cas de retour du produit chez le revendeur ou le fabricant, merci de désinfecter le matériel et de faire suivre le "suivi d'entretien" (original ou photocopie) ci-dessus.



SOTEC MEDICAL S.A.S.

12, rue de la Garde – B.P. 93572 – 44335 NANTES cedex 3 - France

☎ 02 40 33 89 60 – 📠 02 40 03 74 44

www.sotecmedical.com – ✉ sotec@sotecmedical.com