

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE DU BOCAL D'ASPIRATION POUR VACUAIDE



1

Eteindre l'appareil et évacuer le vide.



2

Déconnecter la prise d'alimentation de l'appareil (si connecté).



3

Retirer la cartouche et le tube de connexion. Ne pas retirer la bille plastique du couvercle afin d'éviter tout risque d'étouffement.



La cartouche filtrante NE DOIT JAMAIS être humide.

Le matériau constituant le filtre ne peut pas être retiré du coude.



4

Retirer le bocal de l'appareil.



5

Retirer soigneusement le couvercle et vider le contenu du bocal. **Le bocal doit être vidé et nettoyé après chaque usage.**



6

Laver le bocal et son couvercle dans de l'eau chaude et un liquide vaisselle. Rincer avec de l'eau chaude.



7

Plonger ensuite 60 minutes dans une solution composée d'un quart de vinaigre et de trois quarts d'eau chaude et laisser sécher.