

# GUIDE D'INSTALLATION D'UNE POCHE JETABLE SUR UN ASPIRATEUR DE MUCOSITÉS VACUAIDE

Le système de poche jetable FLOVAC utilise un récipient souple qui peut être utilisé avec les appareils DeVilbiss VacuAide. Veuillez SVP procéder de la façon suivante :



**1** Configuration standard d'un VacuAide avec bocal rigide de 800ml.



**2** Déconnecter le tube de connexion et le tuyau patient du bocal. Retirer le bocal de 800ml standard et remplacer par le bocal réutilisable et autoclavable Flovac 1 litre. (article réf. 31843).



**3** *Remarque:* Les poches jetables sont disponibles en 2 versions:  
Poche Standard : article réf. 31848  
Poche avec gel en poudre: article réf.31858



**4** Placer le bocal Flovac dans son emplacement sur le VacuAide. Des raccords avec des couleurs différentes (blanc pour le patient, jaune pour la connexion avec l'appareil) permettent d'éviter un montage incorrect.

Connecter la poche Flovac au VacuAide en utilisant le tube de connexion 26 cm (réf. 7314D-630) et le raccord mâle-mâle jaune (réf. SP.0223). Connecter le tuyau patient (1,8m) au coude blanc.