


FICHE DE MISE EN PLACE DU MATELAS




Cairflow

Systeme à Air CARPENTER S.A.S


DynaBest

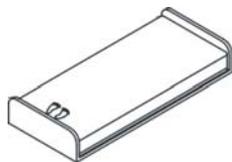

1- Installer le surmatelas sur le cadre du lit. Insérer le matelas clinique dans le caisson prévu à cet effet. Bien repérer l'emplacement des pieds. Vérifier que les valves CPR (situées à la tête du matelas) sont bien fermées.

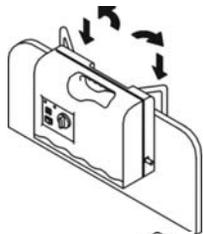


2 – Accrocher le compresseur au pied du lit

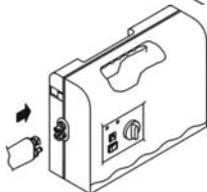


3 – Connecter les tubes de ventilation du matelas au compresseur.

Attention : Vérifier que les tuyaux ne sont pas entortillés ou coincés sous le matelas

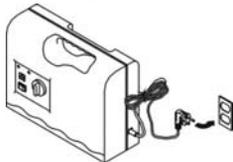

4 – Brancher le compresseur

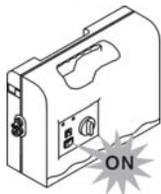

5 – Allumer le compresseur


Le compresseur commence à distribuer l'air dans le matelas.

Une fois que la pression appropriée est atteinte, le voyant de pression normale (voyant vert) s'allume.

6- Installer le patient sur le matelas

Note : À chaque nouveau gonflage du matelas, il est recommandé de positionner le bouton de confort sur « ferme », pour un gonflage plus rapide.

Grâce à ce bouton, l'utilisateur pourra ajuster la souplesse du matelas à sa convenance.

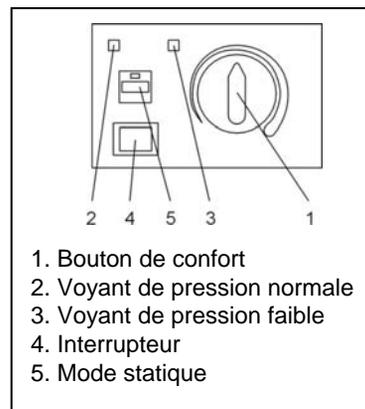

Mode transport :

Déconnecter les tubes de ventilation du compresseur et connecter les embouts entre eux.