

TUTORIEL : POSITIONNEMENT D'UNE PASTILLE ADHÉSIVE DANS LE COUVERCLE DE VOTRE **actiTENS** AFIN DE LE MAINTENIR A PLAT DURANT LA CHARGE

1. Ouvrir le boîtier de recharge. S'assurer que la surface intérieure du couvercle est propre et sèche.

2. Poser l'actiTENS (respecter le sens, la LED doit être du côté du couvercle).



3. Enlever la pastille adhésive de son support.

4. Déposer la pastille à l'envers sur l'actiTENS (dôme contre l'actiTENS et adhésif vers le haut) au niveau de l'inscription actiTENS (au milieu de l'inscription, dans l'alignement du bouton).



5. Fermer le couvercle du boîtier de recharge délicatement, la pastille va venir adhérer au couvercle.

6. Rouvrir le couvercle et vérifier que la pastille a bien adhéré au couvercle en pressant légèrement avec le doigt.

