

NOTE D'INFORMATION

Concernant le DETECTEUR DE CHUTE BRUTALE*

Réf. 21PDER911

Intervox a commercialisé jusqu'en 2016 le détecteur de chute brutale* réf. 21PDER911
Intervox tient à préciser certains points importants quant à l'utilisation de ce produit et aux alertes envoyées en cas de chute :

Ce déclencheur se porte au poignet.
Il doit être porté en permanence.
Toute autre utilisation peut engendrer de fausses alarmes.



COMMENT ALERTER EN CAS DE CHUTE ?

2 types d'alarmes :

- Alarmes manuelles : déclenchement par appui sur le bouton poussoir.

Afin de signaler que l'appel est bien lancé, après un court instant, la led s'allume en rouge et une légère vibration apparaît.

La personne qui prend l'appel dialogue alors en interphonie via le transmetteur Quiatil et agit en fonction de l'urgence de l'appel.

- Alarmes automatiques : dans le cas où le déclencheur détecte une chute, le système déclenchera automatiquement une alarme avec une surveillance du lien radio entre le déclencheur et le transmetteur Quiatil.

ATTENTION ; toutes les chutes ne sont pas systématiquement détectées

Exemples de chutes types :

Etat d'inconscience et incapacité à appuyer sur le bouton suite à une chute lourde ou une perte d'équilibre nette qui se produit dans la vie quotidienne dans la salle de bains, au lever du lit ou lors de tout déplacement dans l'habitat. Il se peut que certaines chutes (chute molle, chute/descente contrôlée contre un mur ou sur une chaise...) ne soient pas détectées par le déclencheur. Les technologies de détection de chutes sur lesquelles est basé le déclencheur ne permettent pas d'analyser/interpréter toutes les situations. En cas de non détection de chute, le porteur peut à tout moment déclencher manuellement l'alarme en appuyant sur le bouton poussoir.

C'est pourquoi Intervox préconise fortement d'appuyer systématiquement sur le bouton d'alerte du déclencheur dès que la situation le permet.

** attention, toutes les chutes brutales peuvent ne pas être détectées automatiquement, c'est pourquoi il est indispensable d'insister sur la nécessité d'appuyer sur le déclencheur après une chute*