




Kangaroo™

Pompe d'alimentation entérale connect

Vue d'ensemble de la pompe

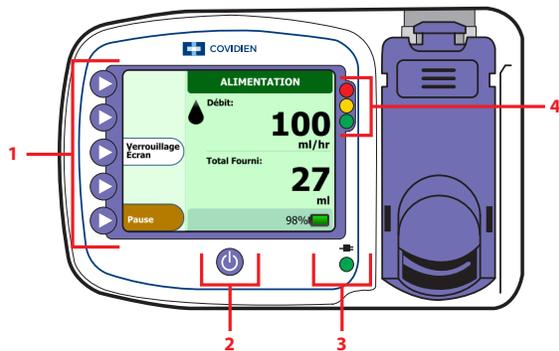

1. Touches rapides

Appuyer sur une touche pour sélectionner l'option qui y correspond à l'écran.

2. Bouton de mise sous tension.

Appuyer une fois sur le bouton pour mettre sous tension.

Appuyer sur le bouton et le tenir enfoncé pour mettre hors tension.

3. Source d'alimentation

Voyant vert allumé lorsque la pompe est reliée à une source d'alimentation c.a.

4. État de la pompe

● = Alarme d'avertissement

● = Alarme d'avis ou de mise en garde


● = En veille ou en cours d'alimentation

Réglage de la pompe

1. Appuyer sur le bouton de **Mise sous tension**.



2. Charger une tubulure (insérer dans le bas et enclencher).

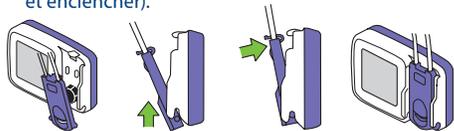

3. Sélectionner **Prime** (Armorcer).



Apprêter la pompe

1. Sélectionner le mode d'amorçage.



Si vous avez sélectionné **Auto Prime** (Amorçage auto) :

2. Attendre que la pompe ait terminé l'amorçage.



Si vous avez sélectionné **Hold to Prime** (Maintenir pour amorcer l'alim.) :

2. Appuyer sur le bouton Prime Feed (Amorcer alim.) et le tenir enfoncé jusqu'à ce que le liquide ait atteint l'extrémité du tuyau.



Commencer un processus d'alimentation

1. Sélectionner **Clear Settings** (Effacer réglages).



2. Utiliser les boutons + et - pour indiquer un taux puis sélectionner **OK**.



3. Une fois prêt à lancer l'alimentation, sélectionner **Start** (lancer).



4. Pour suspendre l'alimentation, sélectionner **Pause**.




5. Pour reprendre l'alimentation, sélectionner **Continue** (Continuer).




Couper l'alimentation de la pompe

1. Appuyer sur le bouton de **Mise sous tension** et le tenir enfoncé pendant 3 secondes.

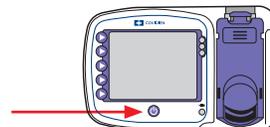

Vérifier que le niveau de liquide est approprié

Assurez-vous que le haut de la colonne de liquide se trouve à 25,4 cm (10 po) au-dessus de la pompe.

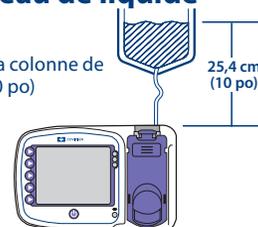

Pour obtenir des renseignements ou des opérations supplémentaires, consulter le manuel de fonctionnement de la pompe d'alimentation entérale Kangaroo™ Connect avec centre de communication sans fil.



Suivre les consignes d'utilisation. Symbole apparaissant en bleu sur l'appareil.

IFU No. HP106729

COVIDIEN, COVIDIEN with logo and Covidien logo are U.S. and internationally registered trademarks of Covidien AG. Other brands are trademarks of a Covidien company.

© 2013 Covidien.

Covidien LLC, 15 Hampshire Street, Mansfield, MA 02048 USA.

ECIREP Covidien Ireland Limited, IDA Business & Technology Park, Tullamore.

www.covidien.com

REV 02/2014