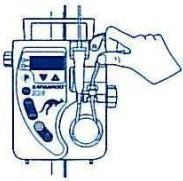
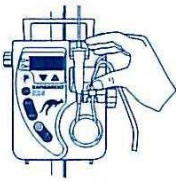
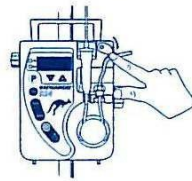



Fonctions supplémentaires

- Pour des fonctions ou des informations supplémentaires, consulter le manuel d'utilisation de la pompe pour alimentation entérale KANGAROO™ 924.
- Voir les conditions d'erreur au verso.


Démarrer l'administration

-  Mettre sous tension
-  Installer la chambre compte-gouttes et amorcer la tubulure
-  Acheminer la tubulure
-  Insérer OPTIX™
-  Verrouiller la tubulure

Programmer en mode continu

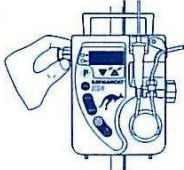-  Régler la vitesse d'alimentation

Programmer en mode VTBD (volume à administrer – en option)

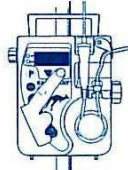-  Appuyer sur VTBD
-  Régler VTBD

Commencer l'administration

-  Appuyer sur P

Interrompre l'administration

-  Appuyer sur P

™ Trademark of Tyco Healthcare Group LP or its affiliate.

Patents Pending

TYCO HEALTHCARE GROUP LP • MANSFIELD, MA 02048 • © 2007 TYCO HEALTHCARE GROUP LP
ALL RIGHTS RESERVED • 070216 • PRODUCT INFORMATION IN U.S. 1-800-962-9888 • www.tycohealthcare.com

EC REP TYCO HEALTHCARE U.K. LTD. • GOSPORT PO13 0AS, U.K.



182498

2

Fonctions**Totalisateur de volume**

Afficher totalisateur




Effacer totalisateur

Effacer VTBD

Appuyer sur le bouton VTBD et le maintenir 5 secondes



Le voyant Effacer volume clignote 3 fois pour confirmer l'effacement

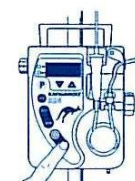

Mettre hors tension

Conditions d'erreurTubulure manquante/
incorrectement chargée

Occlusion ou poche vide



Batterie faible

Pompe interrompue depuis
plus de 5 minutes

Erreur système



VTBD administré



Erreur lumière ambiante

DÉPANNAGE

- no tube : Charger une tubulure d'alimentation Kangaroo™ 924 dans la pompe.
Err dot : Éliminer coudures et blocages de la tubulure d'alimentation.
bAt deCH : Brancher sur une prise secteur.
Err P : Appuyer sur le bouton P.
Err SYS : Consulter le manuel d'utilisation.
Vtbd dEL : Mettre la pompe hors tension ou démarrer une nouvelle alimentation.
n'o' t'u'b'E' : Maintenir la pompe à l'écart de la lumière vive.