


Guide rapide d'utilisation KANGAROO* JOEY COVIDIEN

Pour alimentation entérale
seulement

Utiliser uniquement des tubulures
KANGAROO*
JOEY

MENU GENERAL



Utiliser les boutons  situés sur
la gauche de l'écran pour
programmer la pompe (de bas en
haut)

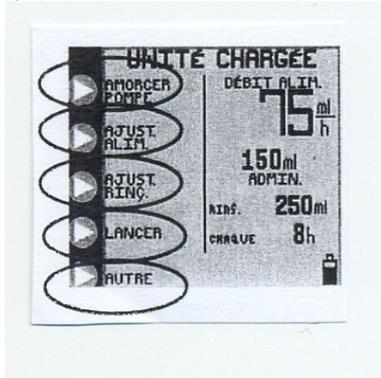


AMORÇAGE POMPE




AJUSTER ALIMENTATION

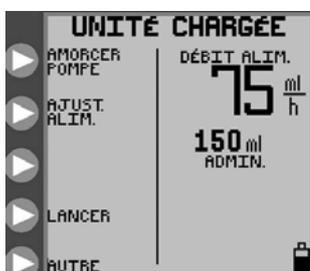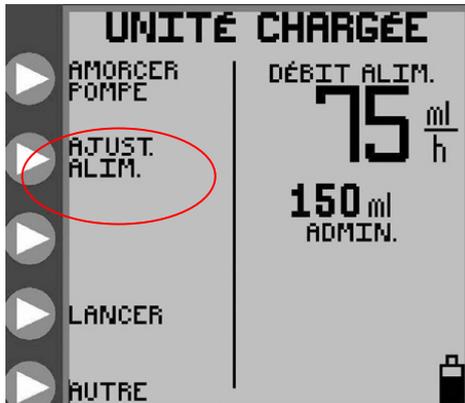


Ouvrir la porte bleue et charger la tubulure selon le schéma

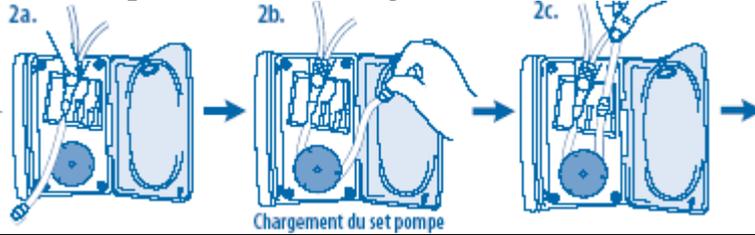

Appuyer sur la touche Marche  en bas à droite pour démarrer

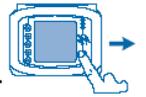

La pompe propose d'effacer ou de conserver les paramètres, selon qu'il s'agit du même patient ou bien que l'on souhaite modifier les paramètres

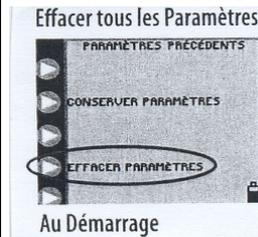

Percuter la poche d'alimentation puis installer la tubulure sur la pompe

 1^{er} BOUTON EN HAUT A GAUCHE

Amorçer pompe = PURGE de la tubulure . Valider.

Amorçage auto pour la purge automatique de la tubulure, valider.

Si besoin utiliser le 4^{ème}  « Maintenir pour amorcer alimentation » pour finir la purge.

Appuyer sur le 5^{ème}  Terminé pour revenir sur le menu précédent



 2^{ème} BOUTON A GAUCHE

Ajuster l'alimentation : valider


Débit : valider. Régler en appuyant avec les boutons . Unités, dizaines, centaines...et valider

Volume : valider. Régler le volume d'alimentation avec les boutons . Unités, dizaines, centaines, milliers ...et valider

NOTE : La saisie du volume n'est pas obligatoire pour faire fonctionner la pompe

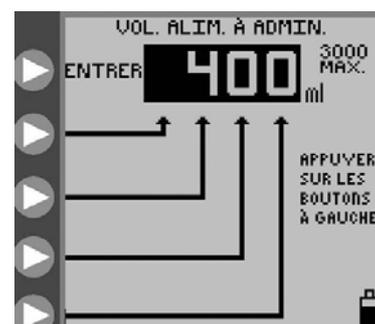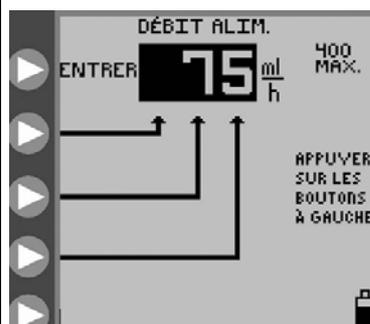


Pour démarrage la pompe, appuyer sur le 4^{ème} bouton  lancer.

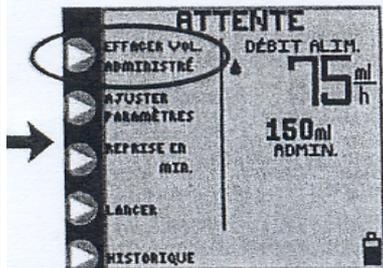

POUR EFFACER les volumes

Pour arrêter la pompe

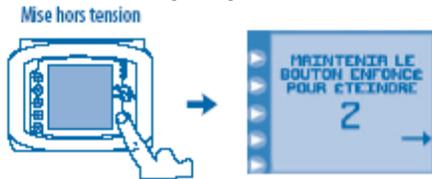

AUTRES

POUR CHANGER UN PARAMÈTRE :

Mettre la pompe sur attente et appuyer sur « ajuster paramètres »

POUR FAIRE UNE PAUSE :

Mettre la pompe sur attente, appuyer sur lancer pour redémarrer. La pompe peut rester jusqu'à 10 minutes en mode attente.

POUR EFFACER les volumes, si changement de poche par exemple : La pompe doit être en marche, lancée, pour accéder à cette touche.

Appuyer sur attente, puis sur effacer les volumes bouton en haut à gauche et relancer

KTO = pause avec départ différé pouvant aller jusqu'à 4 heures. Si besoin d'annuler KTO appuyer sur lancer.

Pour arrêter la pompe, appuyer sur le bouton de droite pendant 3 secondes

ALARMES :

Supprimer le motif de l'alarme

Appuyer sur LANCER pour redémarrer.

Conditions d'information en cas d'erreur



Pompe en mode ATTENTE pendant 10 minutes



Occlusion



Occlusion de poche d'alimentation vide



Occlusion de poche de rinçage vide



Set pompe utilisé > 24 heures



Chargement de set pompe incorrect



Batterie faible



Chargement incorrect de la tubulure du set pompe sur le rotor ou dysfonctionnement du rotor



Erreur générale, voir Manuel