

Pompe de nutrition entérale Joey Kangaroo™

Mode nutrition seul

■ Procédure de chargement de la tubulure



1. Repérer le bouton de démarrage / arrêt au bas de l'angle droit du panneau de contrôle. Appuyer pour mettre en marche.



2. Confirmer si vous voulez GARDER ou EFFACER les paramètres déjà enregistrés dans la pompe.



3. Avec l'écran de la pompe en face de vous, ouvrir la porte bleue située sur le dessus de la pompe.



4. Tenir la valve anti-débit libre par la tablette et insérer la valve sur la tige à gauche.



5. Tenir la bague noire, et étendre doucement le tube de silicone pour l'enrouler autour du rotor dans le sens antihoraire. Tracter la bague noire pour la placer dans l'emplacement à droite.



6. Fermer la porte bleue. Vous devez lire sur l'écran, tubulure chargée.

Arrêt de la pompe Repérer le bouton de démarrage / arrêt au bas de l'angle droit du panneau de contrôle. Appuyer et tenir le bouton pendant le décompte, jusqu'à ce que l'écran affiche zéro.

■ Information code erreur



ERREUR ATTENTE

Pompe gardée en attente pendant plus de 10 minutes. Appuyer sur CONTINUER puis sur LANCER pour démarrer l'administration ou arrêter la pompe.



ERREUR ROTOR

Problème provenant du rotor et du silicone enroulé sur le rotor. S'assurer que le silicone est correctement mis en place sur le rotor.



ERREUR DÉBIT

Obstruction sur la ligne aval de la pompe. Vérifier si la tubulure n'est pas coudée ou bloquée jusqu'au malade et rectifier.



ERREUR ALIMENTATION

La poche de nutriment est vide ou présence d'une obstruction sur la ligne en amont de la pompe, valve mal positionnée. Vérifier si la tubulure n'est pas coudée ou bloquée jusqu'à la pompe ou changer la poche de nutriment ou, bien enclencher la valve.



NUTRITION DÉLIVRÉE

La dose de nutrition a été administrée. Arrêt de la pompe.



TUBULURE DÉLOGÉE

La bague noire (MISTIC) n'est pas correctement mise en place dans son logement. S'assurer que la tubulure est correctement chargée.



BATTERIE FAIBLE

La batterie doit être rechargée immédiatement. Connecter le cordon secteur à la prise secteur.



ERREUR SYSTÈME

Erreur générale - voir le manuel pompe. Envoyer la pompe au SAV.


■ Purge et programmation de la pompe



1. Appuyer sur AMORCER puis sur Amorçage automatique pour purger automatiquement ou TENIR appuyé le bouton de purge manuelle pour purger la tubulure. Appuyer sur TERMINÉ quand la tubulure est purgée.



2. Appuyer sur AJUSTER ALIMENTATION puis sur DÉBIT pour régler le débit horaire.

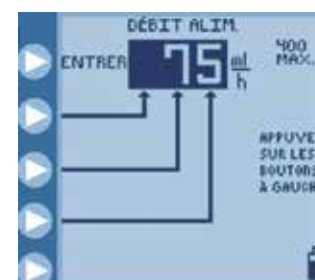

3. Appuyer sur les boutons de gauche pour programmer le débit horaire (unités, dizaines, centaines). Appuyer sur ENTRER pour confirmer.



4. Appuyer sur VOLUME à administrer pour programmer la dose à délivrer si besoin.




5. Appuyer sur les boutons de gauche pour programmer la dose d'alimentation à délivrer (unités, dizaines, centaines, milliers). Appuyer sur ENTRER pour confirmer.



6. Appuyer sur TERMINÉ pour retourner à l'écran principal et appuyer alors sur LANCER pour commencer l'administration.

7. Pour administrer avec la plus grande précision, le niveau haut du nutriment dans la poche en début de cycle doit se situer à une hauteur de 15 cm au dessus du haut de la pompe.

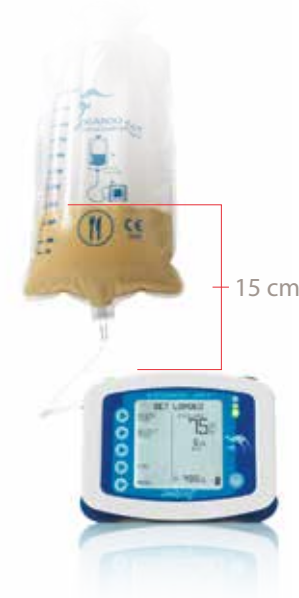

Pour plus d'information, merci de consulter le manuel d'utilisation et de maintenance de la pompe de nutrition entérale JOEY Kangaroo™

A DESTINATION DES MÉDECINS, DIÉTÉTICIENS, CADRES DE SANTÉ ET INFIRMIÈRES

La pompe Kangaroo™ Joey est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Cardinal Health Inc, CE N°0123. Kangaroo™ Joey est conçue pour administrer aux patients une alimentation par voie entérale en continu ou intermittente. Ce dispositif est doté d'une fonction de rinçage lorsqu'elle est utilisée avec des tubulures d'alimentation et de rinçage pour pompes Kangaroo™ Joey.

IMPORTANT : veuillez-vous reporter à la notice des produits pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables à son bon usage.

© Cardinal Health France. Novembre 2018. Tous droits réservés. Crédit photos Cardinal Health. Imprimé en France par Astuces. Réalisation Verdana.

CardinalHealth
Essential to care™

Cardinal Health France 506 SAS
Nextdoor Issy 1
43 rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux
RCS Nanterre 812 365 609