



B. Braun Space



Ce document n'est pas la notice d'utilisation, mais une aide à l'utilisation simplifiée.

Avant la mise en service du Perfusor®Space, toute personne utilisant cet appareil doit consulter la notice d'utilisation Perfusor®Space et accessoires.

1 – Allumer l'appareil :

- Sélectionner
- Allumage de l'appareil et vérification interne du système suivis de l'ouverture automatique du bras mécanisé

2 – Insérer une seringue :

- Tirer le verrou de seringue vers vous puis sur la droite
- Ouvrir le clavier et insérer la seringue comme ci-après
- Refermer le verrou de seringue en maintenant la seringue de la main gauche
- Refermer le clavier
- Le pousse-seringue reconnaît le modèle de seringue inséré*.
- Confirmer avec la touche
- Le bras du pousse-seringue se referme automatiquement



3 – Programmer un débit et démarrer la perfusion :

- Si la fonction purge est activée, sélectionner pour purger le prolongateur ou pour annuler. Sélectionner pour arrêter la purge. Sélectionner ou pour continuer
- Le débit est affiché à l'écran, dans le menu principal
- Sélectionner pour programmer un débit
- Sélectionner et pour le réglage des valeurs et et pour passer d'un digit à l'autre
- Démarrer la perfusion avec ou effacer la valeur de débit avec

4 – Délivrer un bolus :

- Sélectionner sur le clavier
- Sélectionner pour délivrer un bolus manuel à la valeur du débit bolus programmée.
(Voir menu Option pour modifier le débit Bolus si nécessaire)

5 – Remplacer la seringue :

- Sélectionner la touche pour arrêter la perfusion
- Tirer le verrou de seringue vers vous puis sur la droite
- Confirmer le message à l'écran avec la touche . Ouverture automatique du bras
- Ouvrir le clavier et remplacer la seringue

6 – Éteindre l'appareil :

- Après avoir retiré la seringue (Voir point 5), refermer le verrou puis le clavier
- Sélectionner pendant 3 secondes

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Pousse-seringue Perfusor®Space

*Si ce n'est pas le bon modèle de seringue, assurez-vous que la seringue est bien insérée et utiliser les flèches hautes et basses pour sélectionner le modèle présent dans la liste affichée à l'écran