

PROGRAMMATION DE LA POMPE CADD LEGACY PCA



- Mise sous tension ou Hors tension :

✓ Touche ACTIVEE-INACTIVEE



- Autotest lorsque la pompe est activée
- MAINTENIR 3 SEC la touche pour inactivée la pompe (3 pointillés consécutifs)

PROGRAMMATION DE LA POMPE A L'ARRET

- Déverrouillage et verrouillage de la pompe :



- Après le déverrouillage, le message ARRET apparait sur l'écran

- Appuyer sur SUIVANT  pour programmer la pompe


✓ Volume résiduel :ml

✓ Unités : ml/mg/µg

✓ Concentration :

✓ Débit continu :

✓ Dose sur demande :

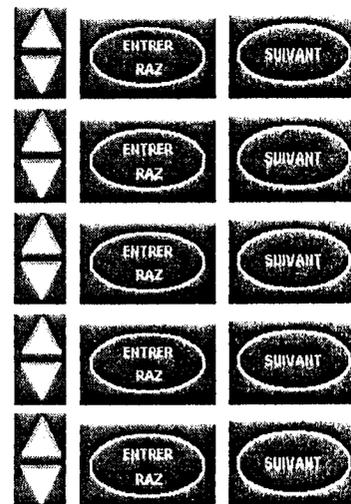


✓ Verr dose période

Réfractaire :

✓ Dose en min :

✓ Dose reçues :

✓ Tentatives de bolus :

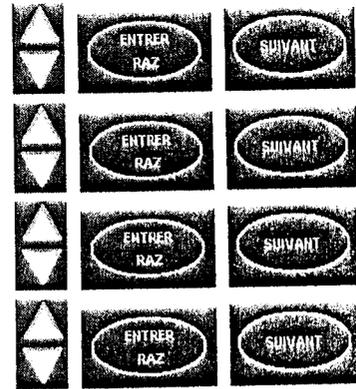

- Effectuer la PURGE :

✓ Appuyer sur PURGE  jusqu'à l'apparition de 3 tirets puis relacher

✓ Appuyer sur PURGE  sans relacher jusqu'à la fin de la purge

- MISE EN ROUTE de la perfusion :

✓ Appuyer sur ARRET-MARCHE  jusqu'à l'apparition de 3 tirets : défilement du programme à l'écran.

✓ Le message MARCHE apparaît à l'écran ainsi que le volume résiduel