




Fiche d'instructions de base **BodyGuard 323**

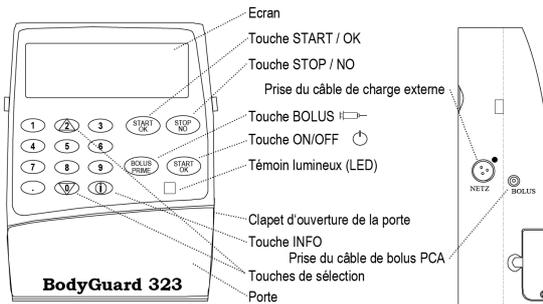


TPN-NPT

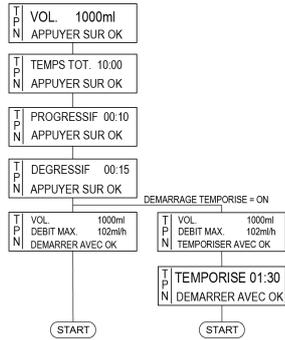


CONTINU

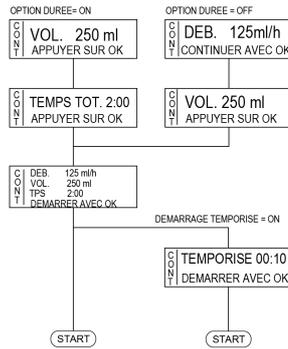


25 DOSES

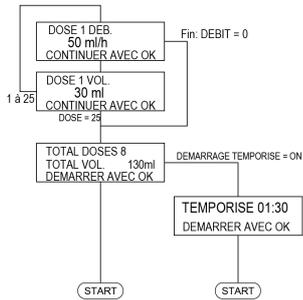


INTERMITTENT

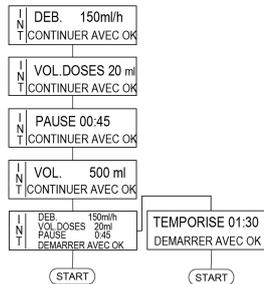

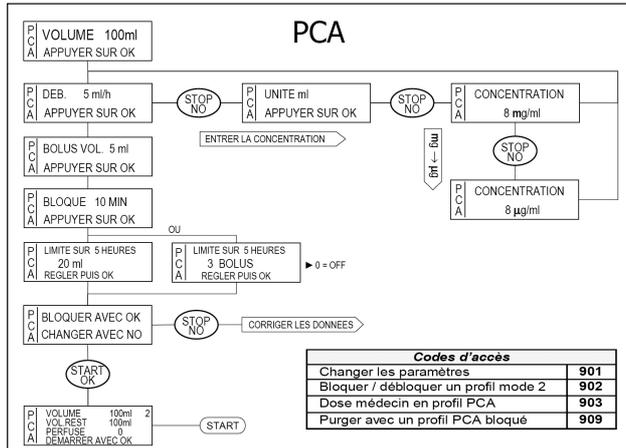

Accès au menu de Configuration

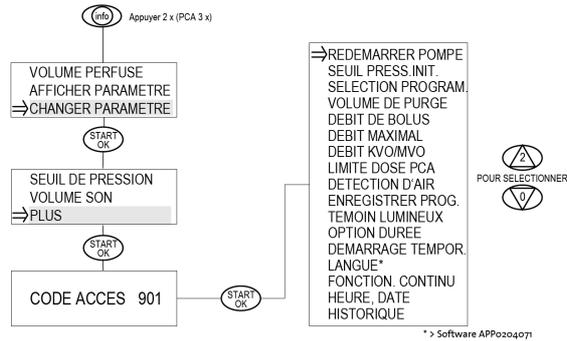

Mettre en place un set de perfusion

1. Ouvrir la porte de la pompe en tirant le clapet d'ouverture.
2. Sortir le set de son emballage stérile.
3. Fermer le clamp de sécurité.
4. Retirer les embouts de protection.
5. Installer le set dans le corps de pompe, comme indiqué sur le schéma ci-dessous, puis fermer la porte.

