



Pompe volumétrique BODYGUARD 323



Utilisation en MODE CONTINU

Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.
Pour toute information relative au fonctionnement de la pompe, se conformer au manuel d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323**.



UTILISATIONS POSSIBLES

La **BodyGuard 323** est une pompe à perfusion monovoie utilisable aussi bien en poste fixe qu'en ambulatoire. Cette pompe peut être utilisée pour des thérapies intraveineuses, sous-cutanées, péridurales et spinales

Les profils suivants peuvent être utilisés pour les thérapies correspondantes :

- CONTINU :** Profil permettant la perfusion d'une solution en débit continu.
- TPN-NPT :** Profil permettant la perfusion de solutions de nutrition parentérale en trois phases : progressive, stable et dégressive.
- 25-DOSES :** Profil permettant la perfusion jusqu'à 25 débits continus différents.
- INTERMITTENT :** Profil permettant de perfuser différentes doses d'une même solution. Entre les pauses, le garde veine (KVO) est perfusé.
- PCA :** Profil permettant la perfusion d'une solution en débit continu. Il est possible pour le patient de s'administrer des bolus entre les périodes réfractaires si la dose limite n'est pas atteinte.

CHOISIR LE PROGRAMME CONTINU



-Allumer la pompe



AUTO TEST

-Pour accéder aux programmes:

→Appuyer sur «STOP NO» de manière continu dès la fin de L'AUTO TEST



INTERMITTENT
PCA
25 DOSES
⇒CONTINU

- Sélectionner le nouveau profil désiré

→Appuyer sur «START OK»



C
O
N
T | CONTINU 
PROGRAMME
CHANGER AVEC NO



PROGRAMMATION EN MODE CONTINU

Si l'option **durée** est sur **ON**, la programmation du profil continu s'effectue dans le **temps** et le **volume**, la pompe calcule alors le débit.

Si l'option **durée** est sur **OFF**, la programmation s'effectue par le **débit** et le **volume**, la pompe calcule alors le temps de perfusion

Appuyer 2x sur la touche «info»

info

- Chercher «CHANGER PARAMETRES»

→ Appuyer sur «START OK»

- Chercher «PLUS»

→ Appuyer sur «OK»

- Entrer le code 901

- Sélectionner «OPTION DUREE» dans le menu déroulant

- A l'aide des flèches, passez de «ON» à «OFF »

→ Appuyer sur «START OK» « REDEMARRER

POMPE »

VOLUME PERFUSE
AFFICHER PARAMETRE
⇒CHANGER PARAMETRE

START
OK

VOLUME SON
⇒PLUS..
CHANGER PARAMETRE

START
OK

CODE ACCES:
901

START
OK

DEBIT MAXIMAL
⇒OPTION DUREE
DOSE LIMITE PCA

START
OK

OPTION DUREE
ON
SELECTION ↑↓ PUIS OK

START
OK

PROGRAMMATION EN MODE CONTINU PAR LE DEBIT




- Entrer le débit souhaité
- Appuyer sur «START OK»



- Entrer le volume souhaité en ml
- Appuyer sur «START OK»




- Ecran récapitulatif du protocole:

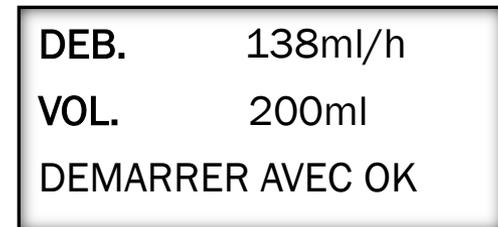




PROGRAMMATION EN MODE CONTINU PAR LA DUREE

- Entrer le volume souhaité en ml
- Appuyer sur «START OK»

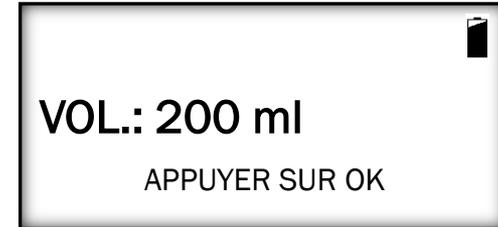

- Entrer le temps souhaité en Heure & Minute
- Appuyer sur «START OK»

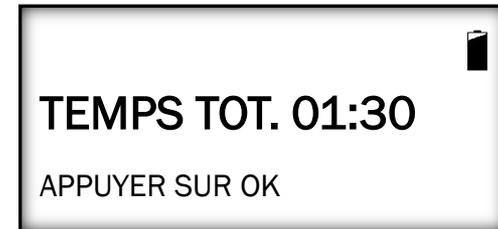

- Ecran récapitulatif du protocole:





PURGER LA TUBULURE

Après avoir programmé la pompe et avant de démarrer la perfusion, déconnecter patient pour purger



-Appuyer sur «PRIME BOLUS»

→Appuyer sur «START OK»



-La purge s'effectue en fonction du volume paramétré

- Pour interrompre la purge si la tubulure est correctement purgée

→ Appuyer sur «STOP NO» sinon attendez la fin du processus de purge

A l'écran d'affichage du profil enregistré,

→ Connecter le patient Appuyer sur «START OK»

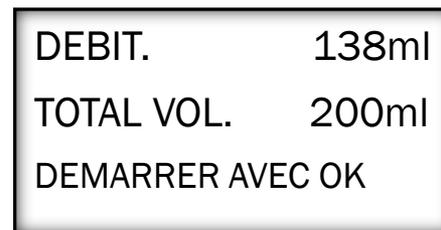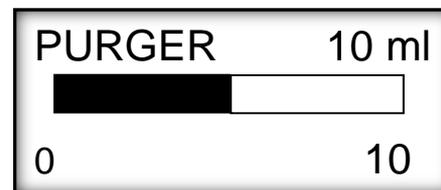

RENOUVELLER POCHE EN PROGRAMME CONTINU



-Quand, vous arrêtez la pompe avant que la totalité de la poche à perfuser ne soit terminée, en rallumant la pompe, vous aurez l'information suivante qui s'affichera:

→Appuyer sur «STOP NO»

-Valider le volume pré-saisie

→Appuyer sur «START OK»

-Valider le temps (ou débit) pré-saisie

→ Appuyer sur «START OK»

- Ecran récapitulatif du protocole:

 OPERATION IDENTIQUE POUR PROGRAMMATION
PAR LE DEBIT OU PAR LA DUREE

POURSUIVRE AVEC OK
REPETER AVEC NO

STOP
NO

VOL.: 200 ml
APPUYER SUR OK

START
OK

TEMPS TOT. 01:30
APPUYER SUR OK

START
OK

DEB. 138ml/h
VOL. 200ml
TPS: 1:30
DEMARRER AVEC OK

START
OK

FONCTION KVO / MVO



MAINTIEN DE VEINE OUVERTE EN FIN DE PERFUSION (valable pour chaque profil sauf en mode PCA) Programmation du débit et activation/désactivation du KVO en fin de perfusion

- Appuyer 2x sur la touche «info»
 - Aller sur «CHANGER PARAMÈTRE»
 - Appuyer sur «START OK»
 - Aller sur «PLUS»
 - Appuyer sur «START OK»
 - Entrer le code 901,
 - Appuyer sur «START OK»
 - Chercher «DEBIT KVO/MVO»
 - Appuyer sur «START OK»
 - Entrer le débit souhaité, valider par «START OK»
 - Sélectionner ON (ou OFF) pour activer (on non) l'option
- KVO en fin de perfusion**

info

VOLUME PERFUSE
AFFICHER PARAMETRE
⇒CHANGER PARAMETRE

START
OK

VOLUME SON
⇒PLUS..
CHANGER PARAMETRE

START
OK

CODE ACCES
901

START
OK

DEBIT MAXIMAL
⇒DEBIT KVO / MVO
DOSE LIMITE PCA

START
OK

FIN DE PROGRAMME KVO
ON
SELECTION ↑↓ PUIS OK

START
OK



Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.

Pour toutes informations relatives au fonctionnement de la pompe, se conformer au manuel d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323**.

