



Pompe volumétrique BODYGUARD 323



Utilisation en MODE PCA

Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.
Pour toutes informations relatives au fonctionnement de la pompe, se conformer au guide d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323** et à la sécurité.



Pour vérifier que la limite de bolus soit conforme:

- Appuyer sur « info »  jusqu'à l'écran suivant:

- Aller sur «CHANGER PARAMÈTRE»
→Appuyer sur «START OK»

VOLUME PERFUSE
AFFICHER PARAMETRE
⇒CHANGER PARAMETRE

START
OK

- Aller sur «PLUS»
→Appuyer sur «START OK»

VOLUME SON
⇒PLUS..
CHANGER PARAMETRE

START
OK

- Entrer le code 901,
→Appuyer sur «START OK»

CODE ACCES
901

START
OK

- Sélectionner le paramètre souhaité

DEBIT MAXIMAL
DEBIT KVO/MVO
⇒DOSE LIMITE PCA

START
OK



Sur les pompes BodyGuard 323 il est possible de limiter les bolus en nombre ou en dose (mg) sur un temps souhaité (\neq période réfractaire).

➤ Il n'y a pas de recommandation particulière, propre à chaque prescription.

- Valider « DOSE LIMITE PCA » puis avec les flèches choisir de travailler en « NOMBRE » ou en « DOSE » de Bolus.

→Appuyer sur «START OK»

- Indiquer le temps total sur lequel sera limité le Nombre ou Dose de Bolus délivré (0h à 24h).

→Appuyer sur «START OK»

DEBIT MAXIMAL
DEBIT KVO/MVO
⇒DOSE LIMITE PCA

START
OK

DOSE LIMITE PCA
NOMBRE BOLUS
SELECTION ↑↓ PUIS OK

START
OK

DOSE LIMITE PCA
24 HEURES
REGLER PUIS OK

START
OK



PURGER LA TUBULURE AVANT MODE BLOCAGE POMPE

-Appuyer sur «PRIME BOLUS»

→Appuyer sur «START OK»

-La purge s'effectue en fonction du volume paramétré

- Pour interrompre la purge si la tubulure est correctement purgée

→ Appuyer sur «STOP NO» sinon attendez la fin du processus de purge

A l'écran d'affichage du profil enregistré,

→ Connecter le patient Appuyer sur «START OK»

PRIME BOLUS

PURGER
 Déconnecter patient
 Démarrer avec OK

START OK

PURGER 10 ml

 0 10

STOP NO

DEBIT. 138ml
 TOTAL VOL. 200ml
 DEMARRER AVEC OK

START OK



PURGER LA TUBULURE EN MODE BLOCAGE



Une fois que vous avez validé la programmation de votre protocole, la pompe va automatiquement bloquer la programmation. Dans ce cas, pour purger il sera nécessaire de saisir un code.

| | | |
|---|-----------|--------|
| P | VOLUME | 100 ml |
| C | VOL. REST | 100 ml |
| A | PERFUSE | 0 |

PRIME
BOLUS

CODE ACCES 909

START
OK

PURGER
Démarrer avec OK

START
OK

| | | |
|---------------|------|----|
| PURGER | 2 ml | 2 |
| | | |
| 0 | | 10 |


La purge doit être demandée lorsque cet écran apparaît en fin de programmation du protocole et avant le démarrage du traitement de PCA.

Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.

Pour toutes informations relatives au fonctionnement de la pompe, se conformer au guide d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323** et à la sécurité




DELIVRANCE D'UN BOLUS MEDECIN

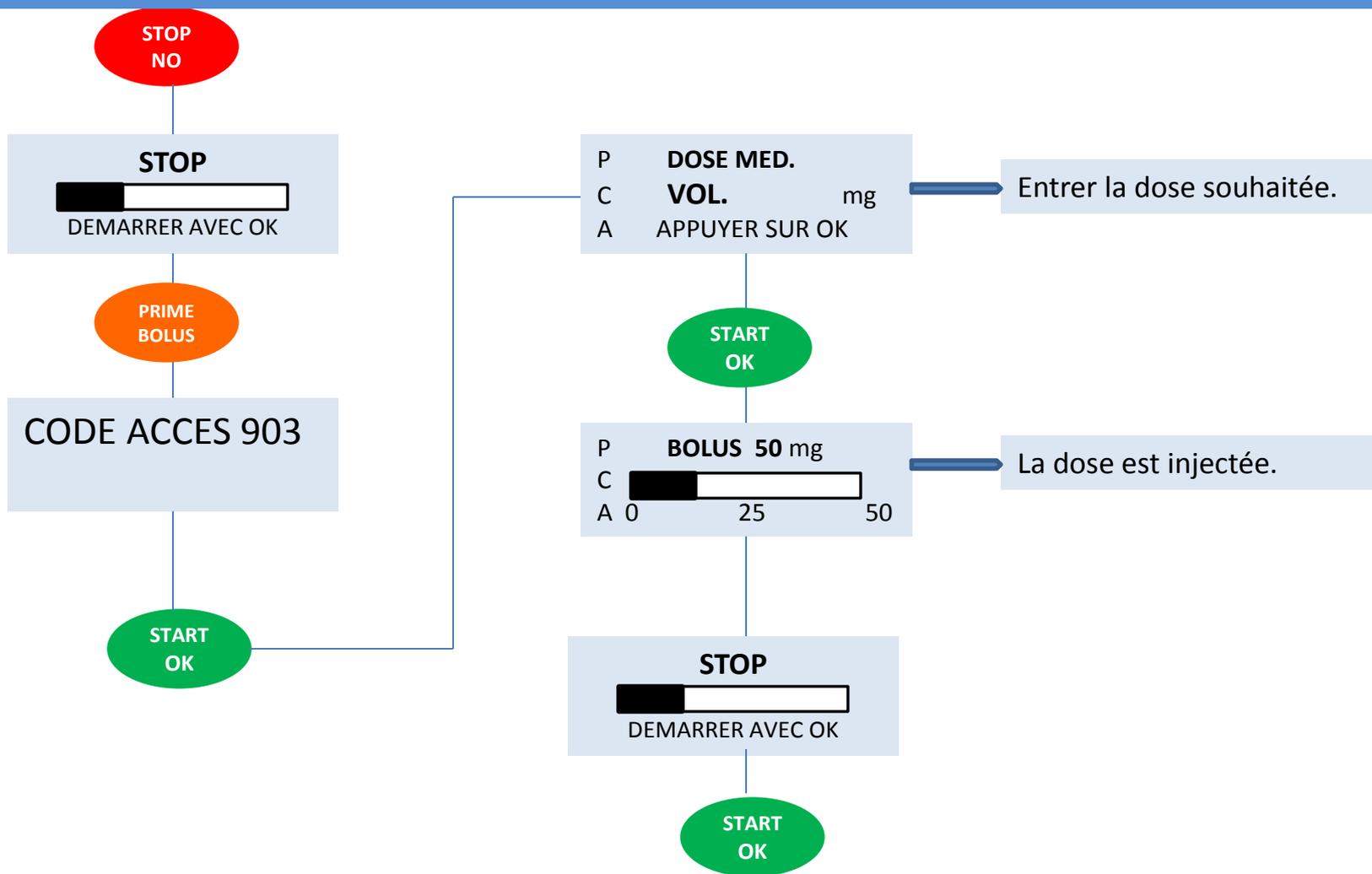



MODIFIER LE PROTOCOLE EN COURS

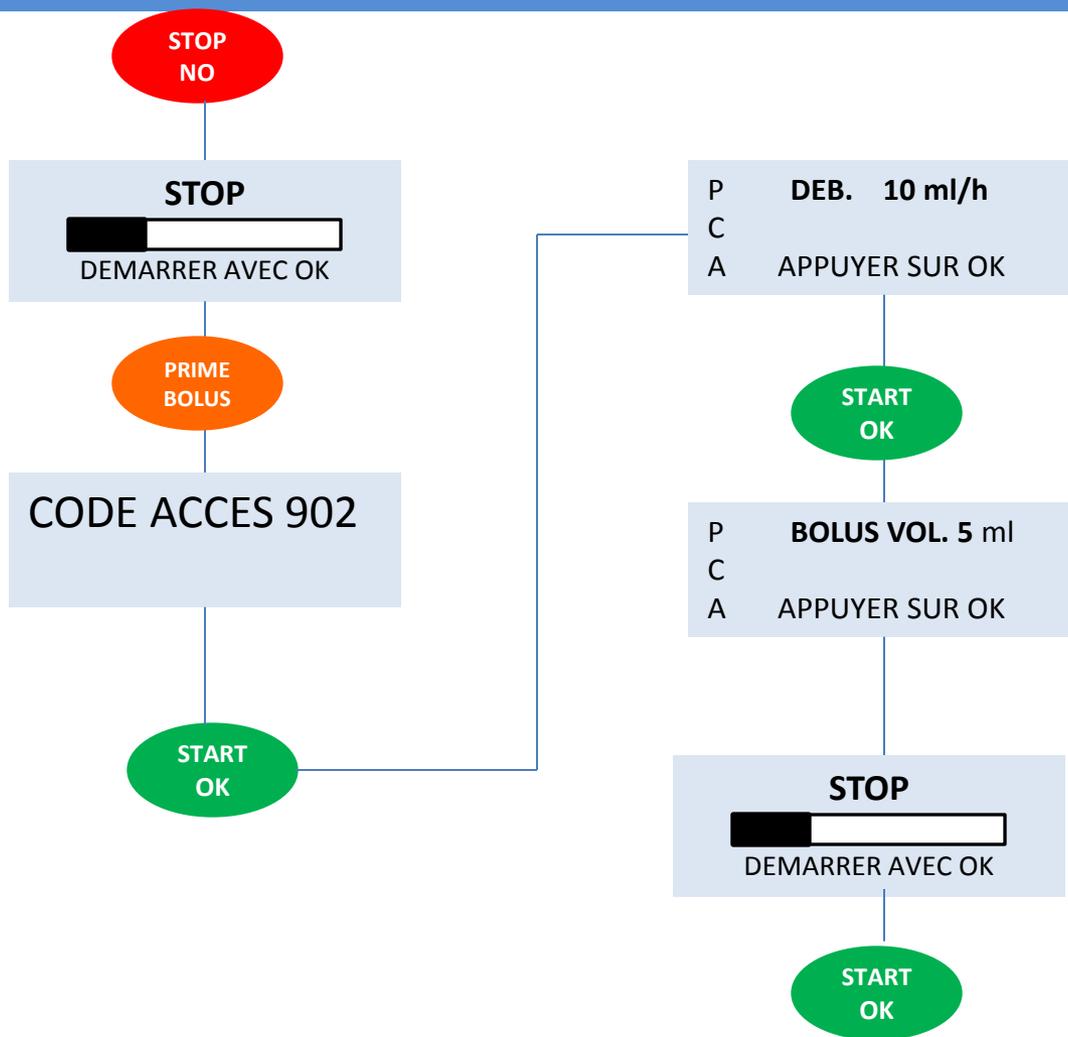

Corriger les données souhaitées selon l'ordre d'affichage à l'écran.

START OK

Pour passer à la correction de la donnée suivante si nécessaire.



DEBLOQUER LE PROFIL PCA



VOLUME PERFUSE
AFFICHER PARAMETRE
← CHANGER PARAMETRE

START
OK

SEUIL DE PRESSION
VOLUME SON
➔ PLUS

START
OK

CODE ACCES 902

START
OK

BLOQUE
OFF

START
OK

P VOLUME ml
C
A APPUYER SUR OK



Pour sélectionner ON/OFF



Attention : débloquer la pompe réinitialise le compteur des Bolus.



CODES D'ACCES

| | |
|--|------------|
| Changer les réglages de la pompe | 901 |
| Bloquer/débloquer un profil en mode 2 | 902 |
| Délivrance d'une dose médecin | 903 |
| Purger avec un profil PCA bloqué | 909 |

Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.
Pour toutes informations relatives au fonctionnement de la pompe, se conformer au guide d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323** et à la sécurité



AFFICHAGE D'INFORMATIONS PENDANT LA PERFUSION

CAPACITE BATTERIE

VIDE PLEINE

Appuyer 1 fois

| | | |
|---|----------------------|--------|
| P | VOL. BOLUS | 2 ml |
| C | BLOQUE | 10 MIN |
| A | LIMITE SUR 4H | 4.0 ml |

Appuyer 2 fois

| | | |
|---|----------------------|------|
| P | BOL. DEMANDES | 4 |
| C | BOL. PERFUSES | 1 |
| A | BOL. MED | 0 |
| | DERN. MED. | 2 ml |

Appuyer 3 fois

PERFUSE

29 ml 200

Appuyer 4 fois

REST TPS

1:45

Appuyer 5 fois

HEURE 18:37

DATE 10.06.10

Appuyer 6 fois



Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.

Pour toutes informations relatives au fonctionnement de la pompe, se conformer au manuel d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323**.

