



Pompe volumétrique **BODYGUARD 323**



Utilisation en MODE TPN (Nutrition Parentérale)

Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.
Pour toute information relative au fonctionnement de la pompe, se conformer au manuel d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323**.

UTILISATIONS POSSIBLES



La **BodyGuard 323** est une pompe à perfusion monovoie utilisable aussi bien en poste fixe qu'en ambulatoire. Cette pompe peut être utilisée pour des thérapies intraveineuses, sous-cutanées, péridurales et spinales


Les profils suivants peuvent être utilisés pour les thérapies correspondantes :

- CONTINU :** Profil permettant la perfusion d'une solution en débit continu.
- TPN-NPT :** Profil permettant la perfusion de solutions de nutrition parentérale en trois phases : progressive, stable et dégressive.
- 25-DOSES :** Profil permettant la perfusion jusqu'à 25 débits continus différents.
- INTERMITTENT :** Profil permettant de perfuser différentes doses d'une même solution. Entre les pauses, le garde veine (KVO) est perfusé.
- PCA :** Profil permettant la perfusion d'une solution en débit continu. Il est possible pour le patient de s'administrer des bolus entre les périodes réfractaires si la dose limite n'est pas atteinte.

PROGRAMMATION EN MODE TPN




-Allumer la pompe

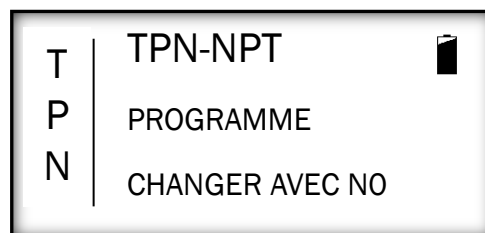


-Entrer le volume souhaité

→ Appuyer sur «START OK»

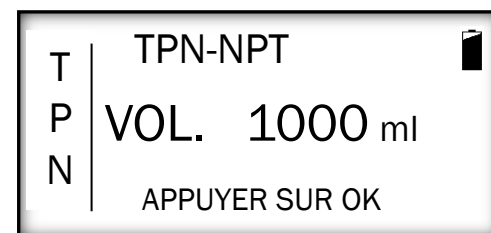

-Entrer la durée souhaitée en Heure : Minute

→ Appuyer sur «START OK»

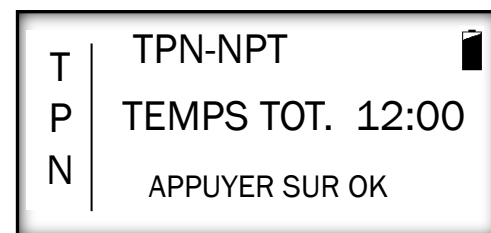


- Entrer la durée progressive en Heure : Minute

→ Appuyer sur «START OK»



-Entrer la durée dégressive en Heure : Minute

→ Appuyer sur «START OK»

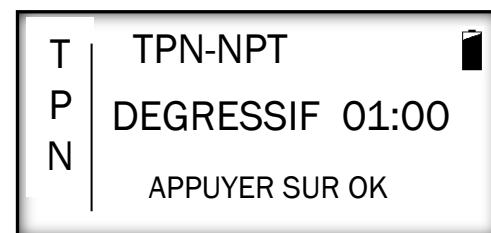



PURGER LA TUBULURE EN MODE TPN

Après avoir programmé la pompe et avant de démarrer la perfusion, déconnecter patient pour purger



-Appuyer sur «PRIME BOLUS»

→Appuyer sur «START OK»




-La purge s'effectue en fonction du volume paramétré

- Pour interrompre la purge si la tubulure est correctement purgée

→ Appuyer sur «STOP NO» sinon attendez la fin du processus de purge

A l'écran d'affichage du profil enregistré,


→ Connecter le patient Appuyer sur «START OK»

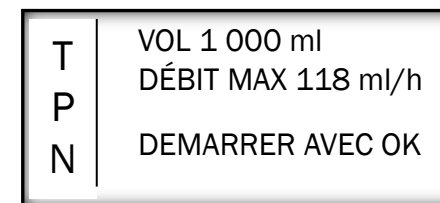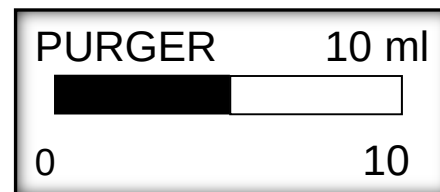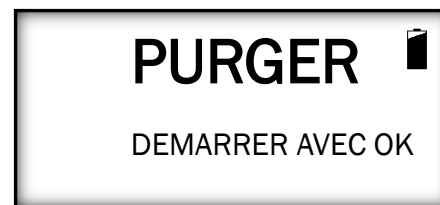




ARRETER & REDEMARRER LA POMPE


- En cours de perfusion la pompe indique le débit à l'écran et représente des gouttes qui tombent.

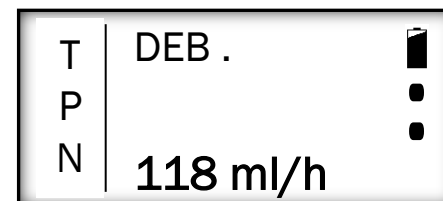


- Pour arrêter la pompe en cours de perfusion
→Appuyer sur «STOP NO»

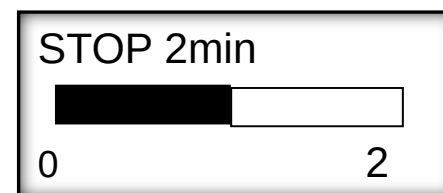

- Pour éteindre la pompe
→Appuyer sur «ON OFF» jusqu'au bip

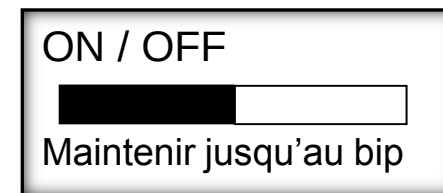

-Quand vous arrêtez la pompe avant que la totalité de la poche à perfuser ne soit terminée, en rallumant la pompe, vous aurez l'information suivante qui s'affichera:

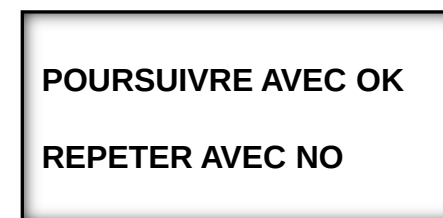

→Appuyer sur «STOP NO»

FONCTION KVO / MVO



MAINTIEN DE VEINE OUVERTE EN FIN DE PERFUSION (valable pour chaque profil sauf en mode PCA) Programmation du débit et activation/désactivation du KVO en fin de perfusion

- Appuyer 2x sur la touche «info»
- Aller sur «CHANGER PARAMÈTRE»
- Appuyer sur «START OK»
- Aller sur «PLUS»
- Appuyer sur «START OK»
- Entrer le code 901,
- Appuyer sur «START OK»
- Chercher «DEBIT KVO/MVO»
- Appuyer sur «START OK»
- Entrer le débit souhaité, valider par «START OK»
- Sélectionner ON (ou OFF) pour activer (on non) l'option KVO en fin de perfusion

info

VOLUME PERFUSE
AFFICHER PARAMETRE
⇒CHANGER PARAMETRE

START
OK

VOLUME SON
⇒PLUS..
CHANGER PARAMETRE

START
OK

CODE ACCES
901

START
OK

DEBIT MAXIMAL
⇒DEBIT KVO / MVO
DOSE LIMITE PCA

START
OK




FIN DE PROGRAMME KVO
ON
SELECTION ↑↓ PUIS OK

START
OK

CHOISIR UN PROTOCOLE



- Mettre la pompe en marche (si la pompe est allumée, l'éteindre dans un premier temps)
- L'écran affiche le profil précédemment utilisé
- Tout de suite, appuyer longuement sur «STOP NO»
- Sélectionner le nouveau profil désiré
- Appuyer sur «START OK»

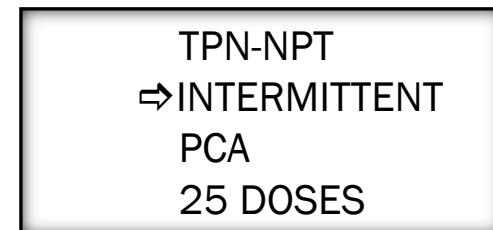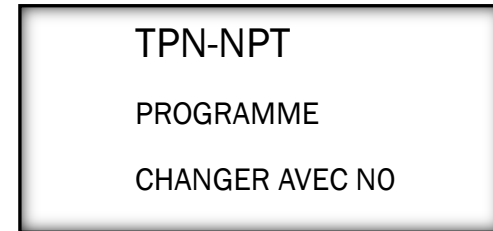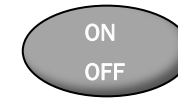



Ces fiches d'instruction ne peuvent être considérées comme une notice d'utilisation de la pompe BodyGuard 323.

Pour toutes informations relatives au fonctionnement de la pompe, se conformer au manuel d'utilisation de la pompe **BodyGuard 323**.

