



Pour vérifier que les paramètres soient conformes:

- Appuyer sur « info »  jusqu'à l'écran suivant:

- Aller sur «CHANGER PARAMÈTRE»
→ Appuyer sur «START OK»

VOLUME PERFUSE
AFFICHER PARAMETRE
⇒ CHANGER PARAMETRE

START
OK

- Aller sur «PLUS»
→ Appuyer sur «START OK»

VOLUME SON
⇒ PLUS..
CHANGER PARAMETRE

START
OK

- Entrer le code 901,
→ Appuyer sur «START OK»

CODE ACCES
901

START
OK

- Sélectionner le paramètre souhaité

DEBIT MAXIMAL
⇒ DEBIT KVO / MVO
DOSE LIMITE PCA

START
OK