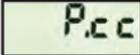
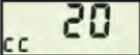
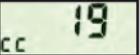
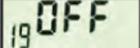
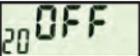
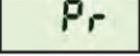
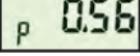
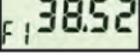
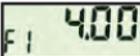
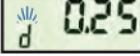
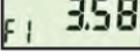


	TOUCHES	PROGRAMMATION DU VOLUME PARTIEL	ÉCRAN
POMPE SUR OFF	 / 	<ul style="list-style-type: none"> • Programmation du volume partiel • Diminution/augmentation volume partiel • Positionnement du pousseur au volume partiel • Pompe sur OFF 	     

	TOUCHES	MISE EN MARCHÉ/AMORÇAGE	ÉCRAN
POMPE SUR OFF	  (maintenir enfoncé)  	<ul style="list-style-type: none"> • Pompe sur OFF • Fonction <i>amorçage</i> • Distribution de la dose d'<i>amorçage</i> (1,5 ml max. totale) • Mise en marche de la pompe • Démarrage de la perfusion • Sélection des débits 	     

	TOUCHES	ADMINISTRATION DE LA DOSE BOLUS	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		<ul style="list-style-type: none"> • Pompe sur ON • Administration de la dose bolus • Pompe sur ON 	  

	TOUCHES	ARRÊT/STOP	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE	 	<ul style="list-style-type: none"> • Durée de la perfusion • Pompe sur StoP • Extinction du signal sonore et clignotement de l'écran 	