

## CRONO PAR III

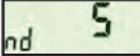
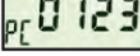
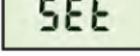
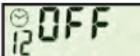
Pompe à perfusion ambulatoire  
pour le traitement de la  
maladie de Parkinson

### INSTRUCTIONS RAPIDES



**Touches temporisées** : l'action doit se prolonger pendant quelques secondes avant que la commande ne soit exécutée.

Le résumé des présentes instructions ne se substitue pas à la nécessité de lire les informations données dans le manuel et ne représente qu'une synthèse rapide des fonctions du dispositif.

	TOUCHES	SÉLECTION DE LA VERSION DE LA POMPE	ÉCRAN
POMPE SUR OFF	 (maintenir enfoncée)     / 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompe sur <b>OFF</b></li> <li>• Affichage du nombre de bolus administrés (après 2 secondes)</li> <li>• Affichage du nombre de perfusions (après 6 secondes)</li> <li>• Phase de sélection de la version de la pompe (après 10 secondes)</li> <li>• Accès à la phase de sélection de la version de la pompe</li> <li>• Sélection de la version de la pompe (<b>FrEE/Auto</b>)</li> <li>• Pompe sur <b>OFF</b></li> </ul>	     
POMPE SUR OFF	      	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pompe sur <b>OFF</b> et <b>L0</b></li> <li>• Programmation de l'heure</li> <li>• Programmation des minutes</li> <li>• Programmation de la dose bolus (de 0,00 à 2,00 ml)</li> <li>• Programmation de l'intervalle entre les doses bolus (de « <b>no,Lt</b> » à 24 heures)</li> </ul>	