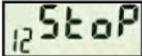
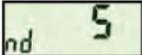
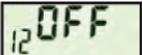
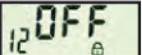
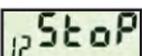
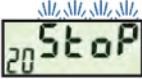
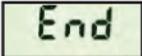


	TOUCHES	VERROUILLAGE DU CLAVIER	ÉCRAN
POMPE SUR OFF/StoP		<ul style="list-style-type: none"> • Pompe sur OFF ou sur StoP 	
	(5 sec)		
		<ul style="list-style-type: none"> • Affichage du nombre de bolus administrés 	
	(7 sec)		
	 appuyer sans relâcher 	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage du nombre de perfusions • Phase de sélection du niveau de verrouillage du clavier 	 
 / 	<ul style="list-style-type: none"> • Sélection de verrouillage/déverrouillage du clavier • Pompe sur OFF ou sur StoP 	   	

	TOUCHES	RETOUR ANTICIPÉ	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		<ul style="list-style-type: none"> • Pompe sur StoP 	
	 + 	<ul style="list-style-type: none"> • Pompe sur End 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Retour du pousseur 	
		<ul style="list-style-type: none"> • Pompe sur OFF 	