

	TOUCHES	ADMINISTRATION DE LA DOSE BOLUS	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		<ul style="list-style-type: none"> • Pompe sur ON • Administration de la dose bolus • Pompe sur ON 	

	TOUCHES	StoP	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE	 	<ul style="list-style-type: none"> • Pompe sur StoP • Extinction du signal sonore et clignotement de l'écran 	

	TOUCHES	VERROUILLAGE DU CLAVIER	ÉCRAN
POMPE SUR OFF/StoP	 appuyer sans relâcher 	<ul style="list-style-type: none"> • Pompe sur OFF ou sur StoP • Affichage du nombre de bolus administrés • Affichage du nombre de perfusions • Phase de sélection du niveau de verrouillage du clavier • Sélection de verrouillage/déverrouillage du clavier • Pompe sur OFF ou sur StoP 	

	TOUCHES	RETOUR ANTICIPÉ	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE	 +	<ul style="list-style-type: none"> • Pompe sur StoP • Pompe sur End • Retour du pousseur • Pompe sur OFF 	