

# MODE D'EMPLOI SIMPLIFIE DE LA PCA

## RYTHMIC Plus - MICREL



### Code Couleur / Tubulures

**PCEA** : Jaune

**PCA** : Blanche

### Programmation de la PCA

- Mettre l'appareil en marche en appuyant sur **ON**
- Saisir le code de programmation : **0111** - Valider :
- Saisir les différents paramètres avec les touches correspondantes à chaque décimale
- Valider à chaque fois :



La programmation « volume à perfuser » correspond au volume contenu dans la poche



### l'unité de perfusion peut-être changée en appuyant sur la touche UNITE

- Si Purge non réalisée lors de la préparation de la perfusion, à la fin de la programmation Purger la tubulure en gardant le doigt appuyé sur **PURGE** → **patient non connecté à la pompe**
- Pour débiter la perfusion : double clic sur **START**
  - Pour arrêter la perfusion : double clic sur **STOP**, la pompe est en **PAUSE**
  - Pour l'arrêt définitif : Appuyer sur **OFF**

Obligation de passer par **PAUSE** avant d'éteindre la pompe

### Changement de cassette

- Mettre la PCA en **PAUSE** : double clic sur **STOP**
- Éteindre la pompe : **OFF**
- Changer la poche
- Rallumer la pompe : **ON**
- Entrer le code changement de poche : **0011** - Valider :
- Rentrer le Volume à perfuser de la nouvelle poche - Valider :



**R/** Si nécessaire, vous pouvez effacer l'historique du volume déjà perfusé ainsi que des bolus en utilisant la touche **RAZ**

- Appuyer 2 fois sur **START** pour redémarrer la perfusion

### La valise comprend :

- La pompe à perfusion
- Un cordon d'alimentation
- Une « poire patient »
- Un mode d'emploi
- Une notice condensée avec 1 clé pour l'ouverture de la cassette

### Préparation de la perfusion :

- Préparer la solution médicamenteuse
- Remplir la poche ( maximum 160ml ) par le site de remplissage en vérifiant le verrouillage de la seringue
- Aspirer toutes les bulles d'air - Reboucher - Purger

### Installation de la poche de perfusion

- Ouvrir le capot de l'appareil à l'aide de la clé plastique, sur la tranche de la cassette
- Placer la poche de manière à installer le site de remplissage sur le logo clé
- Placer les ailettes de tubulure dans leurs encoches respectives - Refermer le couvercle sans forcer



**L'impossibilité de fermer est due au mauvais positionnement de la tubulure**

### Prescription de la PCA :

- **Concentration** de morphine : **mg / ml** ( ou  $\mu\text{g} - \text{ml}$  )
- **Débit de base** : **mg / h** ( ou  $\mu\text{g} - \text{ml}$  )
- **Bolus** : **mg** ( ou  $\mu\text{g} - \text{ml}$  )
- **Période réfractaire** en **minutes**
- **Dose limite** sur **4h** (ou autre)
- **Volume à perfuser** : **ml**

## LES ALARMES

### PETITE OCCLUSION

Le mode « reprise de la perfusion en levée d'occlusion » redémarre automatiquement la perfusion dès que l'occlusion est levée

### INCIDENTS



### OCCLUSION IMPORTANTE - PILE USAGEE

- Mettre la pompe en **PAUSE** :
- Éteindre la pompe : **OFF**
- Supprimer la cause de l'alarme :
  - Si Occlusion :- Vérifier l'installation de la tubulure
  - Si alarme Pile : Changer la pile
- Mettre la pompe en **Marche** : **ON**
- Saisir le code de redémarrage : **0000**
- Valider :
- Relancer la perfusion : double clic sur **START**



**Avec le Code de Redémarrage 0000, la pompe reprend sa perfusion au moment même de l'arrêt précédent.**