


1 Appui long pour Mettre sous Tension ou pour éteindre la pompe.

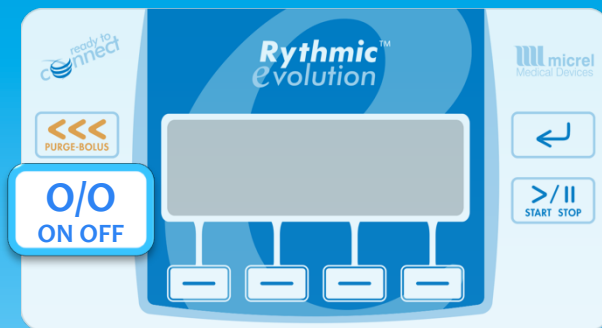

Pompes à perfusion Rythmic™ Evolution Mode Condensé

2 Un seul code pour tout faire :

0111

Taper le code & valider

Reprendre la perfusion après arrêt de la pompe

Programmer un nouveau patient

> **NOUVEAU PATIENT**
CHANGEMENT POCHE
REDEMARRAGE APRES OFF

Sélectionner avec ▼▲ puis valider

CONCENTRATION
00,1 mg/ml
UNITE

Vérifier l'unité de programmation
Presser UNITE pour la modifier selon prescription

Sélectionner les valeurs prescrites et confirmer

Faire défiler le protocole et modifier les valeurs selon prescription

Valider la programmation

Changer la poche

> **NOUVEAU PATIENT**
CHANGEMENT POCHE
REDEMARRAGE APRES OFF

Sélectionner avec ▼▲ puis valider

VOLUME A PERFUSER
0100 ml

Volume précédemment perfusé
Modifier et/ou valider

PERFUSE 95ml | DEMANDE 12
R.A.Z PERFUSE 10

Remettre A Zéro selon prescription

> **NOUVEAU PATIENT**
CHANGEMENT POCHE
REDEMARRAGE APRES OFF

Sélectionner avec ▼▲ puis valider

0000

Valider

3 Double appui pour démarrer et verrouiller la perfusion




DOUBLE CLICKER SUR LA TOUCHE POUR L'ACTIVER

>/||
START STOP

-Modifier la programmation en cours de perfusion

Verrouiller la perfusion

Pompes à perfusion Rythmic™ Evolution Mode Condensé

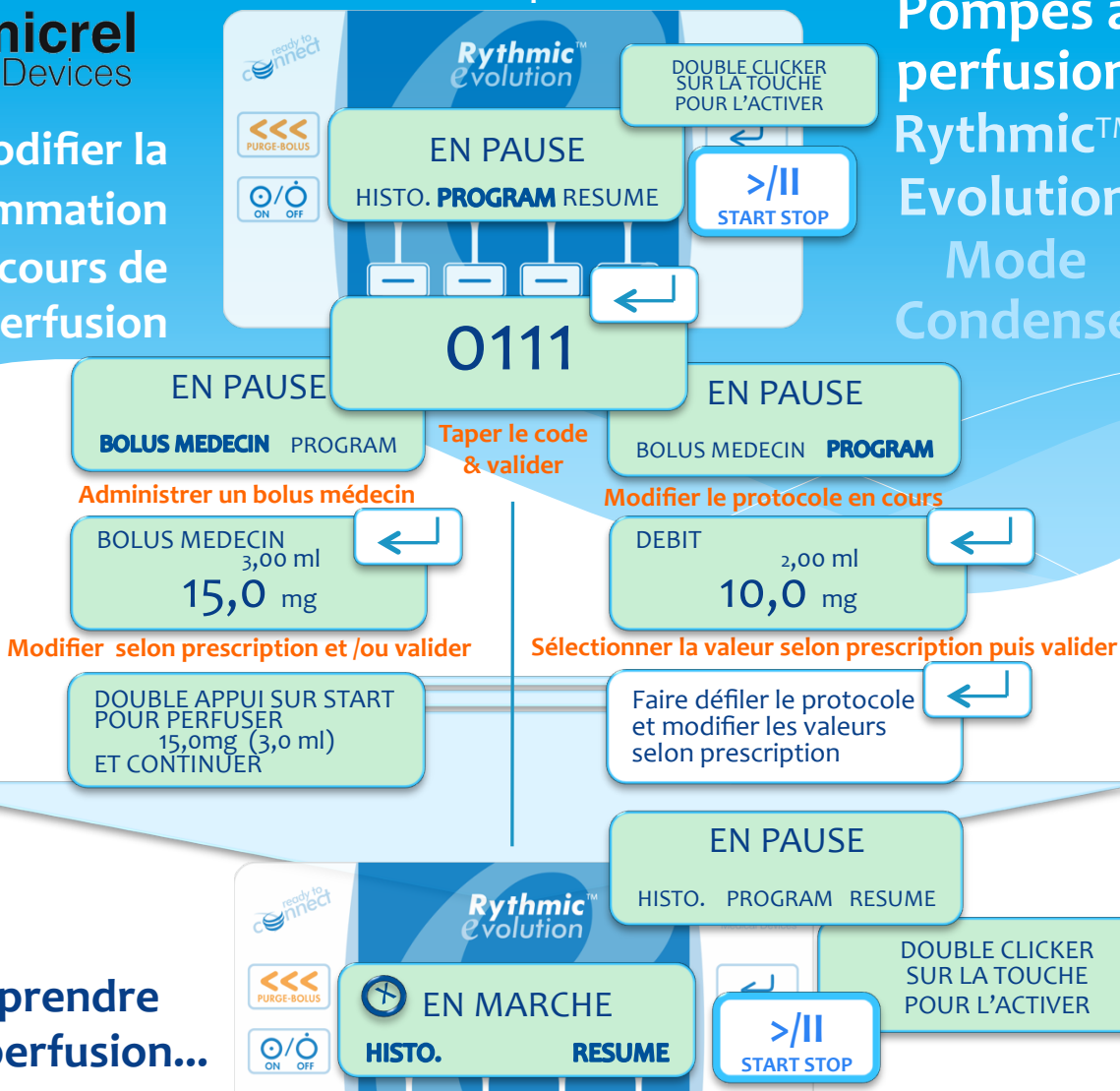

-Reprendre la perfusion...

-Interpréter les alarmes, **presser**  **pour mettre la pompe en pause**

Pas d'alarme d'air !

Bulles d'air éliminées par le filtre de la tubulure

OCCCLUSION AVAL

Reprise automatique quand occlusion levée (selon configuration)

STOP VOLET OUVERT

Vérifier le volet de fermeture du segment de pompage

PRE ALARME FIN DE PERFUSION

Volume restant à perfuser < 3ml
(Configuration de la pompe par défaut)

PRE ALARME PILE FAIBLE

Reste 12h à 2ml/h

ALARME ERREUR : C-xx

Erreur technique, vérifier interférence électromagnétique. Eteindre et rallumer, confier à Technicien Agréé si persistant

STOP FIN DE PERFUSION

Mettre sur "Off"
changer la poche

STOP PILE USAGÉE

Mettre sur "Off"
changer la pile