

Notice d'utilisation condensée pour l'équipe soignante

PROGRAMMATION DE LA POMPE

Mettre la pompe en marche en appuyant sur ON.

CODE: Saisir le code de programmation et valider en appuyant sur ENTER (↩).

(0111 est le code programmation par défaut départ usine)

DEBIT: Saisir le débit et valider.

0036 ml/HR

Il est possible, à partir de cet écran de changer l'unité de perfusion en appuyant sur la touche légendée **Unité**. Si la perfusion précédente utilisait déjà des mg/h ou µg/h, la concentration du médicament sera automatiquement demandée avant le débit.

Saisir la dose de bolus et valider par (↩).

Saisir la période réfractaire et valider.

Saisir la dose limite ou la limite bolus et valider.

La durée d'observation de la dose limite ou de la limite bolus peut être changée à partir de cet écran en appuyant sur la touche légendée

DUREE

Saisir le volume à perfuser et valider.

L'indication 24H Max en haut de l'écran indique le volume maximum dont le patient peut avoir besoin en 24 heures en fonction du protocole établi.

POMPE EN PAUSE Démarrer la perfusion par un double appui sur START (▶/||).

Pour éteindre: Mettre la pompe en PAUSE par un double appui sur STOP (▶/||) et appuyer sur OFF (⏻).

Purge (patient non connecté): Presser doucement sur la poche pour purger la tubulure avant mise en place dans la pompe **ou** purger à l'aide de la pompe en maintenant appuyé sur la touche PURGE (⏻) jusqu'à ce que la tubulure soit purgée.

Bolus: Appuyer sur la poire patient ou appuyer et maintenir deux secondes sur la touche BOLUS (⏻), jusqu'à ce qu'un bip se fasse entendre.

0111 Changement de protocole

Mettre la pompe en pause par un double appui sur STOP (▶/||). Appuyer sur la touche marquée **Program**. Saisir le code de programmation et valider. 0111 est le code de programmation par défaut, départ usine. Appuyer sur la touche **Program**.


Faire défiler les écrans à l'aide de la touche ENTREE (↩) jusqu'à atteindre le paramètre à modifier. Changer ce paramètre et valider.

Continuer le défilement jusqu'à mettre la pompe en PAUSE.

Appuyer deux fois sur START (▶/||) pour relancer la perfusion.

0000 Changement de pile ou reprise de la perfusion après extinction de l'appareil.

Appuyer deux fois sur STOP (▶/||) pour mettre la pompe en PAUSE, puis sur OFF (⏻) pour éteindre.

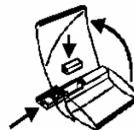

Changer la pile.

Mettre l'appareil en marche et appuyer sur ENTRER (↩). Ou saisir le code de « redémarrage après OFF » et valider. 0000 est le code de « redémarrage après OFF » par défaut départ usine..

Appuyer deux fois sur START (▶/||) pour relancer la perfusion.

0011 Changement de poche

Saisir le volume à perfuser, visualiser l'historique et appuyer deux fois sur START (▶/||) pour relancer la perfusion



Se reporter à la notice d'utilisation pour plus d'informations.

Alarmes

Occlusion

Le mode « **reprise de la perfusion en levée d'occlusion** », redémarrer automatiquement la perfusion dès que l'occlusion est levée.

Si'il n'est pas activé, appuyer sur  pour mettre la pompe en PAUSE. Supprimer la cause de l'occlusion et vérifier la bonne mise en place de la tubulure. Appuyer deux fois sur START  pour relancer la perfusion.

Pile usagée

Appuyer sur  pour mettre la pompe en PAUSE. éteindre la pompe. Changer la pile.

Mettre l'appareil en marche et appuyer sur ENTRER . *ou saisir le code de « redémarrage après OFF » et valider. 0000 est le code de « redémarrage après OFF » par défaut départ usine.*

Appuyer deux fois sur START  pour relancer la perfusion.

Fin de Perfusion

La Volume à Perfuser a été perfusé. Appuyer sur  pour mettre la pompe en PAUSE. Eteindre la pompe.

Dose limite



La perfusion s'arrête sans alarme sonore. La perfusion reprendra automatiquement lorsque la dose horaire repassera sous la limite.


Limite Bolus



Les bolus seront de nouveaux autorisés lorsque le taux horaire repassera en dessous du seuil fixé.

Si vous souhaitez modifier ces limites, appuyer deux fois sur STOP  et entrer dans le menu de programmation pour accéder à ce paramètre.

Alarmes techniques

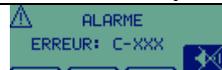

Une erreur technique a été détectée. Sa cause peut être temporaire, interférence électromagnétique ou fortes vibrations.

Noter le code de l'alarme. Eteindre et rallumer la pompe.

Appuyer sur ENTRER  et relancer la perfusion. Si l'alarme persiste, retirer l'appareil du service et la faire contrôler par un technicien qualifié.

Pré alarmes

Pré alarme de fin de perfusion

Le volume restant à perfuser est inférieur à 3 ml.

Appuyer deux fois sur la touche libellée  pour couper l'alarme sonore .

Pile Faible

Il reste un peu plus de 12 heures à 2 ml/h d'autonomie. Dans tout les cas, changer la pile en fin de perfusion.

Appuyer deux fois sur la touche libellée  pour couper l'alarme sonore .

Maintenance préventive

Lorsque la maintenance préventive est requise, un message apparaît à la mise en marche de l'appareil.

Appuyer sur ENTRER  pour valider ce message. Vous pouvez continuer la perfusion, mais il faut prévoir d'organiser la maintenance préventive de cet appareil.

