



Sapphire



MODE D'EMPLOI POCKET SAPPHIRE™ R13



A Pfizer Company




Sélection du mode de perfusion



À la mise sous tension, la pompe revient automatiquement au dernier mode de perfusion utilisé. Pour sélectionner un autre mode de perfusion :

- 1 Appuyer sur **Option**
- 2 Appuyer sur **Mode perfusion**
- 3 Entrer le code utilisateur « élevé » puis **OK**
- 4 Choisir le mode de perfusion souhaité

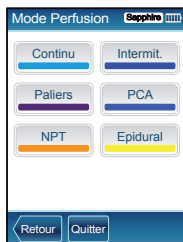


Écran d'exemple



Purge de la tubulure

Il est possible de demander la purge automatique de la tubulure avant ou après la programmation de la pompe, quel que soit le mode de perfusion. La purge peut être interrompue à tout moment.

- 1 Avant/Après la programmation
- 2 Penser à déconnecter la tubulure du patient
- 3 La purge s'engage. Le compte à rebours démarre.
- 4 La purge est terminée. Valider avec **OK**

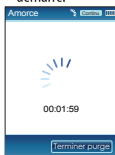

i Le rappel de purge permet d'activer l'envoi d'un message à l'utilisateur pour lui rappeler de purger la tubulure d'administration avant de démarrer une perfusion.

i Le volume de purge n'est pas décompté du volume à administrer.



Changement de poche



Option 1 :

- 1 Sélectionner **Répéter dern perf**
- 2 Valider la programmation avec **OK**
- 3 Purger la tubulure avec **purger** si besoin
- 4 Lancer la perfusion avec **Début**

i Maintien en mémoire des volumes perfusés, des historiques et de la période réfractaire pour le même patient.

Option 2 :

Le changement de poche peut également être effectué en modifiant le volume à perfuser (Vadm) avant la fin de perfusion.




Modification du programme (en cours de perfusion)

Déverrouiller si nécessaire



Sur l'écran de perfusion
Appuyez sur la flèche correspondant à l'item à modifier*

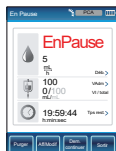

Valeurs données
à titre indicatif

* Accessible uniquement
lorsque la perfusion est
en pause en PCA/PCEA

i Fonction de descente d'urgence disponible en mode NPT.



Avec le menu

- 1 Appuyer sur **Demander Pause** puis **OK**
- 2 Appuyer sur **Aff/Modif**
- 3 Sélectionner l'item à modifier
- 4 Entrer la ou les valeur(s) puis **OK**
- 5 Sortir du menu avec **OK**
puis **Dem. continuer** puis **OK**
pour reprendre la perfusion



Consulter les paramètres de perfusion

Au cours de la perfusion, les paramètres de traitement non modifiables apparaissent dans le menu AFFICHER SYSTÈME. Pour consulter ces paramètres depuis la perfusion en cours :

- 1 Appuyer sur **Aff/Modif**,
- 2 Sélectionner **Affich système**
- 3 **Valeurs perfus.**



Verrouillage et déverrouillage de la pompe



Verrouillage de l'écran



- ← Verrouillage simple
- ← Verrouillage avec Code



Déverrouillage de l'écran




Valeurs données >
à titre indicatif

Code de déverrouillage :



Gestion des alarmes

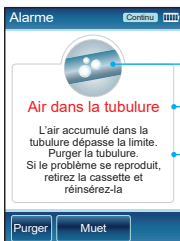

→ Visuel explicatif

→ Cause de l'alarme

→ Consignes de résolution



Lorsqu'une alarme apparaît, la pompe se met en pause. Il est nécessaire de relancer la perfusion après la résolution du problème.

Procédure générale :

- 1 Appuyer sur **MUET** pour couper l'alarme sonore pendant 2 mn
- 2 Lire le message à l'écran
- 3 Suivre les instructions
- 4 Une fois le problème résolu, appuyer sur **OK**



Historique Bolus



1 Appuyer sur **Aff/Modif**

2 Sélectionner **Histor. Admin. >**

Dose totale
admin **2.1 mg**

Dose totale perfusée

Période histor
bolus **1 H**

Période (h) durant laquelle les événements
affichés se sont produits.

Nb bol. perf/dem. **0/0**

Pour modifier le réglage, appuyer sur **>**
saisir la valeur souhaitée, puis
appuyer sur **OK**

Bolus Perfusé **0**

Bolus médecin
prf : **0**

Total bolus perf : **0**

Nombre total de bolus perfusés/demandés.



Bolus médecin en PCA/PCEA/PCCA

*Le bolus médecin doit être administré lorsque la perfusion est en cours.
Déverrouiller si nécessaire.*

1 Appuyer sur **Aff/Modif**

2 Sélectionner **bolus médecin >**


3 Entrer le code utilisateur « élevé »
puis **OK**

4 Entrer la dose du bolus puis
valider avec **OK**

5 **OK** pour démarrer l'administration



Alimentation de la pompe via secteur

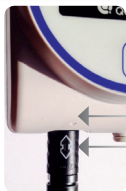

La Saphire fonctionne sur batterie interne et/ou sur secteur.
Il est important de bien positionner le chargeur.

Positionner la connectique du chargeur en face de la flèche de la pompe. Ne pas tourner.

i La dernière génération du cordon d'alimentation Saphire™ possède un témoin de charge LED

Fonctionnement identique pour la connexion du cordon bolus, qui doit être connecté directement sur la pompe



Arrêt de la pompe

- 1 Mettre la perfusion en pause
- 2 Déverrouiller si nécessaire
- 3 Sortir du programme
- 4 Appuyer sur 
- 5 Confirmer

i Si le débit utilisé était < 1 ml/h, la pompe vous invite à retirer la cassette avant de mettre la pompe hors tension.



Hospira France / Pfizer

23-25 avenue du Dr Lannelongue
75014 Paris
Standard : 01 40 83 82 00



Service clients

Tél. : 01 40 83 86 24
Fax : 01 40 83 82 19
e-mail : dispositifsmedicaux.fr@pfizer.com



Mode d'emploi simplifié. Ne remplace pas le manuel d'utilisation des pompes Saphire™

Hospira pense aux générations futures
et participe à la protection de la planète.




Hospira
A Pfizer Company