



ProNeo Agilia Entéral

POUSSE SERINGUE DESTINÉ
À L'ALIMENTATION ENTÉRALE
POUR LES NOUVEAUX NÉS

Mini guide



Nous recommandons la lecture de la notice d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.

En raison de l'évolution des normes, des textes réglementaires et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation de nos services.

Cette brochure ne peut être retranscrite en partie ou en entier sans le consentement écrit de Fresenius Kabi.



**FRESENIUS
KABI**

caring for life®

* Prendre soin de la vie



Fresenius Vial S. A. S.
Le Grand Chemin
38590 Brézins - France
Tél.: +33 (0)4 76 67 10 10
Fax: +33 (0)4 76 67 11 34

Une société de Fresenius Kabi

www.fresenius-kabi.com

8876-O_OG_NUT_ProNeo_FR_22.07.2014



**FRESENIUS
KABI**

caring for life™

* Dispositifs Médicaux

** Prendre soin de la vie

Fonctionnement

1 Mise en fonctionnement



- Vérifier que l'Injectomat Agilia n'est pas endommagé.
- Raccorder l'appareil à une alimentation secteur : le témoin présence secteur s'allume.
- Appuyer sur <ON> pour allumer l'appareil.
- Lors d'une première utilisation, lire le guide d'utilisation complet de l'appareil.

2 Sélection de la seringue



- Vérifier que la seringue n'est pas endommagée.
- La seringue entérale installée doit correspondre à la seringue affichée.
- OK: pour valider la marque et le volume de la seringue entérale, ou,
- C : pour changer de seringue entérale puis validation de la seringue.

3 Purge



- Vérifier que le prolongateur est bien connecté à la seringue entérale
- Vérifier que le patient est déconnecté.
- Pour démarrer la purge, appuyer 2 fois sur <PURGE> (1 appui court + 1 appui long).
- Pour arrêter la purge : relâcher la touche <PURGE>.
- Connecter le patient.

4 Sélection débit / démarrage



- Sélectionner le débit.
- Vérifier les paramètres de nutrition (seringue, débit...)
- Lancement de la nutrition: appuyer sur <START> pour démarrer la nutrition.

5 Sélection débit / démarrage



- Appuyer sur <STOP> : la nutrition s'arrête.
- Redémarrer la nutrition en appuyant sur <START>.
- Programmation de la pause : appuyer 2 fois sur <STOP>.
- Sélectionner le temps de pause. La pause peut aussi être programmée à partir du menu.
- Lorsque le temps de pause est achevé, appuyer sur <START> pour redémarrer la nutrition.

6 Suivi de la nutrition

Les LEDs lumineuses indiquent le statut de la nutrition en cours :

Nutrition en cours



Pré-alarme



Alarme



7 Silence alarme



- Appuyer sur <SILENCE ALARME> pour supprimer le signal sonore.
- Silence préventif : pour changer une seringue sans activation de l'alarme sonore, arrêter la nutrition par un appui sur <STOP>.
- Appuyer sur <SILENCE ALARME> et procéder au changement de la seringue.

8 Accès au menu



- Appuyer sur <MENU/EXIT> pour accéder aux fonctions : Volume administré, réglez pression, autonomie batterie, pause, verrouillage clavier... Autres fonctions disponibles : consulter le guide d'utilisation complet de l'appareil.