



Cassettes-réservoirs de médicaments CADD™ (50 mL et 100 mL) avec système Flow Stop anti-débit libre

Destinées à une utilisation avec les pompes CADD®-Solis

Le système Flow Stop anti-débit libre est un dispositif de protection par arrêt du débit qui a été ajouté aux cassettes-réservoirs de médicaments et aux sets d'administration.

Étape 1 - Remplissage de la cassette-réservoir

Recourez à une technique aseptique. Modifiez en fonction du protocole interne de votre établissement.

1. Remplissez une seringue Luer-Lock du volume souhaité de médicament et de diluant.



2. Retirez et jetez le bouchon protecteur de la tubulure. Laissez la pince bleue en place.



3. Raccordez la seringue au raccord Luer et remplissez la poche de médicament à l'intérieur de la cassette. Renouvelez l'opération si besoin. Puis clampez.



4. Inclinez et faites pivoter la cassette pour rassembler les bulles d'air en formant une seule grosse bulle. Déclamez. Purgez l'air jusqu'à l'extrémité de la tubulure. Clampez.



5. Déconnectez la seringue du raccord Luer. Mettre en place le bouchon stérile fourni avec la cassette ou fixez la tubulure d'extension.



REMARQUE : Connectez le raccord Luer de la cassette-réservoir au raccord Luer de la tubulure d'extension. Si l'extrémité à valve anti-siphon de la tubulure d'extension est connectée au raccord Luer de la cassette-réservoir, une alarme de haute pression résonnera lorsque vous tenterez de démarrer la pompe. Dans ce cas, inversez la tubulure.

Étape 2 - Mise en place de la cassette ou du set d'administration

AVERTISSEMENT : Laissez la pince bleue en place sur la cassette jusqu'à ce que vous soyez prêt à raccorder la cassette à la pompe.

1. Retirez la pince bleue de la cassette.
2. Attachez une tubulure d'extension CADD® appropriée au raccord Luer.



3. Vérifiez que le levier de la pompe est déverrouillé, l'ouvrir à 90 degrés et insérez les crochets de la cassette dans les encoches, au bas de la pompe.



4. Sans tenir le levier de la pompe, posez la pompe à la verticale sur une surface plane et appuyez sur le levier de la pompe jusqu'à ce que la cassette s'enclenche.



5. Relevez le levier de la pompe en position fermée. En cas de résistance, déverrouillez le consommable et renouvelez l'opération. En cas d'échec à la deuxième tentative, n'utilisez pas la pompe et contactez le Service clientèle de Smiths Medical pour obtenir une assistance.
6. Si vous souhaitez verrouiller la cassette, insérez la clé de la pompe dans la serrure de verrouillage et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.
7. Ouvrez tous les clamps.
8. Purgez la tubulure à l'aide de la pompe. Assurez-vous que toute la tubulure est libre de bulles d'air. Préservez l'asepsie de l'extrémité distale de la tubulure.
9. Si la tubulure d'extension contient un filtre, purgez le filtre conformément au mode d'emploi.
10. Fermez tous les clamps de la tubulure.

Étape 3 - Démarrage de la perfusion

1. Raccordez la tubulure au patient en respectant des règles d'asepsie rigoureuses.
2. Ouvrez tous les clamps de la tubulure et débutez la perfusion.


AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la tubulure sous le filtre ne présente pas de bulle d'air avant de la raccorder au patient. Veuillez vous reporter au mode d'emploi détaillé fourni avec les tubulures de perfusion, les cassettes-réservoirs de médicament et les tubulures d'extension pour plus d'informations et pour connaître les mises en garde et les avertissements. Pour démarrer la pompe, reportez-vous au manuel d'utilisation accompagnant la pompe.

Remplissage




La cassette-réservoir de médicament est conçue pour être facile à remplir avec la pince bleue en place.

Fermeture de la tubulure

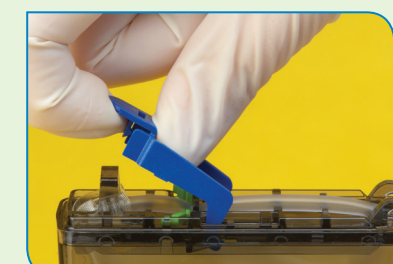

Retirez la pince bleue pour fermer la tubulure.

Ouverture de la tubulure

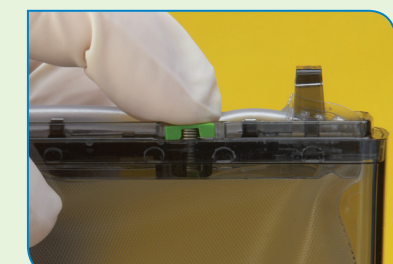

Appuyez sur le bouton vert pour ouvrir la tubulure si besoin (dans le cas où la pince bleue est déjà retirée).

*Pour obtenir des instructions concernant le remplissage du réservoir de cassette de 250 mL, reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le produit.

LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Smiths Medical France
3 rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél. : +33 (0)1 58 42 50 00

EC Authorized Representative
Smiths Medical International Ltd.
TN25 4BF, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 1233 722100

Documentation destinée aux professionnels de santé

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation pour une description détaillée du produit et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. CADD-Solis et les logos Smiths Medical et CADD sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole © signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont les marques commerciales ou les marques de service de leurs détenteurs respectifs. ©2014 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN19856FR-112014

MPAUC-1159
CE 0473 Rx ONLY
smiths medical
CADD®