

Remplissage



La cassette-réservoir de médicament est conçue pour être facile à remplir avec la pince bleue en place.

Fermeture de la tubulure



Retirez la pince bleue pour clamber la tubulure.



Ouverture de la tubulure



Appuyez sur le bouton vert pour déclamber la tubulure si besoin (dans le cas où la pince bleue est déjà retirée).



smiths medical

Smiths Medical France
3 rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél. : +33 (0)1 58 42 50 00

EC Authorized Representative
Smiths Medical International Ltd.
TN25 4BF, Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 1233 722100

www.smiths-medical.com

Documentation destinée aux professionnels de santé

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation pour une description détaillée du produit et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. CADD-Legacy et les logos Smiths Medical et CADD sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont les marques commerciales ou les marques de service de leurs détenteurs respectifs. ©2014 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN193111FR-112014

MPAUC-1162

CE 0473 Rx ONLY

smiths medical
bringing technology to life

Tubulures de perfusion ambulatoire CADD® avec arrêt du débit

Guide d'utilisation rapide

Pompes CADD-Legacy®




Ajout d'un système Flow Stop anti-débit libre aux tubulures de perfusion CADD® et aux cassettes-réservoirs de médicaments.

CADD®

Étape 1 - Remplissage de la cassette-réservoir

Recourez à une technique aseptique. Modifiez en fonction du protocole interne de votre établissement.

1. Remplissez une seringue Luer-Lock du volume souhaité de médicament et de diluant.

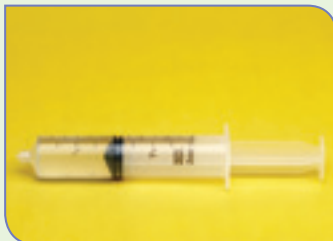

2. Retirez et jetez le bouchon protecteur de la tubulure. Laissez la pince bleue en place.



3. Raccordez la seringue au raccord Luer et remplissez la poche de médicament à l'intérieur de la cassette. Renouvelez l'opération si besoin. Puis clampez.



4. Inclinez et faites pivoter la cassette pour rassembler les bulles d'air en formant une seule grosse bulle. Déclamez. Purgez l'air jusqu'à l'extrémité de la tubulure. Clampez.



5. Déconnectez la seringue du raccord Luer. Mettre en place le bouchon stérile fourni avec la cassette ou fixez la tubulure d'extension.



REMARQUE : Connectez le raccord Luer de la cassette-réservoir au raccord Luer de la tubulure d'extension. Si l'extrémité à valve anti-siphon de la tubulure d'extension est connectée au raccord Luer de la cassette-réservoir, une alarme de haute pression résonnera lorsque vous tenterez de démarrer la pompe. Dans ce cas, inversez la tubulure.



Étape 2 - Mise en place de la cassette ou du set d'administration

AVERTISSEMENT : Laissez la pince bleue sur le consommable (cassette ou set d'administration) jusqu'à la mise en place sur la pompe.

1. Retirez la pince bleue du consommable.



2. Clampez la tubulure.
3. Emboîtez les deux crochets du consommable dans les encoches, au bas de la pompe.

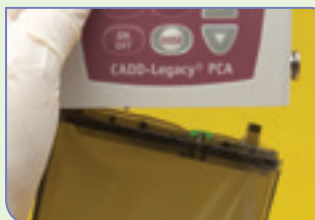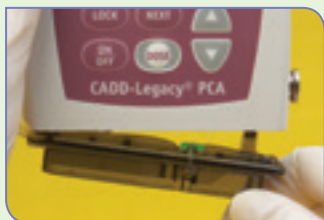

4. Placez la pompe avec le consommable sur une surface plane et appuyez sur le dessus de la pompe en la pressant vers le bas afin que le consommable épouse étroitement la pompe.



5. Insérez une clé de pompe CADD® dans le verrou, puis poussez vers l'intérieur et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'insertion de la cassette ou du set d'administration sur la pompe.



6. Ouvrez tous les clamps.
7. Purgez la tubulure à l'aide de la pompe. Assurez-vous que toute la tubulure est libre de bulles d'air. Préservez l'asepsie de l'extrémité distale de la tubulure.
8. Fermez tous les clamps de la tubulure.

Étape 3 - Démarrage de la perfusion

1. Raccordez la tubulure au patient en respectant des règles d'asepsie rigoureuses.
2. Ouvrez tous les clamps de la tubulure et débutez la perfusion.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la tubulure sous le filtre ne présente pas de bulle d'air avant de la raccorder au patient. Veuillez vous reporter au mode d'emploi détaillé fourni avec les tubulures de perfusion, les cassettes-réservoirs de médicament et les tubulures d'extension pour plus d'informations et pour connaître les mises en garde et les avertissements. Pour démarrer la pompe, reportez-vous au manuel d'utilisation accompagnant la pompe.