



Pompe à perfusion ambulatoire CADD®-Solis VIP - Menus complets

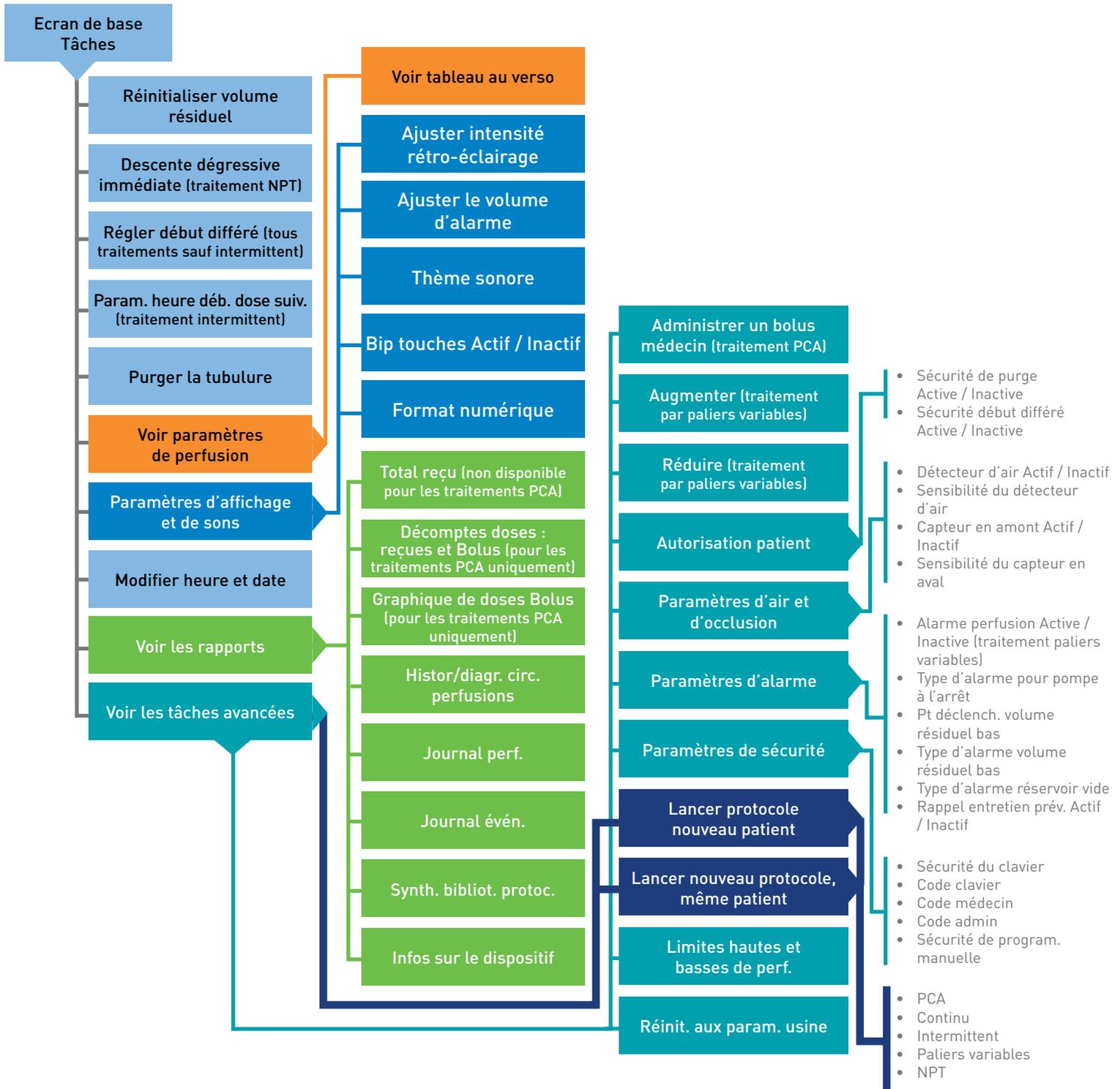

Lancer une nouvelle programmation patient



Menus programmation de la pompe à perfusion ambulatoire CADD®-Solis VIP

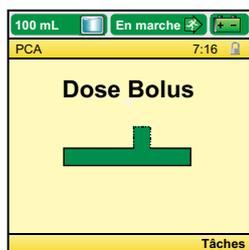

PCA et PCEA

| | |
|---|---|
| Volume résiduel | 0 à 9999 mL |
| Début différé | 0 à 96 h - incrément 5mn |
| Unité de programmation | mL, mg, mcg |
| Débit continu | 0 à 500 mL/h (ou équivalent en mg ou mcg) |
| Bolus | 0 à 50 mL (ou équivalent en mg ou mcg) |
| Période réfractaire | 1 mn à 24 h |
| Bolus max. par heure | 1 à 60 |
| Quantité limite de perfusion | 0,1 à 1900 mL (ou équivalent en mg ou mcg) |
| Bolus médecin | 0 à 50 mL (ou équivalent en mg ou mcg) |
| Débit max. perfusion (Bolus + débit continu) | 40 à 250 mL/h - incrément 1 mL |
| Débit MVO | 0 mL/h ou 0,1 mL/h |



Paliers Variables

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Volume résiduel | 0 à 9999 mL |
| Début différé | 0 à 96 h - incrément 5mn |
| Débit initial | 0,4 à 499 mL/h |
| Débit de plateau | 0,4 à 500 mL/h |
| Incrément du débit | 0,4 à 499 mL/h |
| Volume de perfusion | 1 à 9990 mL |
| Durée du palier | 15 mn à 24 h |
| Débit MVO | 0 à 10 mL/h |
| Alerte perfusion par palier | Activé ou désactivé |



Continu

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Volume résiduel | 0 à 9999 mL |
| Début différé | 0 à 96 h - incrément 5mn |
| Débit continu | 0,1 à 500 mL/h |
| Débit MVO | 0 à 10 mL/h |



Intermittent

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Volume résiduel | 0 à 9999 mL |
| Début différé | 0 à 96 h - incrément 5mn |
| Volume de dose | 0,1 à 1000 mL |
| Durée de dose | 1 mn à 24 h |
| Cycle de dose | 10 mn à 96 h |
| Début dose suivante | 0 à 96 h - incrément 5mn |
| Débit MVO | 0 à 10 mL/h |



NPT

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Volume résiduel | 0 à 9999 mL |
| Début différé | 0 à 96 h - incrément 5mn |
| Volume de perfusion | 1 à 9990 mL |
| Montée progressive | 0 mn à 99:40 h:mn |
| Descente dégressive | 0 mn à 99:40 h:mn |
| Durée de perfusion | 10 mn à 99:50 h:mn |
| Débit MVO | 0 à 10 mL/h |
| Débit max. plateau | 0,1 à 500 mL/h |

Pour plus d'informations, consultez notre site Web www.smiths-medical.com

DOCUMENTATION DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ.
LES PRODUITS DÉCRITS PEUVENT NE PAS ÊTRE ENREGISTRÉS OU DISPONIBLES À LA VENTE AU CANADA OU DANS D'AUTRES PAYS.

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles
94656 RUNGIS Cedex
Tél. : +33 (0)1 58 42 50 00
Email : france@smiths-medical.com
www.smiths-medical.com

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tél. : 1-614-210-7300

EC Authorized Representative
Smiths Medical International Ltd.
TN25 4BF, UK
Tél. : +44 (0) 1233 722100

MPAUC-1648



smiths medical

Smiths Medical appartient à Smiths Group plc, une entreprise mondiale axée sur l'innovation technologique. Se référer aux instructions de la notice d'utilisation/manuel utilisateur pour une description détaillée des produits et la liste complète des indications, contre-indications, mises en garde et précautions d'emploi. CADD et le logo Smiths Medical sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays. Tous les autres noms et marques mentionnés sont des marques commerciales ou des marques de service de leurs détenteurs respectifs. Le produit référencé est marqué CE.
©2018 Smiths Medical. Tous droits réservés. IN193564FR-012018