

CADD®-Solis v3.0

AVEC MODE DE PERFUSION PIB / PIEB

Paramètres à programmer

PARAMÈTRES LIÉS AU BOLUS INTERMITTENT

- Bolus intermittent :** Correspond à la dose de médicament, sous la forme d'un bolus, qui sera administré automatiquement au patient à intervalle régulier.
- Intervalle bolus :** Correspond au temps écoulé entre le début d'un bolus intermittent et le début du bolus intermittent suivant.
- Prochain bolus :** Heure de départ prévu pour le prochain Bolus Intermittent programmé.

The screenshot shows the pump's interface with the following details:


- Top status bar: 100 mL, A l'arrêt, and a battery icon.
- Second bar: PIB, Nom crit. qual., Médic., 2:07 PM, and a lock icon.
- Main display area:
 - ✓ Bolus intermittent 10 mL
 - Intervalle Bolus 1 Hrs 0 Mins
 - Prochain Bolus 1 Hrs 0 Mins
 - Dose bolus 5 mL
 - Footer: Valider ou app. s/ sélection pr mod
- Bottom bar: Quitter and Valider buttons.

PARAMÈTRES LIÉS À LA DOSE BOLUS DEMANDÉE PAR LE PATIENT

- Dose bolus :** Correspond au bolus patient, c'est-à-dire à la quantité de médicament délivrée en appuyant sur la télécommande patient ou la touche dose bolus de la pompe.
- Période réfractaire :** Correspond à la durée minimale entre 2 doses bolus demandées par le patient.

AUTRES PARAMÈTRES DE PERFUSION


- Débit continu :** Quantité de médicament perfusée en débit continu.
- Limite de perfusion DMC sur xh :** Il s'agit de la dose maximale cumulée sur xh. Cette option permet de restreindre la quantité de médicament perfusée (continu + bolus intermittent + dose bolus patient) hors bolus médecin, sur un nombre d'heure choisi (de 1 à 12h).
- Doses max./h :** Nombre maximum de doses bolus demandées par le patient autorisées sur 1h.
- Volume résiduel :** Volume du réservoir qui peut être une cassette CADD® ou une poche de solution.

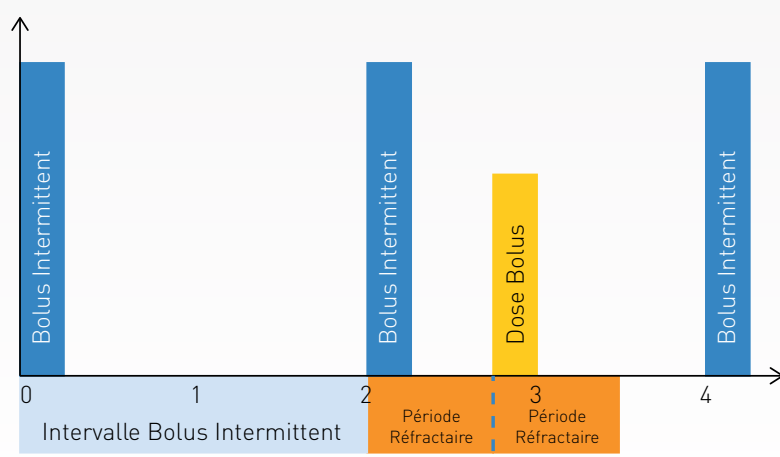


Avec la pompe CADD®-Solis v3.0, les paramètres de perfusion ci-dessus peuvent être combinés si besoin.

Ex : vous pouvez programmer simultanément un Bolus Intermittent + une Dose Bolus + un Débit Continu.


PROGRAMMATION DES PÉRIODES D'INTERDICTIONS

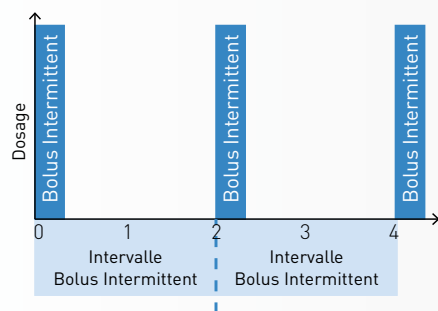


Entre 2 Bolus Intermittent
= Intervalle bolus

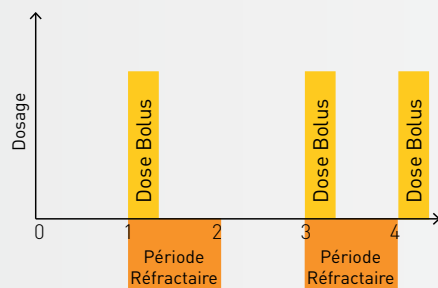

Entre 2 Doses Bolus
= Période réfractaire

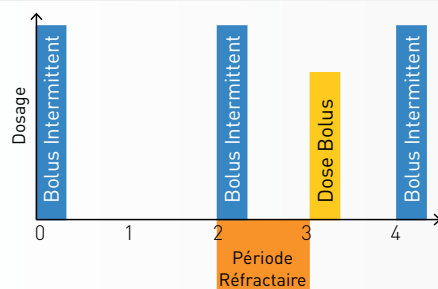


Entre un Bolus Intermittent et une Dose Bolus
= Période réfractaire

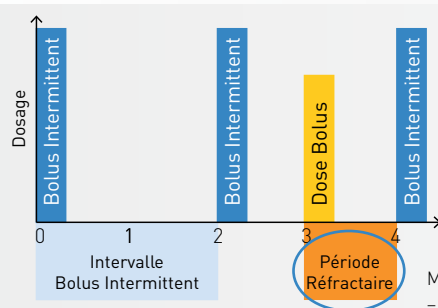

Entre une Dose Bolus et un Bolus Intermittent
= 2 possibilités de programmation :

- ✓ soit la période réfractaire
- ✓ soit l'intervalle Bolus.

Modèle avec limite
= Période réfractaire

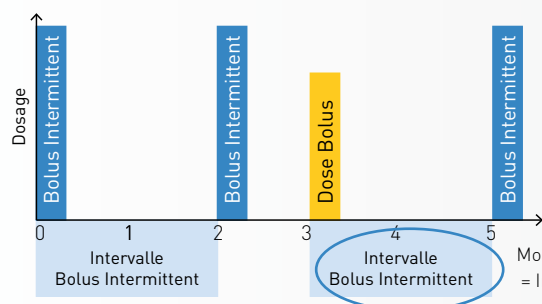

Modèle avec limite
= Intervalle Bolus



LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE BROCHURE SONT CONFORMES AUX PRODUITS AU MOMENT DE L'IMPRESSION.
SMITHS SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER ULTÉRIEUREMENT LES PRODUITS PRÉSENTÉS.

Smiths Medical France

3, rue du Pont des Halles 94656 RUNGIS Cedex
Tél : 01 58 42 50 00 - Fax : 01 58 42 50 30
www.smiths-medical.fr

Documentation destinée aux professionnels de santé.

Smiths Medical fait partie du groupe mondial de haute technologie Smiths Group plc. Le ou les produits décrits peuvent ne pas être homologués ni commercialisés dans tous les pays. CADD, CADD-Solis et les logos Smiths Medical et CADD sont des marques commerciales de Smiths Medical. Le symbole ® signifie que la marque a été déposée auprès de l'office des brevets des États-Unis et dans d'autres pays.
©2013 Smiths Medical. Tous droits réservés. 1/13 IN193522FR-0213