

POMPE APPLIX[®] SMART



1. Fixer le chargeur de la pompe sur un pied ou un rail



2. Placer la pompe sur le chargeur



3. Ouvrir la porte



4. Fermer le clamp de la tubulure et percuter la poche



5. Ouvrir le clamp, purger la tubulure et remplir la chambre compte-gouttes aux 2/3
Évite la formation de bulles d'air



6. Fermer le clamp, l'insérer dans son emplacement et la tubulure dans son guide



7. Fermer la porte. Le clamp s'ouvre automatiquement
Débit libre évité grâce au système péristaltique



8. Faire une boucle avec la tubulure autour de la noix de serrage
Évite la remontée de bulles d'air dans la tubulure



9. Connecter la tubulure à la sonde ou au bouton de gastrostomie
Appuyer sur ON / OFF
Paramétrer la pompe
Appuyer sur Start

ALARMES



Alarme batterie



Volume cible atteint



Tubulure vide



Occlusion amont ou aval



Défaut tubulure



Porte ouverte



Mécanisme bloqué



Défaut technique