



MONTAGE DU PORTE-SERUM

- 1- Enfoncer le crochet bas sur la rallonge jusqu'à sa butée interne.
- 2- Enfoncer ensuite le crochet haut dans la rallonge, à 90° du crochet bas.
- 3- Enfoncer au maillet l'embout à insertion dans l'extrémité inférieure du mât.
- 4- Monter au maillet le réducteur sur trou central du pied 5 branches.
- 5- Cliper les 5 roulettes sous le pied 5 branches.
- 6- Monter le mât sur le pied 5 branches et le fixer à l'aide de la vis de serrage en intercalant la rondelle d'appui.

Descriptif :

- . Pied Polyamide diamètre 52 cm.
- . 5 roulettes diamètre 50 mm double galets dont 2 à freins.
- . Mât en acier peint en époxy couleur.
- . Rallonge inox avec 4 crochets plastiques.

Mises en garde et précautions d'utilisation :

- . **Poids maximal par crochet : 1 kg.**
- . **Toujours vérifier la tenue de la molette de serrage avant de suspendre les poches de sérum au crochet.**
- . **Sortie maximale de la tige : 2 m**