

Auto

CRONO PAR 50

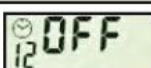
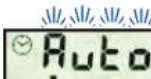
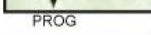
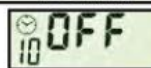
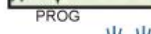
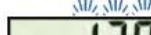
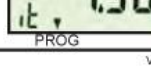
Pompe à perfusion ambulatoire
pour le traitement de la
maladie de Parkinson



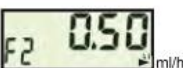
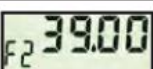
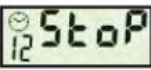
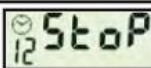
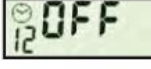
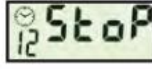
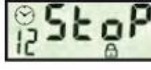
INSTRUCTIONS RAPIDES

Touches temporisées : l'action doit se prolonger pendant quelques secondes avant que la commande ne soit exécutée.

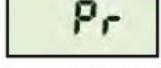
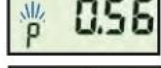
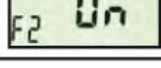
Le résumé des présentes instructions ne se substitue pas à la nécessité de lire les informations données dans le manuel et ne représente qu'une synthèse rapide des fonctions du dispositif.

	TOUCHES	SÉLECTION DE LA VERSION DE LA POMPE	ÉCRAN
POMPE SUR OFF	 (maintenir enfoncée)  	• Pompe sur OFF • Affichage du nombre de bolus administrés (après 2 secondes) • Affichage du nombre de perfusions (après 6 secondes) • Phase de sélection de la version de la pompe (après 10 secondes) • Accès à la phase de sélection de la version de la pompe • Sélection de la version de la pompe (FrEE/Auto) • Pompe sur OFF	      
POMPE SUR OFF	   	• Pompe sur OFF et L0 • Programmation de l'heure • Programmation des minutes • Programmation de la dose bolus (de 0,00 à 2,00 ml) • Programmation de l'intervalle entre les doses bolus (de « no,Lt » à 24 heures)	        

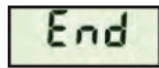
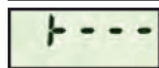
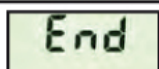
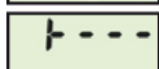
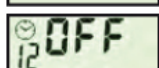
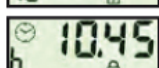
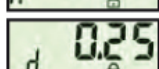
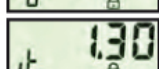
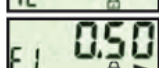
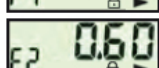
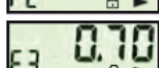
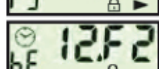
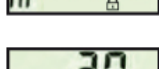
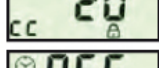
Auto

	TOUCHES	MISE EN MARCHE/AMORÇAGE	ÉCRAN
POMPE SUR ON		• Démarrage de la perfusion • Commutation temporaire de la durée de la perfusion/débit	 
	TOUCHES	ADMINISTRATION DE LA DOSE BOLUS	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE		• Pompe sur ON • Administration de la dose bolus • Pompe sur ON	  
	TOUCHES	StoP	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE	 	• Pompe sur StoP • Extinction du signal sonore et clignotement de l'écran	 
	TOUCHES	VERROUILLAGE DU CLAVIER	ÉCRAN
POMPE SUR OFF/StoP	 (5 sec)  appuyer sans relâcher   / 	• Pompe sur OFF ou sur StoP • Affichage du nombre de bolus administrés • Affichage du nombre de perfusions • Phase de sélection du niveau de verrouillage du clavier • Sélection de verrouillage/déverrouillage du clavier • Pompe sur OFF ou sur StoP	         

Auto

	TOUCHES	PROGRAMMATIONS	ÉCRAN
POMPE SUR OFF		• Programmation du débit F1 (de 0,05 à 5,00 ml/h)	
		• Programmation du débit F2 (de 0,05 à 5,00 ml/h)	
		• Programmation du débit F3 (de 0,05 à 5,00 ml/h)	
	 et 	• Attribution des débits aux 24 heures journalières	
		• Programmation du volume partiel (de 1 à 50 ml) (voir tableau : PROGRAMMATION DU VOLUME PARTIEL)	
	 / 	• Pompe sur OFF (après 20 secondes) • Diminution/augmentation des paramètres précédents	
	TOUCHES	PROGRAMMATION DU VOLUME PARTIEL	ÉCRAN
POMPE SUR OFF	 / 	• Programmation du volume partiel	
		• Diminution/augmentation du volume partiel	
		• Positionnement du pousseur au volume partiel	
		• Pompe sur OFF	
	TOUCHES	MISE EN MARCHE/AMORÇAGE	ÉCRAN
POMPE SUR ON	  (maintenir enfoncée) 	• Pompe sur OFF	
		• Fonction <i>amorçage</i>	
		• Distribution de la dose d' <i>amorçage</i> (1,5 ml max. totale)	
		• Mise en marche de la pompe	

Auto

	TOUCHES	RETOUR ANTICIPÉ	ÉCRAN
POMPE ALLUMÉE	 	• Pompe sur StoP	
		• Pompe sur End	
		• Retour du pousseur	
		• Pompe sur OFF	
	TOUCHES	FIN DE LA PERFUSION	ÉCRAN
		• Pompe sur End	
		• Retour du pousseur	
		• Pompe sur OFF	
	TOUCHES	AFFICHAGES	ÉCRAN
POMPE SUR OFF/StoP - L A	         	• Pompe sur OFF et L1	
		• Programmation de l'heure	
		• Dose bolus	
		• Intervalle de temps entre les bolus	
		• Débit F1	
		• Débit F2	
		• Débit F3	
		• Débits dans les 24 heures journalières	
		• Affichage des débits dans les 24 heures journalières	
		• Volume partiel	
		• Pompe sur OFF	

Distribué par:
Pentaferte France SAS
3, rue des Entrepreneurs ZAC de l'Ambrésis 77270 Villeparisis
Tel: 01-64-67-08-63 Fax: 01-64-67-13-61
contact@pentaferte-france.com



Fabriqué par:
CANè S.p.A. Medical Technology
Via Cuornè 42/a 10098 Rivoli (TO) Italie
Tél. +39 011 9574872 - Fax +39 011 9598880
www.canespa.it E-mail : mailbox@canespa.it

DM classe II.b - CE 0476 CERMET - Ce Dispositif Médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Version 02-2013