

Descriptif



Recommandations

Avertissements :

- . Ce fauteuil est destiné à une utilisation intérieure. Ne pas utiliser le fauteuil en extérieur, sur surface meuble ou non aménagée.
- . Ne pas dépasser le poids maxi utilisateur indiqué sur le fauteuil.
- . Ne pas utiliser les accoudoirs ou le repose jambe en tant que siège.
- . Ne jamais déplacer les modèles à roulettes en transportant un patient sur une rampe ou un sol ayant une déclivité supérieure à 5°.
- . Utiliser le fauteuil sur une surface plane.

Nettoyage : L'assise est amovible pour faciliter son entretien. Essuyer toutes les surfaces du fauteuil avec un non-tissé imprégné d'une solution de nettoyage adaptée (Anios détergent désinfectant surfaces hautes ou autre produit équivalent).

Proscrire impérativement : alcool pur, Acétone, Perchloréthylène et trichloréthylène, solvants détergents, produits d'entretien abrasifs et cires.

- . Ne pas nettoyer le fauteuil à grande eau ou au jet sous pression.

Entretien préventif :

Il est conseillé de réaliser une inspection annuelle pour conserver les performances du fauteuil. En fonction de la fréquence d'utilisation contrôlez les points suivants :

- . Propreté, état général du revêtement époxy et des garnitures,
- . Contrôle du châssis (chocs, déformations ...)
- . Fonctionnement des accoudoirs réglables,
- . Fonctionnement du dossier inclinable (manette de déclenchement, ressort gaz ...)
- . Fonctionnement du relève jambe (état du pantographe sur Q7000, verrouillage correct sur Q7500),
- . Fixation et fonctionnement des roues (contrôle des 3 positions).

Fauteuils de repos QUIEGO



Notice d'utilisation

- . Quiégo **1000** : Fauteuil à dossier fixe
- . Quiégo **1500** : Fauteuil à dossier inclinable
- . Quiégo **2000** : Fauteuil à dossier fixe, pieds réglables en hauteur
- . Quiégo **2500** : Fauteuil à dossier inclinable, pieds réglables en hauteur
- . Quiégo **3000** : Fauteuil à dossier fixe, roues
- . Quiégo **3500** : Fauteuil à dossier inclinable, roues
- . Quiégo **7000** : Relève jambe couplé à l'inclinaison du dossier
- . Quiégo **7500** : Relève jambe manuel à crémaillère (indépendant du dossier)




Montage du fauteuil



Montage du dossier :

Engager le dossier sur les 2 tubes du châssis. Appuyer sur le cliquet situé à droite du fauteuil (voir photo) afin que le dossier descende jusqu'en bas du châssis. Le cliquet s'enclenche dans le tube à la bonne position.


IMPORTANT : Pour démonter le dossier, appuyer sur le cliquet (située sous la garniture côté droit), et simultanément tirer le dossier vers le haut.

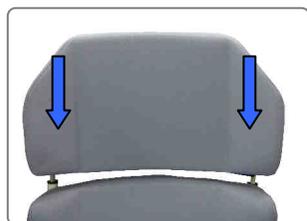

Montage de l'appui tête :

Insérer l'appui tête dans les 2 tubes du dossier.

Utilisation du fauteuil

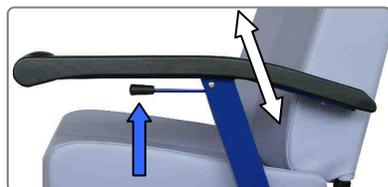

Réglage en hauteur des accoudoirs :

Actionner la manette vers le haut et ajuster l'accoudoir à la hauteur souhaitée.


IMPORTANT : Vérifier que l'accoudoir soit correctement verrouillé sur l'une des 3 positions du support accoudoir.



Réglage du dossier :

1 – Pour abaisser le dossier, actionner la manette latérale vers le haut et s'appuyer sur le dossier jusqu'à l'inclinaison souhaitée. Relâcher la manette pour bloquer le dossier en position.


2 – Pour relever le dossier, actionner la manette vers le haut sans appuyer sur le dossier.

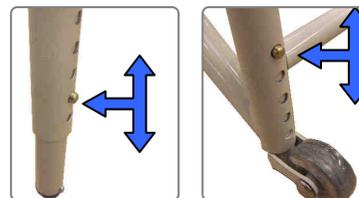

Réglage en hauteur (Quiégo 2000 – 2500) :

Régler les 2 rallonges avant et arrière à la hauteur souhaitée en appuyant sur le cliquet.

IMPORTANT: Vérifier que le cliquet soit correctement sorti.

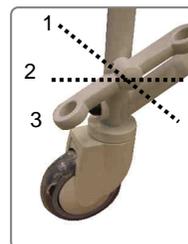

Utilisation du freinage 3 fonctions (Quiégo 3000 – 3500) :

Position 1 : Blocage directionnel

Position 2 : Roues libres


Position 3 : Roues freinées



Rangement de l'appui tête

(Quiégo 2000/2500/3000/3500):

Sur les modèles 3000-3500 vous avez la possibilité de ranger l'appui tête à l'arrière du dossier en l'insérant dans les 2 logements du châssis prévus à cet effet.

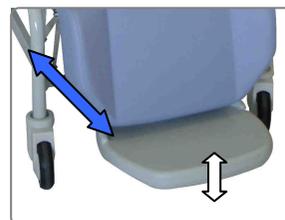

Repose pied (Quiégo 3000 – 3500) :

Les modèles 3000-3500 sont équipés d'un repose pied escamotable sous l'assise du fauteuil, avec une sécurité anti-basculement.