

NOTICE D'UTILISATION : Chaise garde-robe **OSIRIS** (S70001700-BL18)



Lire attentivement les mises en garde et instructions avant toute utilisation de la chaise. Conserver cette notice.

La chaise garde-robe OSIRIS est équipée de 4 roulettes (dont 2 avec freins), d'un repose-pieds rabattable, d'accoudoirs escamotables et d'un seau.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions hors tout (l x p x h) : 70 x 71 x 96 cm (p = 86 avec repose-pieds déplié)
- Dimensions (l x p x h) : coussin assise : 46 x 46 x 3,5 cm
coussin assise percée : 40,5 x 45 x 3,5 cm
- Dimensions coussin dossier (l x p) : 42 x 24 cm
- Dimensions ouverture assise percée (l x p) : 20,5 x 25,5 cm
- Largeur entre accoudoirs : 55,5 cm
- Hauteur sol/accoudoir : 75,5 cm
- Hauteur sol/assise percée : 52 cm
- Hauteur assise percée/dossier : 44 cm
- Hauteur assise percée/accoudoir : 23,5 cm
- Longueur accoudoir : 40 cm (manchette : 25 x 7 cm)
- Largeur utile repose-pieds : 32 cm
- Diamètre roulettes : 7 cm (4 roulettes dont 2 avec freins)
- Couleur : châssis : gris - garnitures : bleues ciel
- Poids : 12 kg (avec le seau)
- Matière : châssis : acier - garnitures : PVC

POIDS MAXIMUM UTILISATEUR :  = **100 kg**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LA CHAISE :

- Toujours enclencher les 2 freins situés sur les roulettes arrière avant toute utilisation.
- S'assurer que tous les composants de la chaise sont solidement fixés.
- Le sol doit être plan, stable et adhérent.
- La chaise garde-robe n'est pas prévue en tant que chaise de douche. Toute utilisation en milieu humide est proscrite.
- L'utilisateur ne doit pas présenter de trouble de l'équilibre et doit pouvoir se tenir assis seul (veiller à sa stabilité lors de l'utilisation).
- Ne jamais laisser l'utilisateur sans surveillance si un ou les 2 accoudoirs sont escamotés sur les côtés.
- La chaise garde-robe ne doit pas être utilisée pour supporter des personnes de plus de 100 kg.
- Vérifier, avant chaque utilisation, que les coussins d'assise, de dossier et les roulettes sont solidement fixés, que les freins sont efficaces.
- Ne pas se mettre debout sur la chaise.
- Ne pas se mettre debout sur le repose-pieds pour effectuer le transfert du patient (replier le repose-pieds avant).
- Toujours maintenir le patient au fond de la chaise en cas de déplacement (pas de transport sur de longues distances).
- En cas d'exposition prolongée à une source de chaleur, les éléments de sellerie peuvent atteindre une température élevée.
- Lors de la manipulation, faire attention de ne pas positionner les doigts au niveau des zones de pliage (accoudoirs & repose-pieds).

PRESCRIPTION - INSTALLATION :

La chaise doit être prescrite par **un professionnel de santé qui s'assurera que les caractéristiques du produit sont corrélées à la pathologie de l'utilisateur.**

La mise en service de la chaise doit être faite par un professionnel de santé compétent qui expliquera au futur utilisateur comment utiliser le produit en toute sécurité, en insistant sur les zones où un risque de pincement existe. L'installateur devra s'assurer que les consignes de sécurité et d'utilisation sont bien comprises.



INSTRUCTION DE MONTAGE ET D'UTILISATION :

La chaise est livrée partiellement montée. Il est nécessaire de positionner le dossier et les accoudoirs :



Engager le dossier dans le châssis, mettre en place le clips (un de chaque côté)



Positionner le tube **A** à l'arrière du dossier et engager de chaque côté les accoudoirs dans leur logement



Vérifier que les clips sont correctement verrouillés (accoudoirs et dossier)

- Enclencher les freins, vérifier l'emboîtement des accoudoirs et mettre en place le seau (le glisser sous l'assise percée par le côté ou par le dessus; dans ce second cas, rabattre l'assise percée contre le dossier). Mettre le coussin sur l'assise percée si nécessaire.
- Avant de s'asseoir, s'assurer que la chaise ne glisse pas sur le sol, se placer dos à la chaise, utiliser les accoudoirs pour se maintenir, puis se placer au-dessus de l'assise et s'asseoir délicatement (un ou les 2 accoudoirs peuvent être escamotés pour faciliter l'installation; dans ce cas, il est impératif de les remettre en place une fois la personne assise).
- S'il est nécessaire, abaisser le repose-pieds jusqu'à ce qu'il vienne se positionner contre le châssis.
- L'assise percée est clipsée à l'arrière sur le châssis. Pour enlever le seau, il faut relever l'assise, elle restera alors bloquée contre le dossier.

ENTRETIEN RÉGULIER :

- Nettoyer régulièrement la chaise à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'eau savonneuse tiède suivie d'un séchage (ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs ou à base d'Eau de Javel qui risqueraient d'endommager ou de décolorer le produit).
- Vérifier régulièrement l'état des roulettes et l'efficacité des freins et des éléments de serrage, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
- Vérifier la solidité des éléments de sellerie qui ne doivent pas être détériorés, ni présenter de trace d'usure ou de fissure.
- Vérifier régulièrement la stabilité de la chaise. Les roulettes doivent toucher le sol.
- **Faire vérifier la chaise, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder au remplacement de pièces fournies exclusivement par Drive DeVilbiss Healthcare France.**

CONDITIONS DE GARANTIE :

La structure mécanique est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal de la chaise et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises.

La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Drive DeVilbiss Healthcare France.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.



Distributeur : Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame
BP19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496 - www.drivedevilbiss.fr



Ningbo Shenyu Medical Equipment Co., Ltd.
NO.1318 West of Tanjialing Road, Yuyao City,
315408, Zhejiang Province - CHINE



Easy Way Healthcare
Polígono Bonavista - Camí de la Pelleria, 20
08915-Badalona (Barcelona) - ESPAGNE

