

drive

DeVilbiss®
HEALTHCARE

Lève-patient

Novaltis

GUIDE D'UTILISATION



CE

Plus d'informations :



GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU LÈVE-PATIENT *Novaltis*

SOMMAIRE

I - AVERTISSEMENTS	2
II - SYMBOLES UTILISÉS	2
III - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	3
3.1 <i>Novaltis</i>	3
3.2 Ensemble de levage	4
IV - UTILISATION PREVUE	4
V - PRINCIPE DE MONTAGE	4
5.1 Terminologie générale	4
5.2 Déballage	5
5.3 Montage	5
5.4 Pliage	6
VI - UTILISATION DU <i>Novaltis</i>	6
6.1 Mise en service	6
6.2 Mise en charge	7
6.3 Problèmes rencontrés	7
6.4 Bloc batteries	7
VII - VERTICALISATION D'UN PATIENT	7
7.1 Ecartement de l'embase	7
7.2 Réglage des bandes talonnières	7
7.3 Transfert du patient	7
VIII - GAMME DE SANGLES POUR LE <i>Novaltis</i> ET ENTRETIEN	8
8.1 Vérifications	8
8.2 Nettoyage	8
8.3 Consignes d'utilisation	8
IX - ENTRETIEN DU <i>Novaltis</i>	8
9.1 Nettoyage	8
9.2 Désinfection	8
9.3 Entretien journalier	9
9.4 Entretien courant	9
9.5 Maintenance préventive	9
9.6 Expédition, stockage et destruction	9
X - CONDITIONS DE GARANTIE ET RESPONSABILITES	10
XI - AVANT D'APPELER LE SERVICE APRES VENTE	
Drive DeVilbiss Healthcare France	11
XII - CARNET D'ENTRETIEN	12

 **LIRE ATTENTIVEMENT CE GUIDE D'UTILISATION AVANT D'UTILISER CET APPAREIL.**

- **POIDS MAXIMUM DU PATIENT 175 Kg.**
- **CET APPAREIL DOIT ETRE UTILISE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE ET ENTRAINE.**
- **NE JAMAIS UTILISER UN APPAREIL DEFECTUEUX.**
- **UNE MAINTENANCE ANNUELLE EST OBLIGATOIRE.**

I - AVERTISSEMENTS

Il est de la responsabilité du loueur d'informer et de former l'utilisateur à la manipulation du lève-patient en détaillant les précautions d'emploi et les risques liés à une mauvaise utilisation. Les zones de pincement doivent faire l'objet d'explications détaillées. Le loueur doit s'assurer que l'utilisateur a parfaitement compris les consignes de sécurité.

Lors du montage et de l'utilisation de l'appareil il est recommandé de tenir les mains éloignées des zones de pincement.

Lors d'une exposition prolongée de l'appareil à une source de chaleur, rayons du soleil à travers une vitre ou radiateur, s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de brûlure avant d'utiliser l'appareil.

L'appareil doit être utilisé dans un endroit dégagé de sorte que l'environnement ne gêne pas les manœuvres.

Les sangles n'étant pas ignifugées, il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité de flammes ou de fumer.

Ne pas utiliser ou stocker l'appareil dans un endroit trop humide ou à proximité de projections d'eau (pluie, douche..).


Dans des cas très particuliers d'utilisation, le fonctionnement de l'appareil peut être perturbé par des ondes radioélectriques et électromagnétiques (proximité d'antenne de radiotéléphone...). En cas de dysfonctionnement, ne pas utiliser l'appareil. L'utilisation du lève patient peut interférer sur des systèmes électroniques sensibles, dans ce cas ne pas utiliser l'appareil.

Le poids et l'encombrement des composants sont tels qu'il existe des risques lors des manipulations de démontage et de remontage ; il est donc fortement souhaitable de se faire assister et de prendre garde au risque de pincement.

II - SYMBOLES UTILISÉS

	Charge de fonctionnement en sécurité
	Avertissement
	Lire les instructions d'utilisation
	Dispositif conforme à la directive 93/42/CEE
	Fabricant du dispositif
	Numéro de série
	Dispositif soumis à la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et mis sur le marché après le 13 août 2005.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU LÈVE-PATIENT *Novaltis*

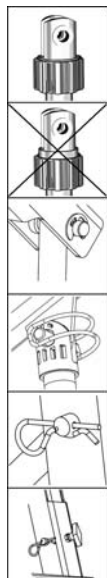


- Vérifier que la bague rouge de descente d'urgence est en position haute.
- Vérifier que l'anneau élastique est correctement engagé dans la gorge de l'axe.
- Vérifier que la goupille élastique est correctement orientée de chaque côté de la patte, et bien fermée.
- Vérifier que la goupille bêta au bas du mat est correctement positionnée.
- Vérifier que le bouton papillon est correctement vissé.


Structure : acier-revêtu	époxy gris RAL 7005/7004
Vérin électrique (montée)	24VCC 8000N
Débrayage mécanique de la tige du vérin (bague rouge)	
Alimentation par batteries	2 x 4.5Ah, 12V (incluses dans bloc batteries)
Chargeur de batterie externe	
Indicateur de charge batterie	par LED
Boutons	Arrêt d'urgence et descente d'urgence
Autonomie de l'appareil en nombre de cycles (montée/descente) avec un poids moyen de 100Kg, avec des batteries neuves et chargées	50 cycles
Année de marquage CE	2014

ETIQUETTE D'IDENTIFICATION

L'étiquette d'identification est collée sur la traverse.

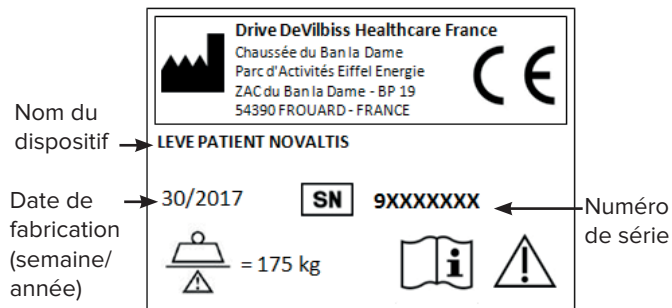

Dispositif conforme à la norme ISO 10535

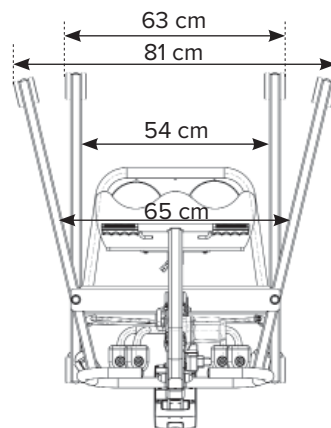


Cotes +/- 1 cm

III - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3.1) *Novaltis*

Dimensions (plié) LxIxh	93 x 63 x 40 cm
Amplitude de levage	45 cm
Dimensions (déplié) LxIxh	103 x 63 x 101 cm
Capacité de levage	175 kg
Ecartement des pieds intérieurs	54 cm min. à 81 cm max.
Diamètre de giration	110 cm
Hauteur de la base	9 cm
Temps de montée	20 s (à vide)
Poids de l'appareil	39 kg
Durée de vie	10 000 cycles à 175 kg
Roues avant	dia. 7,5 x 6 cm sans frein
Roues arrière	dia. 7,5 x 6 cm équipées d'un frein
Appui genoux	

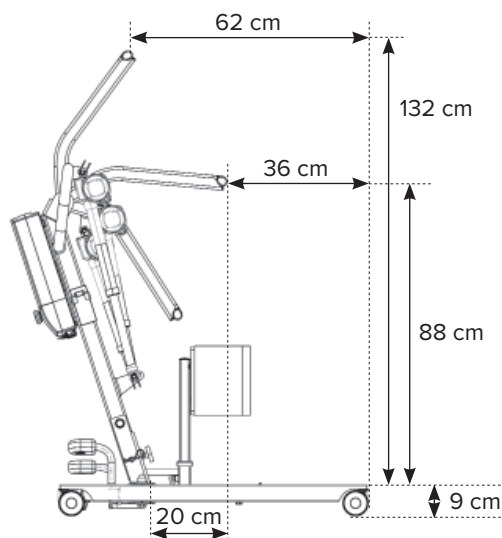

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU LÈVE-PATIENT *Novaltis*



Important : Cet appareil doit être utilisé avec des sangles (élément de sécurité) exclusivement fournies par Drive DeVilbiss Healthcare France.

Force de commande actionnée :
- par un doigt : < 5N
- par la main : < 105 N
- par le pied : < 300 N

3.2) Ensemble de levage

Boîtier autonome : (boîtier de contrôle + bloc batteries)

Dimensions	L=368 l=120 h=107,6 mm
Poids	4,8 Kg
Protection primaire	limiteur de courant
Tension de sortie	24 V continu
Courant de sortie	8,5 A maxi par sortie
Nombre de sorties	1
Capacité batteries	4,5 Ah
Tension batteries	2 batteries 12 V
Autonomie	50 cycles environ
Durée de charge	8 h
Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence Touche descente d'urgence(1) (2) (photo n°2, p.5) Voyant batterie chargée / déchargée	
Protection	IP 54

Actionneur ou vérin :

Alimentation	24 V DC
Entraxe maxi	605 mm
Course maxi	165 mm
Force de poussée maxi	8000 N
Temps de montée	15s (à vide) 20s (à charge)
Vitesse à vide	29 mm /s
Vitesse en charge	15 mm /s
Poids	2,7 kg
Protection	IP X4
Débrayage mécanique / Erou de sécurité	
Niveau sonore	≤ 60 dB

Chargeur de batterie externe :

Alimentation	230V AC 50-60 Hz
Sortie	24V continu
Protection	IP20

(Nous nous réservons le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis)

IV - UTILISATION PRÉVUE

- Cet appareil de transfert est destiné au transfert de patients à mobilité réduite ; il peut être utilisé avec un fauteuil roulant, un siège de douche ou un siège de WC.
- Le **Novaltis** doit être utilisé exclusivement en intérieur sur un sol plan, stable et adhérent ; il doit être manipulé par un personnel compétent formé à l'utilisation de ce type d'appareil.

V - PRINCIPE DE MONTAGE

5.1) Terminologie générale

- 1 - Mât
- 2 - Base
- 3 - Appui-tibias
- 4 - Bras de levée
- 5 - Vérin de levée
- 6 - Télécommande
- 7 - Boîtier de contrôle
- 8 - Bloc batteries
- 9 - Pédale d'écartement des longerons
- 10 - Longerons
- 11 - Bandes talonnières réglables



5.2) Déballage

Vérifier que les différents éléments composant l'appareil n'ont pas subi de détérioration pendant le transport.

Vérifier la présence des accessoires : comprenant l'ensemble de levage (boîtier avec bloc batteries, chargeur batteries, vérin et télécommande), un guide d'utilisation et éventuellement une sangle si commandée.

Note : Notre appareil est monté et testé sur notre site de fabrication, mais son conditionnement nécessite un pliage.


5.3) Montage

A- Pièces fournies :

- 1 - structure *Novaltis* avec ensemble de levage : boîtier (incluant bloc batteries) + chargeur batteries, vérin et télécommande (photo n°1),
- 2 - un guide d'utilisation *Novaltis*,
- 3 - éventuellement une sangle, si commandée.

B - Mise en place de la structure :

- 1 - Retirer la structure du carton, (éventuellement en coupant les angles du carton), poser la structure sur un sol plat et bloquer les freins de roues.
- 2 - En bas du mât, après avoir retiré la goupille (6) (photo n° 4, p.6), retirer de l'orifice l'axe de sécurité du mât (7) (photo n°5, p.6).
- 3 - Redresser le mât puis positionner l'axe de sécurité du mât (7) dans le second orifice (8) et remettre la goupille (6) (photo n°6, p.6). Serrer la vis de rattrapage de jeu (9) (vis papillon noire) (photo n° 6bis, p.6).
- 4 - A l'aide de la télécommande, faire sortir la tige du vérin afin de déplier la flèche.
- 5 - Positionner le repose-jambes dans son support (appui-tibias).
- 6 - Vérifier que le boîtier est bien chargé :
 - vert : batteries complètement chargées,
 - vert et jaune : batteries chargées à 3/4,
 - jaune : batteries chargées à 1/2,
 - jaune et rouge : batteries presque vides, mettre en charge,
 - rouge : batteries vides, elles doivent être chargées, immédiatement au risque de réduire leur durée de vie.

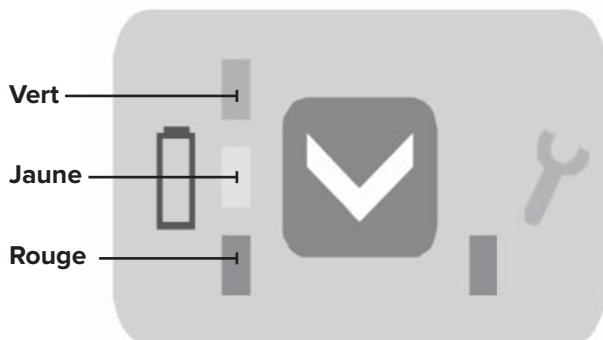

- Si le voyant rouge (sous la petite clef) est allumé, l'appareil nécessite une maintenance particulière. Contacter le SAV Drive DeVilbiss Healthcare France.

ATTENTION : avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous que tous les axes, vis et goupilles manipulés lors de l'installation sont parfaitement engagés dans leurs supports respectifs et qu'ils sont correctement verrouillés.

Le *Novaltis* est fonctionnel sous réserve de bien utiliser la sangle correspondant à cet appareil et de respecter la charge maximale admissible de 175 kg.

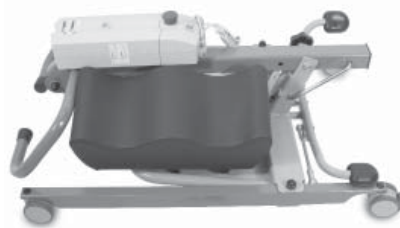


Photo n°1 - *Novaltis* présenté assemblé et plié

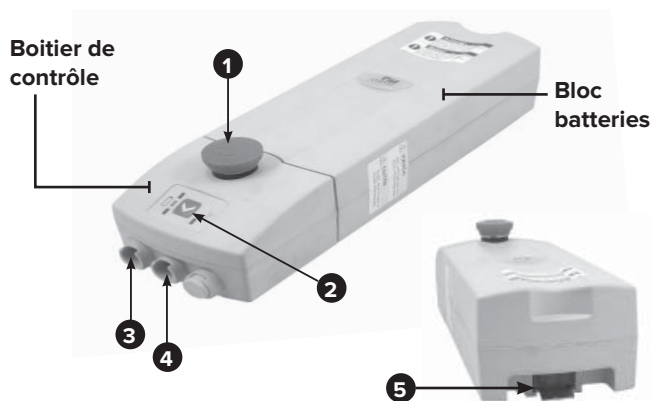


Photo n°2 - Boîtier d'alimentation (incluant bloc batteries)

- 1 - Bouton coup de poing d'arrêt d'urgence
- 2 - Touche descente électrique d'urgence
- 3 - Fiche connexion vérin
- 4 - Fiche connexion télécommande
- 5 - Bouton deverrouillage bloc batteries

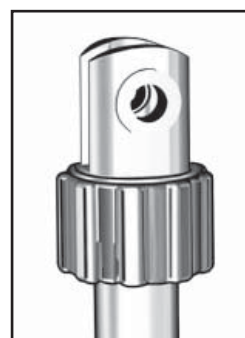


Photo n°3

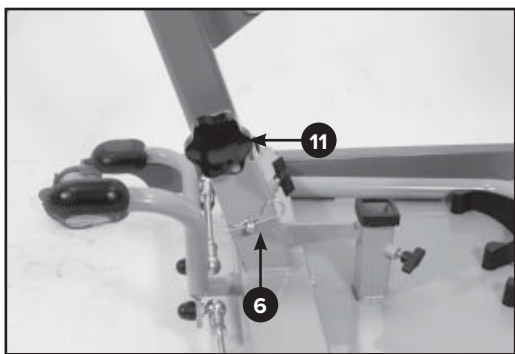


Photo n°4 - Goupille axe de sécurité

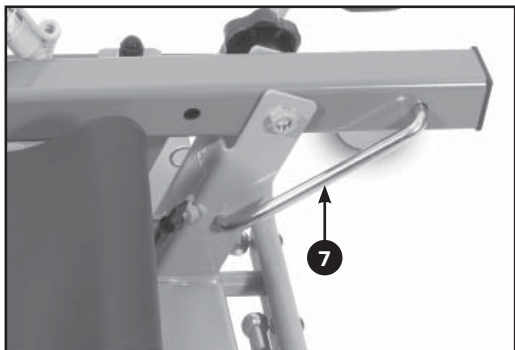


Photo n°5 - Axe de sécurité du mât

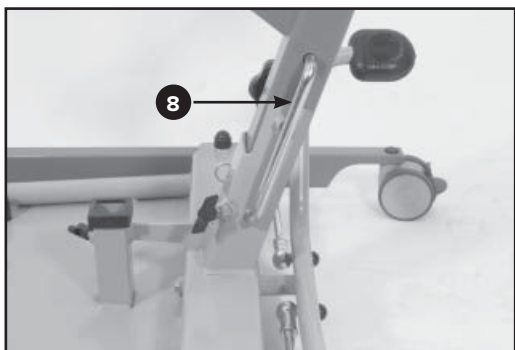


Photo n°6 - Position de l'axe de sécurité mât redressé

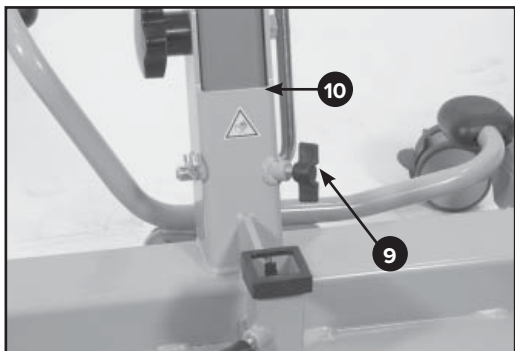


Photo n°6 bis - Vis de rattrapage de jeu

5.4) Pliage

Le pliage est à effectuer pour le transport de l'appareil. (photo n°1, p.5).

- Appuyer sur la télécommande pour replier le bras de levage.
- Retirer le repose-jambes.
- Enlever la goupille (6) et l'axe de sécurité du mât (7).
- Abaisser l'ensemble mât/flèche sur les longerons.



ATTENTION : risque de pincement (10 photo n°6)

- Remettre l'axe de sécurité du mât dans sa 1ère position, remettre sa goupille.
- L'appareil peut être transporté ou stocké à la verticale (photo n° 7)



Photo n°7

Afin de faciliter le transport du Novaltis, il est possible de le démonter en deux parties en dévissant complètement le bouton (11) (photo n° 4) et en retirant l'axe de sécurité (7) (photo n°5).

Attention Dévisser partiellement la vis de rattrapage de jeu (9) (photo n° 6 bis) avant de séparer le mât de la base roulante. Après remontage, vérifier que tous les éléments de fixation et la goupille de sécurité sont bien en place. Serrer fortement le bouton (11). Poids de la base roulante équipée : 20,3 kg (poids du coussin : 2,7 kg).

Poids du mât et flèche: 16 kg et 12,5 kg sans le pack batteries.



VI - UTILISATION DU *Novaltis*



AVERTISSEMENT

Le *Novaltis* doit être utilisé exclusivement en intérieur sur un sol plan, stable et adhérent ; il doit être manipulé par un personnel compétent formé à l'utilisation de ce type d'appareil.

6.1) Mise en service

Lorsque tous les câbles ont été connectés :

- Faire fonctionner l'appareil avec la télécommande.
- Vérifier la charge des batteries (voir code couleur chap. V - 5.3 - B-6).
- L'appareil est prêt à fonctionner.

6.2) Mise en charge

 **LA MISE EN CHARGE DU BOITIER EST A EFFECTUER CHAQUE SOIR.**

 **Effectuer cette opération dans un local bien aéré, vérifier l'état du cordon secteur avant de le brancher.**

- Pour effectuer la mise en charge de la batterie, retirer le chargeur de son support et le brancher sur une prise secteur. Durant la charge, le voyant vert clignote.
- Lorsque le voyant vert est fixe, la charge est terminée (voir code couleur chap. V - 5.3 - B-6).
- L'appareil est à nouveau prêt à fonctionner.

6.3) Problèmes rencontrés

- Dans le cas où la télécommande ne peut faire redescendre le patient, appuyer sur le bouton descente d'urgence (2)(photo n°2, p.5).
- Si le voyant rouge s'allume en continu lors d'une levée ou descente, mettre l'appareil en charge.
- Si la télécommande ou le vérin ne fonctionne pas, vérifier les connexions.

 **EN CAS DE PROBLEME LORS D'UNE LEVEE OU DESCENTE AVEC UN PATIENT, SE SERVIR DE L'ARRET D'URGENCE (1)(photo n°2, p.5) EN APPUYANT DESSUS. LE REARMER EN LE TIRANT.**

EN CAS DE PROBLEME D'ALIMENTATION ELECTRIQUE, IL EST POSSIBLE DE DESCENDRE OU MONTER MANUELLEMENT LA FLECHE EN APPUYANT ET EN TOURNANT LA BAGUE ROUGE SITUÉE A L'EXTREMITÉ DE LA TIGE DU VERIN (photo n° 3, p.5). NE PAS OUBLIER DE LA REMETTRE EN POSITION.

 **ATTENTION : Le vérin ne doit être utilisé qu'en service discontinu 2 minutes de travail puis 18 minutes de repos. Ne pas dépasser 2 minutes de fonctionnement en continu.**

Toute fréquence d'utilisation excédant le cycle ci-dessus peut entraîner une dégradation de l'ensemble de levage (vérin / boîtier de commande). Cette dégradation est exclue de la garantie.

6.4) Bloc batteries

Les 2 batteries incluses dans le boîtier du bloc ne nécessitent pas d'entretien spécifique. Elles doivent cependant être régulièrement chargées afin de préserver leur durée de vie (minimum tous les 3 mois).

Sur demande, en option, un second bloc batteries vous permettra de disposer d'un appareil fonctionnel 24h sur 24.

VII - VERTICALISATION D'UN PATIENT

Avant de procéder à la verticalisation du patient, s'assurer que:

- le poids du patient est compatible avec la charge maximale admissible par ce lève patient -175 kg maxi-,
- les batteries sont chargées et que l'appareil est parfaitement opérationnel,
- le sol est stable et plat,
- les freins de l'appareil sont fonctionnels.

- Vérifier que le réglage des bandes talonnières convient au patient.
- Vérifier que la sangle est compatible avec le *Novaltis* (sangle Drive DeVilbiss Healthcare France).
- Vérifier que les attaches de sangle et les éléments de soutien du patient, sont en parfait état.
- Vérifier, dans le carnet d'entretien, inclus dans ce manuel, qu'une maintenance régulière est effectuée au moins une fois par an.
- Si le patient est agité, un accompagnateur doit sécuriser le déplacement du patient.

 **ATTENTION : Ne pas mettre les freins de roues lors de la verticalisation du patient. Ne pas poursuivre la montée ou descente du patient si les 4 roues ne sont pas en appui sur le sol. La levée doit se faire très progressivement en vérifiant que le patient est bien positionné dans la sangle et qu'il n'y a pas de risque de basculement lié à un porte-à-faux excessif.**

7.1) Ecartement de l'embase

- Appuyer sur la pédale pour écarter ou fermer l'embase du *Novaltis*.

7.2) Réglage des bandes talonnières

Réglage des bandes talonnières :

Les bandes talonnières peuvent être placées en 2 positions, vérifier le réglage nécessaire pour le patient.

Si nécessaire, déclipser les bandes talonnières de leurs plots, puis à l'aide d'une clé 6 pans de 5mm et d'une clé plate de 10mm, dévisser puis revisser les 4 plots dans la seconde position disponible sur le plateau repose pieds. Clipser les 2 bandes talonnières. S'assurer de leur bonne fixation.



7.3) Transfert du patient

- Basculer le patient sur l'avant tout en le maintenant.
- Faire glisser la sangle dans le dos du patient jusqu'au niveau du coccyx. Le bas de la sangle doit être en contact avec l'assise du fauteuil.
- Placer les côtés rembourrés de la sangle sous chaque aisselle du patient.
- Positionner l'appareil devant le patient.
- Mettre les pieds du patient sur le repose pieds.
- Placer les tibias du patient en appui sur le support tibial.
- Placer les attaches de la sangle à l'intérieur des crochets situés de chaque côté du bras du *Novaltis*.
- Déverrouiller les freins de l'appareil. Effectuer la levée, lorsque tous les points ci dessus ont été vérifiés.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU LÈVE-PATIENT *Novaltis*

Lors du transfert du patient celui-ci peut s'aider en maintenant les 2 poignées du bras.

Points particuliers :

- Lors de la mise en place de la sangle vérifier que celle-ci ne fasse pas de plis.
- Ne pas mettre les freins de l'appareil lors de la levée de façon que l'appareil se positionne correctement vis à vis du patient.

ATTENTION LORS D'UNE LEVÉE/DESCENTE NE JAMAIS METTRE LES FREINS DES ROUES POUR QUE L'APPAREIL SE POSITIONNE CORRECTEMENT DANS L'AXE DU PATIENT. EN CAS DE PROBLÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, IL EST POSSIBLE DE DESCENDRE OU MONTER MANUELLEMENT LA FLECHE EN APPUYANT ET EN TOURNANT LA BAGUE ROUGE SITUÉE À L'EXTREMITÉ DE LA TIGE DU VERIN.

VIII - GAMME DE SANGLES POUR *Novaltis* ET ENTRETIEN

2 sangles Lombaire sont disponibles pour *Novaltis*.

Désignation	Référence
Sangle lombaire Novaltis Medium	SR3701000
Sangle lombaire Novaltis Large	SR3702000
Sangle lombaire avec appui dorsal Novaltis Medium	SR3703000
Sangle lombaire avec appui dorsal Novaltis Large	SR3704000

8.1) Vérifications

(avant chaque utilisation et à effectuer par un personnel compétent)

Avant chaque utilisation, vérifier l'état des sangles : pas de couture décousue, le tissu et les sangles ne doivent pas être effilochés, pas de déchirure ni trace d'usure (trame du tissu transparente).

8.2) Nettoyage

(chaque fois que cela est nécessaire et à effectuer par un personnel compétent)

- Les sangles en P.V.C. peuvent être lavées à 40°C maxi. Pour les autres, se reporter à la notice jointe à la sangle.
- La désinfection se fait à l'aide de solutions détergentes (voir ci-dessous chap.IX - 9.2).

8.3) Consignes d'utilisation

Les sangles sont réglables en profondeur à l'aide de boucles de différentes longueurs. Dans ce cas, il faut utiliser les boucles de même longueur, à droite et à gauche du patient.

Positionnement correct des anneaux des sangles :



ATTENTION :


Bien respecter le sens d'accrochage des boucles de la sangle



Ce qu'il ne faut pas faire :



Pour les sangles lombaires médium et large (SR3701000 et SR3702000), utiliser la sangle ventrale et la sangle sous-fessière pour sécuriser le transfert si nécessaire.

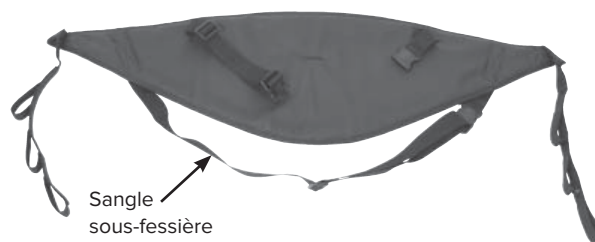

IX - ENTRETIEN DU *Novaltis*

9.1) Nettoyage

(mensuel ou en cas de nécessité et à effectuer par un personnel compétent)



Débrancher le chargeur et retirer le bloc batteries avant toute intervention.

- Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon doux imbibé d'une solution savonneuse suivi d'un rinçage et d'un essuyage méticuleux.
- Ne pas employer de détergent trop agressif, ne pas nettoyer à grande eau.

9.2) Désinfection

(en cas de nécessité et à effectuer par un personnel compétent)

- La désinfection se fait à l'aide de solutions détergentes et désinfectantes pulvérisées sur les surfaces externes de l'appareil. Il s'agit d'une solution moussante qui ne nécessite pas de rinçage mais un simple essuyage.

Nos services internes utilisent des solutions de la marque ANIOS.

9.3) Entretien journalier

- Mettre le bloc batteries en charge toutes les nuits.

9.4) Entretien courant

(mensuel ou en cas de nécessité et à effectuer par un personnel compétent)

L'entretien courant consiste à vérifier la fonctionnalité de l'appareil :

- L'appareil positionné sur un sol plan, vérifier que les 4 roues sont en appui.
- Lorsque les freins sont engagés, l'appareil ne doit pas pouvoir être déplacé (sol plan et adhérent).
- Faire fonctionner l'appareil, à vide, vérifier que le bras et les longerons se déplacent sans à-coups et sans bruit.
- Manipuler les poignées situées sur le mât et vérifier qu'il n'y a pas de jeu entre le bras et le mât et entre le mât et les longerons.
- Vérifier que les carters et boîtiers de protection en plastique ne sont pas cassés et qu'ils ne présentent pas de fissure ou de parties manquantes.
- Vérifier l'état des câbles de liaison : cordon secteur, télécommande et vérin. Si un câble présente la moindre trace de brûlure, d'usure, de coup ou si les fils sont apparents, mettre l'appareil immédiatement en quarantaine et faire remplacer les câbles par le service technique.

9.5) Maintenance préventive

(annuelle ou en cas de nécessité et à effectuer par un personnel compétent)

- Une visite annuelle de contrôle de l'appareil est indispensable.
- Bloc batteries à changer environ tous les 18 mois suivant utilisation.

La maintenance annuelle doit être effectuée par un personnel de formation technique qualifié et entraîné à la maintenance des appareils électromécaniques.

Les opérations de maintenance ne nécessitent pas d'outillage particulier, un outillage adéquat doit être utilisé selon les règles de l'art.

Les serrages mécaniques, les jeux et ajustements doivent être exécutés selon les règles de l'art.

9.5.1) Inspection mécanique :

- Vérification des soudures. Contrôle visuel.
- Vérification des alignements. Contrôle visuel.
- Vérification et graissage après démontage des pivots de mât et de longerons.
- Vérification et graissage des fixations du vérin.
- Reprise des serrages de toutes les pièces.
- Démontage, nettoyage et graissage des roulettes avant et arrière.
- Démontage, nettoyage et graissage de l'articulation du mât.

Vérification de la fixation, du jeu des roulettes et de l'efficacité des freins.

Les pièces mécaniques présentant une fissure, des traces d'usure ou de défaut géométrique doivent être remplacées par des composants d'origine fournis par Drive DeVilbiss Healthcare France.

9.5.2) Inspection électrique :

- Vérification de la télécommande. Rappel : la télécommande n'entre pas dans le champ de la garantie.
- Contrôle du chargeur.
- Contrôle du boîtier de commande et du vérin.
- Contrôle de la vitesse montée/descente.
- Contrôle de l'arrêt d'urgence et de la descente d'urgence.
- Etat des câbles électriques (changer les câbles en cas de doute).

Remplacer les câbles électriques, et ou les composants auxquels ils sont reliés, s'ils présentent des traces d'usure, de coupure de la gaine, de dégradation des prises ou un noircissement des plastiques et gaine autour des zones de raccordement. Remplacer les composants défectueux par des composants d'origine.

Note : Ne jamais démonter les carters de protection du vérin, bloc batteries, télécommande et boîtier de contrôle.

9.5.3) Test de charge :

- Mise en charge du bloc batteries.
- Vérification de la puissance et de l'autonomie de la batterie.
- Test de l'appareil à pleine charge et contrôle du seuil de coupure.
- Réglages et essais.
- Bloc batteries à changer environ tous les 18 mois suivant utilisation.

Les pièces usées ou présentant un défaut de fonctionnement doivent être remplacées par des pièces d'origine, fabriquées par Drive DeVilbiss Healthcare France.

9.5.4) Les sangles :

Les sangles doivent être vérifiées au moins une fois par mois, ou plus régulièrement en cas d'utilisation intensive, en s'assurant que Les coutures ne sont pas décousues, la trame des toiles et des sangles n'est pas apparente et qu'il n'y a pas de partie déchirée.

Ne jamais utiliser une sangle en mauvais état.

Les pièces usées ou présentant un défaut de fonctionnement doivent être remplacées par des pièces d'origine, fabriquées par Drive DeVilbiss Healthcare France.

Faire des essais avec une charge avant de remettre l'appareil en service.

9.5.5) Carnet d'entretien :

Chaque opération de maintenance ou intervention doit être consignée dans le carnet d'entretien inclus dans cette notice.

9.6) Expédition, stockage et destruction

- Le retour ou le transport de l'appareil doit se faire dans son emballage d'origine.
- Avant de stocker l'appareil, procéder à un nettoyage complet et vérifier le fonctionnement de l'appareil. Ranger l'appareil dans un local sec, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- A la mise en service après stockage, recharger les batteries, vérifier le fonctionnement avant toute nouvelle utilisation.

- Température de stockage : -10 à + 50°C Hygrométrie 10 à 80%.
- Température d'utilisation : +10 à + 40°C Hygrométrie 30 à 80%.
- La destruction des pièces défectueuses, des emballages et des batteries doit être confiée à des centres de traitement des déchets agréés.



- Le dispositif concerné ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais remis à un point de collecte approprié ou à un distributeur.
- Une contribution financière est versée pour la collecte, le démantèlement et le recyclage du dispositif concerné.
- En respectant ces consignes, vous contribuez à faire un geste pour l'environnement en participant à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

X - CONDITIONS DE GARANTIE ET RESPONSABILITÉS

Le **Novaltis** est garanti 5 ans sur structure, vérin et boîtier de contrôle, dans le cadre d'une utilisation normale suivant les instructions de ce guide. Sont exclus de la garantie les négligences, erreurs de manipulation ou accidents.

Toute modification ou adjonction d'accessoires sans autorisation écrite de Drive DeVilbiss Healthcare France, exclura de facto l'appareil de la garantie et de la responsabilité Drive DeVilbiss Healthcare France. En particulier, l'utilisation de sangles, non commercialisées par Drive DeVilbiss Healthcare France pour cet appareil, ne saurait engager notre responsabilité.

Les contrôles et vérifications périodiques mentionnés dans le paragraphe précédent, doivent être effectués par un personnel compétent et inscrits dans le carnet d'entretien de l'appareil. **Hors période de garantie, en cas de non-respect de ces contrôles et vérifications, notre responsabilité ne saurait être engagée.**

Seules des pièces détachées et composants fournis par Drive DeVilbiss Healthcare France peuvent être utilisés pour effectuer des réparations.

Une liste des pièces détachées est disponible sur demande en contactant le S.A.V. Drive DeVilbiss Healthcare France.

En cas de problèmes techniques non résolus, veuillez contacter le Service Après Vente au :

Tél. : 03.83.495.451
Fax : 03.83.494.391
E-mail : sav@drivedevilbiss.fr

XI - AVANT D'APPELER LE SERVICE APRÈS VENTE DRIVE DEVILBISS HEALTHCARE FRANCE

L'appel du Service Après Vente peut souvent être évité !

Si votre lève-patient ne fonctionne pas parfaitement, commencez par effectuer les contrôles suivants :

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Rien ne se passe lorsque l'on appuie sur l'une des touches de la télécommande.	▶ Le cordon de la télécommande n'est pas bien enfiché dans son logement. ▶ Le câble de la télécommande est coupé. ▶ Le bloc batteries n'est pas alimenté. ▶ Le bloc batteries est déchargé. ▶ La fiche de connexion du vérin n'est pas correctement enfichée. ▶ Le cordon du vérin est coupé.	▶ Enficher la fiche correctement. ▶ Remplacer la télécommande. ▶ Désenclencher le bouton coup de poing rouge. ▶ Recharger le bloc batteries. ▶ Enficher la fiche correctement. ▶ Changer le vérin.
Le vérin émet un bruit anormal.	▶ Le facteur de marche 2 mn/18 mn n'a pas été respecté. ▶ Le pignon ou l'écrou supportant le tube de poussée est endommagé.	▶ Envoyer le vérin au SAV de Drive DeVilbiss Healthcare France pour vérification. ▶ Envoyer le vérin au SAV de Drive DeVilbiss Healthcare France pour vérification.
Le vérin fonctionne mais très lentement.	▶ Le bloc batteries est déchargé. ▶ Le bloc batteries ne tient plus la charge.	▶ Recharger le bloc batteries. ▶ Remplacer le bloc batteries.
Les batteries ne se rechargent pas.	▶ Le câble de secteur n'est pas correctement raccordé. ▶ Il n'y a pas de tension sur la prise secteur.	▶ Vérifier le raccordement de la prise secteur. ▶ Vérifier la présence du secteur sur la prise murale.
Le voyant rouge sous la petite clef est allumé.	▶ L'appareil nécessite une maintenance particulière.	▶ Contacter le SAV Drive DeVilbiss Healthcare France.
Le voyant jaune du boîtier de contrôle s'allume.	▶ Le bloc batteries est chargé à moitié.	▶ Prévoir de recharger le bloc batteries.
Aucun voyant du boîtier de contrôle ne s'allume.	▶ Le bloc batteries est hors service.	▶ Changer le bloc batteries.
Le voyant rouge du boîtier de contrôle s'allume.	▶ Le bloc batteries est déchargé.	▶ Recharger immédiatement le bloc batteries.
La bague rouge de descente d'urgence sur la tige du vérin tourne.	▶ La tige du vérin est débrayée.	▶ Pousser la bague vers le haut.

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DU LÈVE-PATIENT *Novaltis*

XII - CARNET D'ENTRETIEN

N° DE SÉRIE DE L'APPAREIL :

ETABLISSEMENT :.....

Fiche à photocopier et à remettre au technicien lors de toute intervention sur l'appareil.

En cas d'incident, seule la présentation de toutes les fiches remplies de ce carnet permet de déterminer la responsabilité

DATE	Nature de l'intervention : Vérification, contrôle, devis, réparation...	Descriptif de l'intervention	Nom et qualité du technicien

Réf. M54064500 - 11/2017 - Rév. 5

Cachet

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél. 03 83 495 495 - Fax 03 83 495 496