

NOTICE D'UTILISATION

A lire attentivement avant toute utilisation du produit



TA 3942 – Déambulateur 4 roues Fortissimo avec siège



Caractéristiques techniques :

Châssis tubulaire : acier
Hauteur des poignées (mini/maxi): 880 / 990 mm
Angle des poignées : 0° - largeur entre poignées : 600mm
Dimensions : l=700 – p= 660 mm
Poids total: 12 kg
Dimension du siège : 460x330x50mm – hauteur sol siège : 550mm
Poids maxi utilisateur : 182 kg



182 kg



Remboursement (achat)



1285619

NOTICE D'UTILISATION

A lire attentivement avant toute utilisation du produit



TA 3942 – Déambulateur 4 roues Fortissimo avec siège



Caractéristiques techniques :

Châssis tubulaire : acier
Hauteur des poignées (mini/maxi): 880 / 990 mm
Angle des poignées : 0° - largeur entre poignées : 600mm
Dimensions : l=700 – p= 660 mm
Poids total: 12 kg
Dimension du siège : 460x330x50mm – hauteur sol siège : 550mm
Poids maxi utilisateur : 182 kg



182 kg



Remboursement (achat)



1285619

www.hms-vilgo.com

www.hms-vilgo.com

NOTICE D'UTILISATION

TA 3942

Le déambulateur 4 roues Fortissimo référence TA3942 est un dispositif médical d'assistance à la marche destiné aux personnes pouvant manquer d'équilibre et/ou ayant une mobilité réduite. Le déambulateur 4 roues se destine aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur, pour vos sorties, vos courses et vos promenades. Il est équipé d'un siège et d'un panier très pratiques ; les roues avant sont directrices et les roues arrière sont équipées d'un frein.

CONSIGNES D'UTILISATION

Vérifier que le déambulateur vous est livré en parfait état avant toute utilisation, avec l'ensemble des accessoires.
En cas de doute, contactez votre distributeur.

Montage :

- 1/ Couper les 2 liens qui maintiennent les roues avant au pied arrière et ôter les différentes protections mise en place sur le déambulateur pour le protéger durant le transport.
- 2/ Pour déplier le déambulateur : ouvrir le pied arrière vers l'extérieur et le verrouiller en poussant de chaque côté le mécanisme pliant pour bloquer la position ouverte (**figure 1**).
- 3/ Monter les tiges des poignées dans le châssis et régler à la hauteur souhaitée en les fixant à l'aide des 2 vis et molettes de serrage fournies à cet effet (**figure 2**).
- 4/ Monter la barre de dossier sur les 2 pièces plastiques du pied avant (vérifier la bonne sortie des boutons poussoirs) (**figure 3**).
- 5/ Relever le siège et suspendre le panier sur les supports horizontaux (**figure 4**).
- 6/ Pour plier le déambulateur (afin d'en faciliter son transport ou son stockage): Veiller à enlever le panier sous le siège, puis saisir le lien et le tirer vers le haut pour rabattre le pied arrière contre le pied avant (**figure 5**).

Utilisation:

Assurez-vous que le déambulateur est réglé à la bonne hauteur (les poignées droites et gauches doivent avoir la même hauteur et être correctement serrées). Ne commencez à avancer que lorsque vous êtes bien droit et que vous avez saisi les poignées avec vos deux mains. Votre déambulateur dispose de 2 types de freins : Lorsque vous vous déplacez, vous devez utiliser **le frein de service** : une simple pression constante vers le haut sur les deux poignées permet de freiner efficacement (**figure 6**). Lorsque vous êtes immobile, vous pouvez utiliser **le frein de stationnement** : en poussant les deux poignées vers le bas, le freinage reste bloqué (**figure 7**). Pour désengager les freins de stationnement, tirer les poignées vers le haut.

Consignes de sécurité:



- . Utiliser le déambulateur sur sol plan et stabilisé.
- . Vérifier l'état du châssis et le serrage de l'ensemble de la visserie.
- . Contrôlez régulièrement l'état des roues. Le freinage dépend du bon état des câbles de frein et des pneus. Faites les vérifier régulièrement.
- . Remplacez les pièces d'usure dès que cela est nécessaire.
- . La largeur du produit supérieure à 65 cm peut ne pas convenir pour un usage en domicile privé (passage de porte).

Nettoyage et entretien :

Effectuez le nettoyage avec un chiffon sec. Dans le cas de souillure importante, utiliser une éponge avec de l'eau chaude et un produit détergent.
Stockez ce produit à l'abri de l'humidité.

Garantie : 2 ans – contre tout vice de fabrication et défauts de matériaux. La garantie exclut les pièces soumises à usure naturelle ainsi que les dommages liés à des modifications apportées à la structure du produit, à une maintenance insuffisante, à une utilisation ou un stockage inappropriés, ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine.

NOTICE D'UTILISATION

TA 3942

Le déambulateur 4 roues Fortissimo référence TA3942 est un dispositif médical d'assistance à la marche destiné aux personnes pouvant manquer d'équilibre et/ou ayant une mobilité réduite. Le déambulateur 4 roues se destine aussi bien à un usage intérieur qu'extérieur, pour vos sorties, vos courses et vos promenades. Il est équipé d'un siège et d'un panier très pratiques ; les roues avant sont directrices et les roues arrière sont équipées d'un frein.

CONSIGNES D'UTILISATION

Vérifier que le déambulateur vous est livré en parfait état avant toute utilisation, avec l'ensemble des accessoires.
En cas de doute, contactez votre distributeur.

Montage :

- 1/ Couper les 2 liens qui maintiennent les roues avant au pied arrière et ôter les différentes protections mise en place sur le déambulateur pour le protéger durant le transport.
- 2/ Pour déplier le déambulateur : ouvrir le pied arrière vers l'extérieur et le verrouiller en poussant de chaque côté le mécanisme pliant pour bloquer la position ouverte (**figure 1**).
- 3/ Monter les tiges des poignées dans le châssis et régler à la hauteur souhaitée en les fixant à l'aide des 2 vis et molettes de serrage fournies à cet effet (**figure 2**).
- 4/ Monter la barre de dossier sur les 2 pièces plastiques du pied avant (vérifier la bonne sortie des boutons poussoirs) (**figure 3**).
- 5/ Relever le siège et suspendre le panier sur les supports horizontaux.
- 6/ Pour plier le déambulateur (afin d'en faciliter son transport ou son stockage): Veiller à enlever le panier sous le siège, puis saisir le lien et le tirer vers le haut pour rabattre le pied arrière contre le pied avant (**figure 4**).

Utilisation:

Assurez-vous que le déambulateur est réglé à la bonne hauteur (les poignées droites et gauches doivent avoir la même hauteur et être correctement serrées). Ne commencez à avancer que lorsque vous êtes bien droit et que vous avez saisi les poignées avec vos deux mains. Votre déambulateur dispose de 2 types de freins : Lorsque vous vous déplacez, vous devez utiliser **le frein de service** : une simple pression constante vers le haut sur les deux poignées permet de freiner efficacement (**figure 5**). Lorsque vous êtes immobile, vous pouvez utiliser **le frein de stationnement** : en poussant les deux poignées vers le bas, le freinage reste bloqué (**figure 6**). Pour désengager les freins de stationnement, tirer les poignées vers le haut.

Consignes de sécurité:



- . Utiliser le déambulateur sur sol plan et stabilisé.
- . Vérifier l'état du châssis et le serrage de l'ensemble de la visserie.
- . Contrôlez régulièrement l'état des roues. Le freinage dépend du bon état des câbles de frein et des pneus. Faites les vérifier régulièrement.
- . Remplacez les pièces d'usure dès que cela est nécessaire.
- . La largeur du produit supérieure à 65 cm peut ne pas convenir pour un usage en domicile privé (passage de porte).

Nettoyage et entretien :

Effectuez le nettoyage avec un chiffon sec. Dans le cas de souillure importante, utiliser une éponge avec de l'eau chaude et un produit détergent.
Stockez ce produit à l'abri de l'humidité.

Garantie : 2 ans – contre tout vice de fabrication et défauts de matériaux. La garantie exclut les pièces soumises à usure naturelle ainsi que les dommages liés à des modifications apportées à la structure du produit, à une maintenance insuffisante, à une utilisation ou un stockage inappropriés, ou à l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine.