

NOTICE D'UTILISATION

Cadre de marche *Brighton* (SA 120 1105)



Vous avez choisi d'acquérir un produit de Drive DeVilbiss Healthcare France : le cadre de marche BRIGHTON ; nous vous en remercions et vous félicitons de ce choix. Nous vous convions à lire ce guide d'utilisation et d'entretien afin de mieux connaître les performances et les qualités de ce cadre de marche.

Mise en garde : La corrélation entre la pathologie du patient et le type de produit à utiliser doit être faite par un professionnel de la santé. Ne pas utiliser le cadre de marche avant d'avoir reçu, de la part du professionnel, une formation et des consignes de sécurité.



AVERTISSEMENTS :

- Seuls les patients dont le poids n'excède pas 100 kg peuvent bénéficier de ce cadre de marche.
- L'utilisation du cadre de marche sur un sol irrégulier, de mauvaise qualité, inégal ou en pente est à proscrire absolument sous peine de faire basculer le patient.
- La mise en service doit se faire avec le concours d'une personne habilitée qui procédera aux réglages de l'appareil, adaptés à la morphologie et aux besoins de l'utilisateur.



Photo n°1



Photo n°2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Dimensions hors-tout (lxp) : 65 x 41,5 cm (hauteur mini.) (photo n°1) / 66 x 42,5 cm (hauteur maxi.)
- Hauteur réglable : de 79,5 à 87,5 cm (poignées) [5 positions - pas = 2 cm]
- Poids : 1,8 kg
- Largeur utile entre poignées : 41 cm
- Couleur : gris métal / Matière : aluminium
- Diamètre tube : 2,2 cm

POIDS MAXIMUM UTILISATEUR :  = 100 kg

PRÉSENTATION DU PRODUIT :

- Le cadre de marche est livré entièrement monté (photo n°1).
- Après avoir contrôlé l'état général, vérifier la présence, le serrage et le verrouillage de tous les éléments mécaniques.
- Régler la hauteur des 4 pieds en appuyant sur les boutons poussoirs (flèche photo n°2) puis ajuster à la longueur souhaitée.
- Attention :** Les 4 boutons poussoirs doivent tous être positionnés au même niveau de réglage sur les 4 pieds du cadre (photo n°1).
- S'assurer que les boutons poussoirs sont bien positionnés dans les trous d'indexage et qu'ils sont complètement engagés.

IMPORTANT

- Le professionnel de santé doit s'assurer que le patient a les facultés mentales et physiques suffisantes pour utiliser en toute sécurité le cadre.
- Vérifier la stabilité du cadre de marche et l'efficacité des boutons poussoirs de réglage en hauteur avant de le confier au patient.
- Ne jamais tenter de déplacer le cadre ou de modifier la hauteur si l'utilisateur est en appui sur celui-ci.
- Ne pas suspendre de poids sur le cadre afin de conserver toute la mobilité et fonctionnalité du produit et éviter tout basculement.

UTILISATION :

- Avant d'utiliser le cadre pour la première fois, vérifier que la hauteur des poignées est bien adaptée à la morphologie du patient.
- Le positionner devant soi, tenir fermement les poignées. Lorsque le corps est en équilibre, soulever légèrement le cadre, le déplacer vers l'avant puis le reposer sur le sol. Avancer à l'intérieur du cadre jusqu'à retrouver la position d'équilibre.
- Avant chaque utilisation, vérifier que : les 4 pieds du cadre ne sont pas tordus, le cadre est stable et les 4 boutons sont correctement enclenchés.

ENTRETIEN RÉGULIER :

- Eliminer systématiquement les salissures en utilisant une solution savonneuse suivie d'un séchage.
 - Vérifier régulièrement l'état des 4 embouts antidérapants, les remplacer dès qu'ils sont dégradés.
 - Vérifier régulièrement l'état des éléments de serrage, des tubes et des poignées. **Ne jamais redresser un tube déformé suite à un choc.**
- Faire vérifier le cadre, au moins une fois par an, par un service technique compétent. Seul un technicien habilité peut procéder à la maintenance et au remplacement de pièces fournies exclusivement par Drive DeVilbiss Healthcare France.

CONDITIONS DE GARANTIE :

La structure mécanique est garantie un an. Cette garantie correspond à un emploi normal du produit et exclut toutes les avaries dues à un manque d'entretien, à une mauvaise utilisation ou à un non respect des recommandations émises. La garantie ne s'applique pas au matériel réparé ou modifié sans l'accord de Drive DeVilbiss Healthcare France.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des matériaux et des pièces. Les emballages et le port restent à la charge du fournisseur final. Notre garantie ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts directs ou indirects.

Tout incident grave survenu en lien avec ce dispositif doit faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'état membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Importateur : Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie - ZAC du Ban la Dame
BP19 - 54390 FROUARD - FRANCE
Tél : 03 83 495 495 - Fax : 03 83 495 496



Bliss Health Products Co., Ltd
No.96, Zhaoyi Rd., Dongsheng Town,
Zhongshan City, Guangdong Province (Chine)



Y. Sung Handelsvertretung,
Duesselthaler Strasse 24, 40211
Duesseldorf (Allemagne)

drive
DeVilbiss
HEALTHCARE