
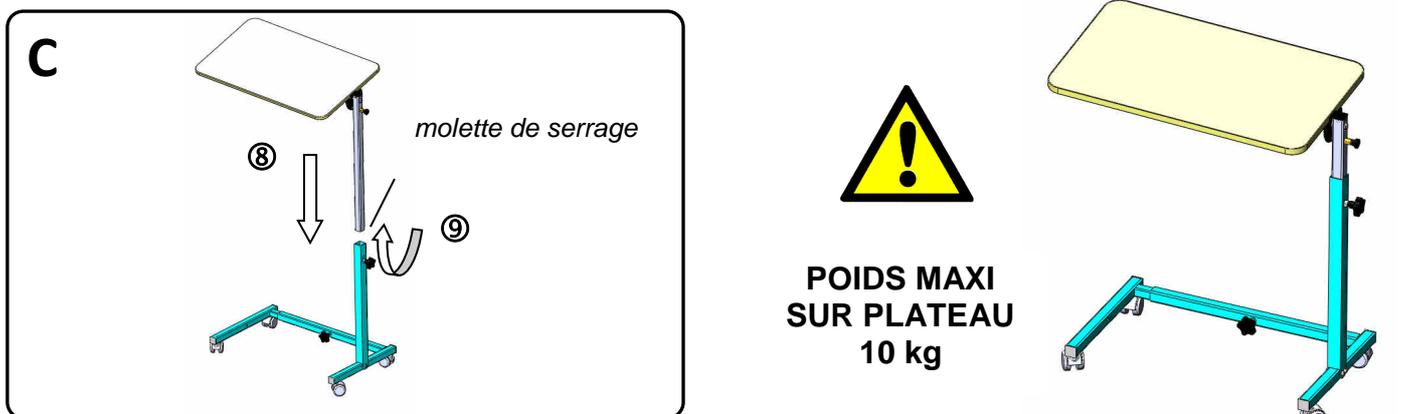
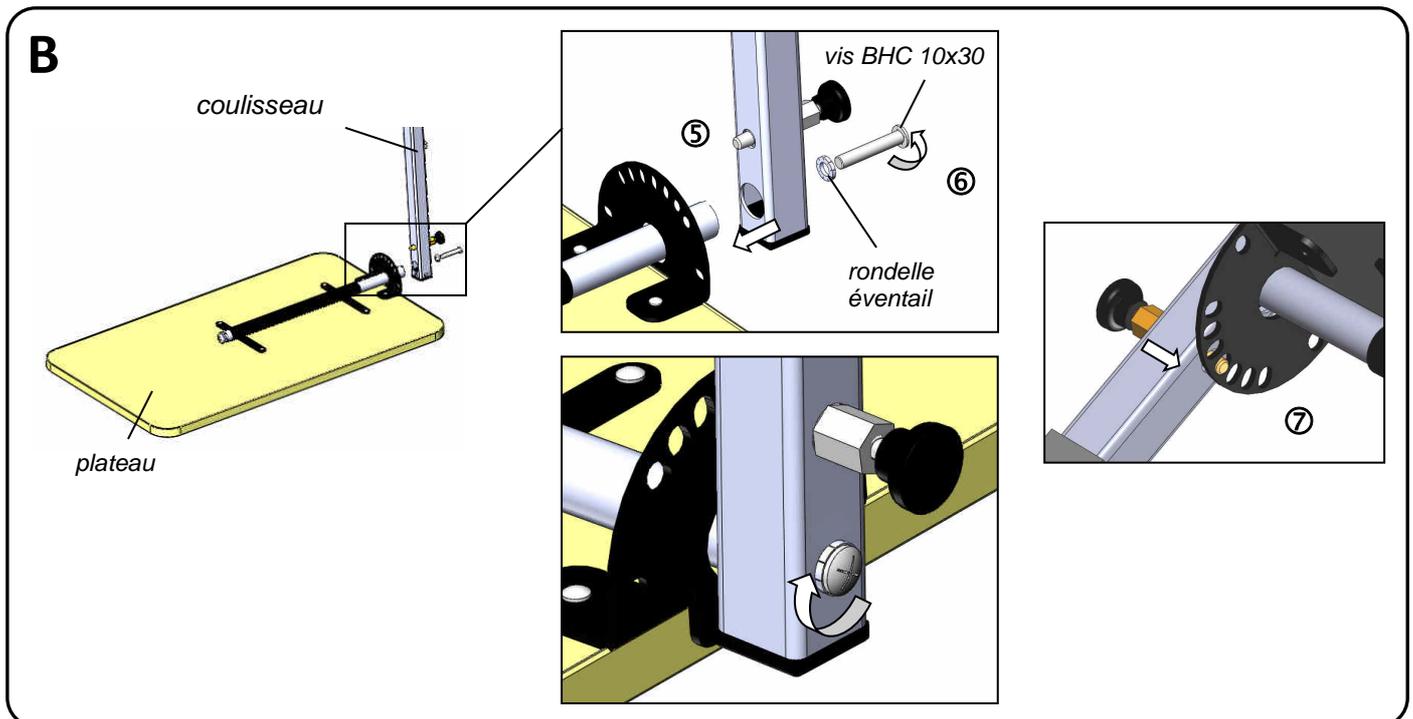


# NOTICE DE MONTAGE

## TABLE AC 207

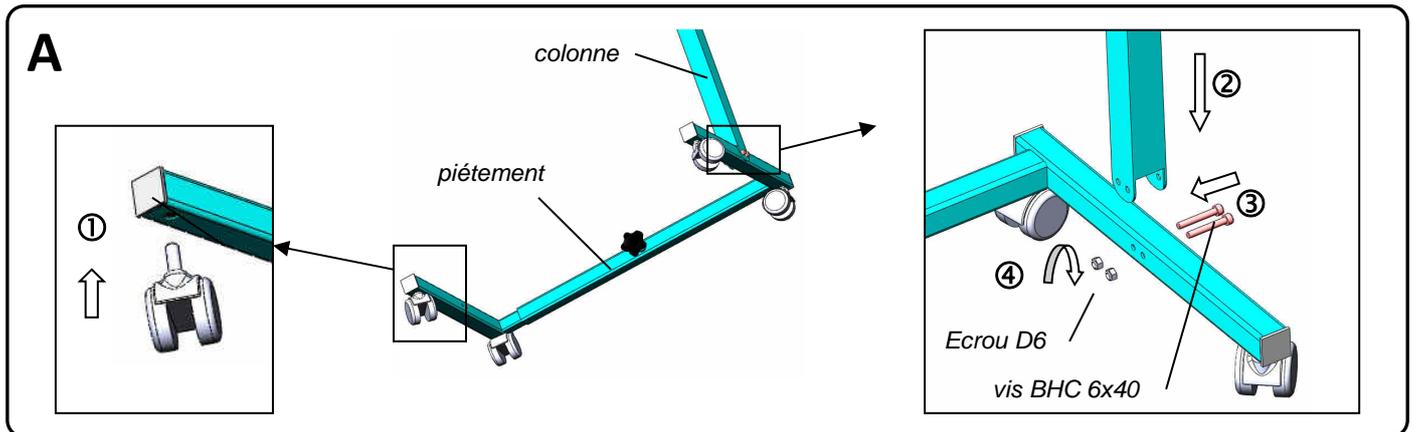

### MONTAGE AC 207

- 1/ Clipser les 4 roulettes sur le piètement,
- 2-3/ Fixer la colonne sur le piètement avec les 2 vis BHC 6x40 et 2 écrous freins diam. 6.
- 5/ Poser le plateau à plat sur une table et monter le tube carré du coulisseau sur l'ensemble plateau / support plateau.
- 6/ Fixer l'ensemble avec la vis BHC 10x30 en intercalant la rondelle éventail D10,
- 7/ Vérifier que l'axe du cliquet traverse la platine d'indexage.
- 8-9/ Monter l'ensemble coulisseau/plateau sur la colonne du piètement et régler à la hauteur souhaitée en vissant la molette de serrage.